



ottobock.

Dijabet ulošci

Quality for life

100 Years
Quality for life | **ottobock.**

Dijabet ulošci

su dizajnirani da obezbede anatomski položaj stopala ili rasporede pritisak mase na celu površinu i da na taj način pruže olakšanje za bolna stopala. Pružaju potrebnu podršku strukturama stopala i povećavaju udobnost.

Koriste ih osobe sa dijabetesom kako bi se poboljšala cirkulacija u stopalima, povećao senzibilitet i rasporedilo opterećenje na celu površinu stopala. Uložak je izrađen od mekanog materijala kako bi se sprečilo nastajanje rana kojima su osobe sa dijabetesom podložne zbog loše cirkulacije.

Kod osoba sa parcijalnom amputacijom u metatarzalnom nivou **moгуće je samo na ovom tipu uložka dodati ispunu.**

Za drugi kupljeni par uložaka dobijate popust od **50%**



CAD/CAM - Računarska priprema i korekcije, mašinska izrada

Nakon uzimanja otiska vrši se 3D skeniranje i obrada kompjuterskim dizajniranjem. Završna izrada je na CNC mašini.

Uputstvo za korišćenje i održavanje

Za što duže i delotvornije delovanje uložaka, molimo da sledite ove smernice:

- Postepeno navikavanje
- Nema vremenskog ograničenja u dnevnom nošenju ortopedskih uložaka nakon perioda navikavanja.
- Uložci se mogu premeštati u različitu obuću, odgovarajuće dubine.
- Pre stavljanja uložka u obuću, izvadite postojeći uložak.
- Uložke nemojte nositi na bosu nogu.
- Uložke čistite penom od sapuna i vlažnom krpom.
- Ostavite ih da se osuše, bez izlaganja suncu ili direktnim izvorima toplote.
- Za čišćenje nemojte koristiti alkohol!

Dijabetesno stopalo

predstavlja hroničnu komplikaciju dijabetesa koja se manifestuje promenama na stopalu kao posledica senzomotorne ili autonomne dijabetesne polineuropatije i/ili periferne arterijske bolesti.

Obuhvataju ga promene na koži, kostima i mišićima rezultujući narušenom arhitektonikom stopala i deformitetom, naglim oticanjem, gubitkom/oslabljenim osećajem, bolnim stopalima, ishemijskim promenama i na kraju ulceracijama, flegmonom, gangrenom i sledstvenoj amputaciji.

Prevenција krajnjih posledica je glavni cilj i zato je potrebno reagovati na vreme, kada se jave prvi simptomi i znaci, u saradnji sa lekarom koji se bavi uže oblašću dijabetesnog stopala.

Indikacije

- Dijabetes
- Poremećaj periferne cirkulacije
- Amputacije prstiju na nogama



Otto Bock Sava d.o.o.

Industrijska bb, 34000 Kragujevac
Paunova 82-84, 11000 Beograd
Vidovdanska 95/33, 37000 Kruševac

T +381 34 200 490
info@ottobock.rs
www.ottobock.rs



Ottobock.Srbija



ottobocksrbija



Otto Bock Srbija