

tramedico



Geachte patiënt,

U heeft besloten om deel te nemen aan het therapie-monitoring-programma met **QuantOn Cal**®. Dit is een belangrijke eerste stap naar verbetering van uw gezondheid. Om met de therapie-monitoring met **QuantOn Cal**® te beginnen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. **Installeer** de **QuantOn Cal**®-app vanaf de
 - Apple App Store
 - Google Play Store.
2. Nadat de **app is opgestart** volgt u de aanwijzingen op het beeldscherm, totdat u wordt gevraagd om de code van het competentiecentrum en de patiëntcode te scannen.
3. Richt uw mobiele telefoon op het groene kader op dit blad en **scan** beide barcodes. In de app kunt u zien of de barcodes zijn herkend.
4. Zo niet, herhaal deze procedure dan totdat zowel de **code van het competentiecentrum** als de **patiëntcode** succesvol zijn gescand.



Code van het
competentiecentrum

Patiëntcode

Hiermee is de **QuantOn Cal**®-app geïnstalleerd en klaar voor gebruik. U kunt nu het **QuantOn Cal**®-testsysteem (snelle zelftest en app) gebruiken om het calprotectinegehalte in uw ontlasting te bepalen.

Na een meting wordt het resultaat van uw sneltest automatisch doorgestuurd naar uw behandelend arts, die de analyse uitvoert en de uitslag vaststelt. Voor de grootst mogelijke veiligheid worden uw gegevens gecodeerd en gepseudonimiseerd verstuurd. Dit wil zeggen met gebruik van een patiëntcode in plaats van uw naam. Tegelijkertijd krijgt u het resultaat meteen in de app te zien.

Als nog hulp nodig heeft bij de installatie of het gebruik van de **QuantOn Cal**®-app, raadpleeg dan uw behandelend arts.

Stand: 2017-08-25

CE 0483



Preventis GmbH
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim, Germany
Tel: +49 6251 70711-0
Fax: +49 6251 70711-25
info@preventis.com
www.preventis.com

AKKOORDVERKLARING

Toepassing van het digitale testsysteem QuantOn Cal® voor de monitoring van IBD

U hebt besloten om het digitale testsysteem QuantOn Cal® toe te passen in het kader van uw medische behandeling. Met behulp van deze digitale kwantitatieve sneltest kunt u zelf de calprotectinewaarde van uw feces meten. Dit betekent dat u na een gedetailleerde voorlichting van uw behandelend medisch geschoold personeel, overal en altijd zelf uw ontlasting kunt testen. Hiervoor hebt u de sneltest verpakking en de smartphone app, die u gratis kunt downloaden via internet, nodig. Zowel u als uw behandelend arts kunnen direct na elke test de resultaten inzien. Zonder wachttijden en verzending van monsters en resultaten, zoals gebruikelijk is bij klassieke laboratoriumtesten. Zodoende voorkomt u tijdverlies en ongemakken. Soms kunnen sneller beslissingen worden genomen over de behandeling. In z'n geheel zorgt deze nieuwe methode voor een nauwkeuriger controle met een hogere betrouwbaarheid en ze is gebruiksvriendelijker.

De betrouwbaarheid van het testsysteem QuantOn Cal® is zeer hoog bij de meting van calprotectine. In uitzonderingsgevallen kan het echter, zoals bij elke andere test, leiden tot onjuiste resultaten. Ook zijn storingen niet volledig uit te sluiten bij de elektronische verzending. Bij dubieuze testresultaten kan aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk zijn. Over het algemeen worden beslissingen over de behandeling niet alleen op basis van een enkel testresultaat genomen, maar pas na een uitgebreide beoordeling van uw algemene toestand door uw behandelend arts.

U hebt begrepen dat voor het gebruik van QuantOn Cal® een smartphone nodig is. Er wordt slechts een beperkte selectie smartphone-modellen en besturingssystemen ondersteund door de QuantOn Cal®. De huidige ondersteunde apparaten en besturingssystemen vindt u onder www.quantoncal.com.

U wordt met nadruk gewezen op het feit dat de testresultaten die de QuantOn Cal®-app buiten de werktijd naar uw behandelend arts verstuurd (bijv. in het weekend, 's nachts, feestdagen, vakantie), op zijn vroegst op de volgende werkdag kunnen worden behandeld. Neem daarom bij twijfel indien nodig contact op met de door uw behandelend arts aanbevolen vervanger of spoedeisende hulpinstelling.

De heer / mevrouw (Dr.) heeft duidelijk en uitgebreid met u de digitale calprotectinetest QuantOn Cal® besproken en de daarmee samenhangende mogelijkheden en risico's. Bovendien hebt u de tekst van deze akkoordverklaring gelezen en begrepen. Uw behandelend arts of medisch geschoold personeel heeft duidelijk en afdoende de ontstane vragen beantwoord. U hebt voldoende tijd gehad om een beslissing te nemen en hebt momenteel geen andere vragen meer.


Met ondertekening gaat u ermee akkoord dat de met behulp van dit testsysteem verkregen gegevens kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor onderzoeks- en documentatiedoeleinden.

den, indien nodig ook na het beëindigen van het gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan de fabrikant van de test (firma Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, D-64625 Bensheim) of aan derden. Persoonlijke gegevens zoals naam of adres worden niet elektronisch verwerkt, opgeslagen of doorgegeven door **QuantOn Cal®**. Elke elektronische verstrekking en opslag van testresultaten door het **QuantOn Cal®** testsysteem vindt uitsluitend plaats in gepseudonimiseerde vorm. Dit wil zeggen dat uw identiteit wordt gecodeerd door een cijferreeks in de vorm van een barcode. De koppeling van de cijferreeks aan uw identiteit is uniek en alleen bekend bij uw behandelend medisch geschoold personeel. Het is daarom niet mogelijk de testresultaten buiten de artspraktijk te relateren aan uw identiteit, of u te identificeren als gebruiker. De gegevensoverdracht vindt plaats via versleutelde SSL-verbindingen. **QuantOn Cal®** biedt u hiermee een maximale bescherming van uw gegevens.

U hebt het recht het gebruik van het testsysteem te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen, zonder dat hieruit nadelen voortvloeien voor uw verdere medische behandeling.

.....
plaats, datum

.....
naam, handtekening

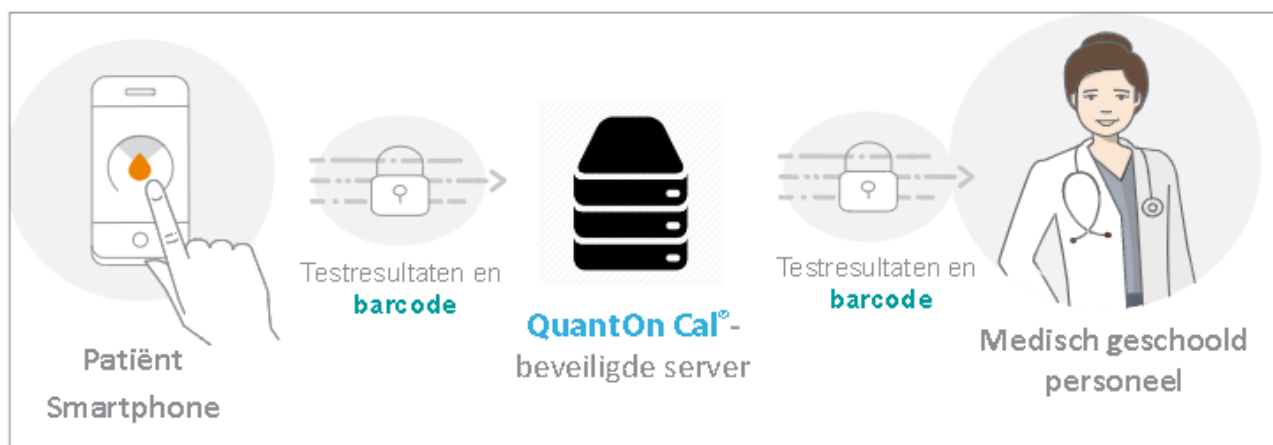

Stand: 2017-10-12