

Wichtig

Nimm dir Zeit, die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

Dein Rachenabstrich-Set

A Wattestäbchen im Röhrchen
(Abstrich-Set)



Tipp

Streiche einfach großflächig mit dem Wattestäbchen über die hinteren Bereiche im Rachen, die unten dargestellten Punkte müssen nicht exakt getroffen werden.

Vorbereitung


01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.



02 Abstrich-Set öffnen

Das Wattestäbchen durch eine Drehung aus dem Röhrchen ziehen.

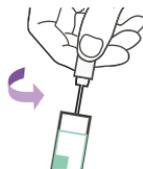

Probenentnahme

03 Wichtige Bereiche im Rachen

Die farbigen Punkte zeigen die Bereiche für den Abstrich an.



04 Abstrich durchführen

Das Wattestäbchen mit geringem Druck über die in der Abbildung gekennzeichneten Regionen im Rachen streichen.


Dabei kann ein leichter Würgereiz auftreten.



05 Abstrich-Set verschließen

Das Wattestäbchen zurück in das Röhrchen stecken. Zum Verschließen des Röhrchens die Kappe fest aufdrücken.

Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

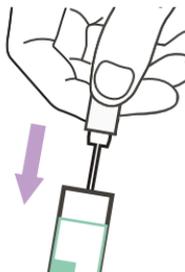

Der Rachenabstrich wird auf Chlamydien und Gonorrhö getestet

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die im Rachen, im Anus und in Penis oder Vagina vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per SMS oder Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund solltest du für die Behandlung einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö findest du auf: www.samhealth.de

Mehr Informationen
auf unserer FAQ-Seite

www.samhealth.de

Noch Fragen? Kontaktiere uns über sam@dah.aidshilfe.de oder per SMS an s.a.m +49 157 35 99 43 80