

## Wichtig

Nimm dir Zeit die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

### Dein Urin-Set:

- A Urin-Röhrchen
- B Schutzverpackung
- C Auffangbehälter



## Tipp

Du kannst entweder, wie unten beschrieben, den Auffangbehälter verwenden oder direkt in das Urinröhrchen urinieren.

## Vorbereitung


### 01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.



### 02 Auffangbehälter öffnen


Deckel des Urin-Röhrchens entfernen (aufbewahren!). Auffangbehälter durch vorsichtiges Drücken der Seiten entfalten, so dass sich eine Box bildet.

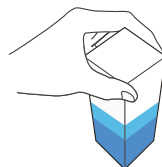

## Probenentnahme


### 03 In Auffangbehälter urinieren

In den Auffangbehälter urinieren bis der Behälter fast voll ist (bitte den Erststrahlurin verwenden).

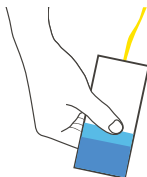


### 04 Urin in Röhrchen überführen

Urin in das Urin-Röhrchen umschütten bis es fast voll ist. Den Rest in die Toilette gießen.

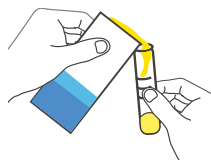

## 05 Schutzverpackung

Deckel des Urin-Röhrchens fest zudrehen, in die Schutzverpackung legen und verschließen. Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

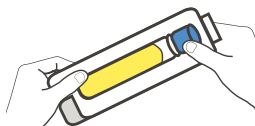

### Test auf Chlamydien & Gonorrhö

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die in Penis/Vagina, Rachen und im Anus vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund, solltest du für die Behandlung einen Arzt aufsuchen.

Für mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö gehe zu: [www.samtest.de](http://www.samtest.de)

**Telefon-Hotline**

(Mo-Do 10:00-16:00, Fr 10:00-15:00)

**030 690 087 90**

**Mehr Informationen**

**[www.samtest.de](http://www.samtest.de)**