

機器の手入れ

# 推奨されるクリーニング方法

消毒剤入りの推奨されるクリーニングワイプか、非酸性・非腐食性の推奨されるクリーナーを湿らせた糸くずの出ない布を使用してください。スプレー式クリーナーを使用する場合は、必ず糸くずの出ない柔らかい布に消毒用クリーナーを吹き付けて湿らせてから、フレームやプラスチックの表面を拭いてください。クリーナーを機器に直接吹き付けしないでください。

LCDコンソールやPVS機器のスクリーンを清掃する際は、糸くずの出ない布に91%イソプロピルアルコールと水を1：1で希釈した溶液のみを湿らせて拭いてください。感電や損傷を防ぐため、余分な洗浄液は電子部品に近づけず、必ず完全に乾かすようにしてください。

**重要：**漂白剤、酸性洗剤、腐食性化学物質は使用しないでください。フレームの粉体塗装が弱くなったり、プラスチックカバーが変色したり、コンソールやスクリーンが破損したりします。強酸性の洗浄剤（pH4.0以下）や腐食性の薬品（pH11.5以上）の使用は避けてください。