

一般医療機器 類別: 歯科材料 09 歯科用研削材料 一般的名称: 歯科予防治療用ブラシ 35768000

販売名: スターブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本品はニッケルを含有しているため、ニッケルに対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある患者には使用しないこと。
- 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ULTRADENT JAPAN 株式会社
電話番号 0120-060-751

・製造業者

ウルトラデント プロダクツ インク
ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

* 【形状、構造及び原理等】

【原材料】 ナイロン、真鍮



【原理】

本品は歯の清掃と研磨に用いるブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用目的又は効果】

本品はブラシを備えた回転式歯科用器具で歯科医療有資格者が歯面の清掃及び研磨に用いる。レストア形成前や矯正ブラケット周囲の清掃に用いる。

【使用方法等】

使用方法(例)

1. スターブラシをハンドピースに取り付ける。
 2. スターブラシに十分な研磨用ペーストを付ける。
 3. スターブラシを歯全体に軽く押しつけて研磨する。
- なお、使用回転数は低速回転にて使用すること。

* (適用例)

・歯面清掃



・シーラント前の歯面清掃



・矯正用ブラケット周囲の清掃



【使用上の注意】

1. 本品のシャンク(スクリュー)部を確実に最後まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
2. 使用前に口腔外で予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
3. 使用に際してはスターブラシを歯面に当ててから回転させること。
なお、口腔外で回転させると研磨剤が飛び散ることがあるので、注意すること。
4. 使用に際しては無理な力を加えないこと。無理な力を加えると本品が破損したり、口腔内を傷つける恐れがある。
5. 使用に際しては保護メガネ等を使用すること。

【保管方法】

・直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、
外圧(物理的負荷)を受けないように保管すること。