

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- 本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



[原材料]

ポリプロピレン、ステンレススチール

[原理]

細いニードルを有したチップをシリンジの先端に取り付け、シリンジに圧をかけることによって、口腔内の適切な部位に適切な量の注入が可能となる。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内に注入するために用いる。フローアブルコンポジットレジン[®]の充填に適している。

【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を塗布する。

***【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから出ない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社
電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)