

類別: 器 50 開創又は開孔用器具
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用開口器 70949000

再使用禁止


販売名: アンブレラ

【禁忌・禁止】

- ・本品の成分に対して過敏症等の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状及び寸法]

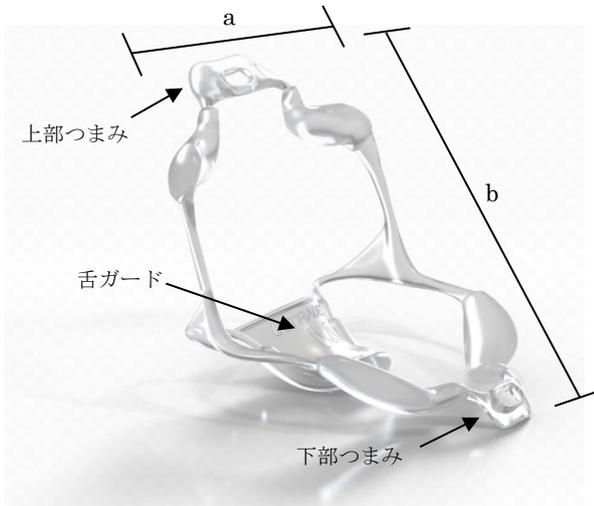

[寸法]

	M サイズ	L サイズ
a	76 mm	84 mm
b	113 mm	124 mm

[原理]

ばねのような力で頬を引いた状態を保持し、唇を押さえるクッションと舌を後方に押さえる舌ガードにより、開口状態を保持することができる。

[原材料]

- 熱可逆性エラストマー
- ポリエチレンランダムコポリマー
- オレフィン系エラストマー

【使用目的又は効果】

歯科治療中、患者の開口状態を保持する。

【使用方法等】

使用方法(例)

1. 口腔内に挿入する前に、本品の上部つまみの矢印が上を向いていることを確認し(図1)、上部つまみと下部つまみを同時につまむ(図2)。



図 1



図 2

2. 患者の舌尖(舌の先端)を口腔内で上(口蓋)に向かせる(図3)。



舌のうら側が見える

図 3

3. 上部つまみと下部つまみをつまんだまま、口の片方の頬側から本品を挿入する(図4)。




図 4

4. 上部つまみと下部つまみを使って、本品を口の中心に合わせる(図5)。



図 5

5. 舌が舌ガードの後ろに、違和感なく収まっていることを確認する。このとき、舌尖が舌ガードの下側にこないよう注意する(図6)。

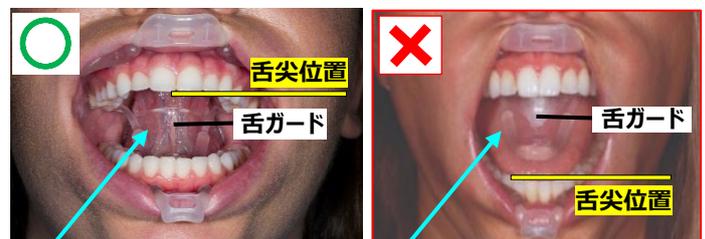

舌のうら側が見える。舌尖は上になるように装着する。

舌のおもて側は見えない。舌尖は下にならないように装着する。

図 6

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

- 1) 使用前に破損、ヒビ、キズ、バリ等がないか確認すること。これらがある場合は、使用しないこと。
- 2) 本品は単回使用である。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は高温・直射日光を避け、常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社
 電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク
 ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)