

類別:機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 一般的名称:洗浄針 70459000  
販売名:キャピラリーチップ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止


[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク  
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]

本品には、注出部内径によって以下の2種類がある。

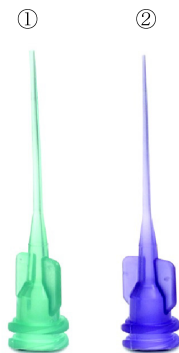

- ① キャピラリーチップ 0.019" : Φ0.48mm (緑)
- ② キャピラリーチップ 0.014" : Φ0.36mm (紫)

[原材料]

ポリプロピレン

[原理]

本品は、シリンジ等に接続して根管内の残留薬液の吸引に用いる器具である。

**【使用目的又は効果】**

本品は、刀先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管などの各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

**【使用方法等】**

[使用方法(例)]

- (1) 空のシリンジ又はバキュームアダプターの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (2) 口腔内に使用する前にエアの通りを確認する。
- (3) 口腔内に本品先端部を入れ、シリンジやバキュームアダプターの取扱説明書に従って吸引を行う。

\* **【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (3) スムーズに吸引されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
  - ・破損、折損
  - ・動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

常温保管

\* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
電話番号 0120-060-751