

再使用禁止

販売名: ブラックミニチップ

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- 本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、破損等の原因となるため]
- 再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]



[原理]

チップを取り付けた歯科材料のシリンジに圧力をかけることによって、口腔内の適切な部位に適切な量の注入、塗布が可能となる。

[原材料]

ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。高粘度の材料の使用や比較的多量の注入、塗布に適している。

**【使用方法等】**

使用方法(例)

1. シリンジのキャップをはずす。
2. シリンジの先端にチップを回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

**\* 【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合をテストすること。
- (3) 材料がスムーズにチップから出ない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は、以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合  
以下のような不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。
  - 破損、折損
  - 動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

常温保管

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)