

類別: 器 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般名称: 歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名: ブルーマイクロチップ

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、破損等の原因となるため]
- ・再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]



[原理]

細いニードルを有したチップを歯科材料のシリンジの先端に取り付け、シリンジに圧をかけることによって、口腔内の適切な部位に適切な量の注入、塗布が可能となる。

[原材料]

ポリプロピレン、ステンレススチール

**【使用目的又 効果】**

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。低粘度の材料の使用や比較的少量の注入、塗布に適している。

**【使用方法等】**

使用方法(例)

1. シリンジのキャップをはずす。
2. シリンジの先端にチップを回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

**\* 【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合をテストすること。
- (3) 材料がスムーズにチップから出ない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は、以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合  
以下のような不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。
  - ・破損、折損
  - ・動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

常温保管

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク  
ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)