

類別:器 50 開創又は開孔用機器  
一般医療機器 一般的名称:歯科用開口器 70949000

再使用禁止

**販売名:アイソブロック****【禁忌・禁止】**

- ・本品の成分に対して過敏症等の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

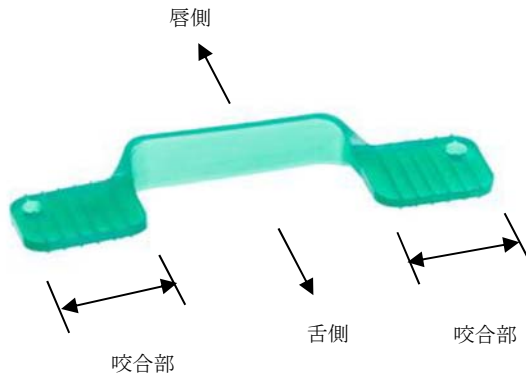
**【保管方法及び有効期間等】**

## [保管方法]

本品は高温・直射日光を避け、常温で保管すること。

**【形状、構造及び原理等】**

## [形状]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

## [製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

## [製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)

## [原理]

上下顎間の臼歯に挿入し咬合させることにより、開口状態を保持する。

## [原材料]

ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体レジン、着色材

**【使用目的又は効果】**

歯科治療中、患者の開口状態を保持する。

**【使用方法等】**

## 使用方法 (例)

1. 本品を上下顎間の歯列に合わせて挿入し、滑り止め加工が施されている左右一対の咬合部を臼歯で噛ませる。



2. 開口状態の保持が確認されたら治療を開始する。

**【使用上の注意】**

## 1. 使用上の注意

- 1) 使用前に破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用しないこと。
- 2) 本品は単回使用である。