

類別:機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]



[原材料]

ポリプロピレン、サーモプラスチックエラストマー

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

**【使用方法等】**

[使用方法(例)]

- (1) 各材料の取扱説明書に従って、本品に材料を必要量充填する。
- (2) 本品の先端に、適切なチップを回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) チップから空気が抜け、材料が注出されるまでプランジャーを押し、材料の流出性をテストする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って口腔内に材料を注入する。

**\*【使用上の注意】**

**1. 使用注意**

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

**2. 不具合・有害事象**

- 1) 重大な不具合
  - ・ 破損、折損
  - ・ 動作不良

**\*【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

常温保管

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)