

類別:機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 一般的名称:洗浄針 70459000

再使用禁止

販売名:SST チップ

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・ 本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・ 再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]



[原材料]

ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

本品は、刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

**【使用方法等】**

[使用方法(例)]

- (1) 空のシリンジやバキュームアダプターの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (2) 口腔内に使用する前にエア어의通りを確認する。
- (3) 口腔内に本品先端部を入れ、シリンジやバキュームアダプターの取扱説明書に従って吸引を行う。

**\*【使用上の注意】**

**1. 使用注意**

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、エア어의通りを確認すること。
- (3) スムーズに吸引されない場合は、チップを交換すること。

**2. 不具合・有害事象**

- 1) 重大な不具合
  - ・ 破損、折損
  - ・ 動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

常温保管

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)