




BED CANE

Notandaleiðbeiningar

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is

Handfang á rúm Bed Cane NC94273

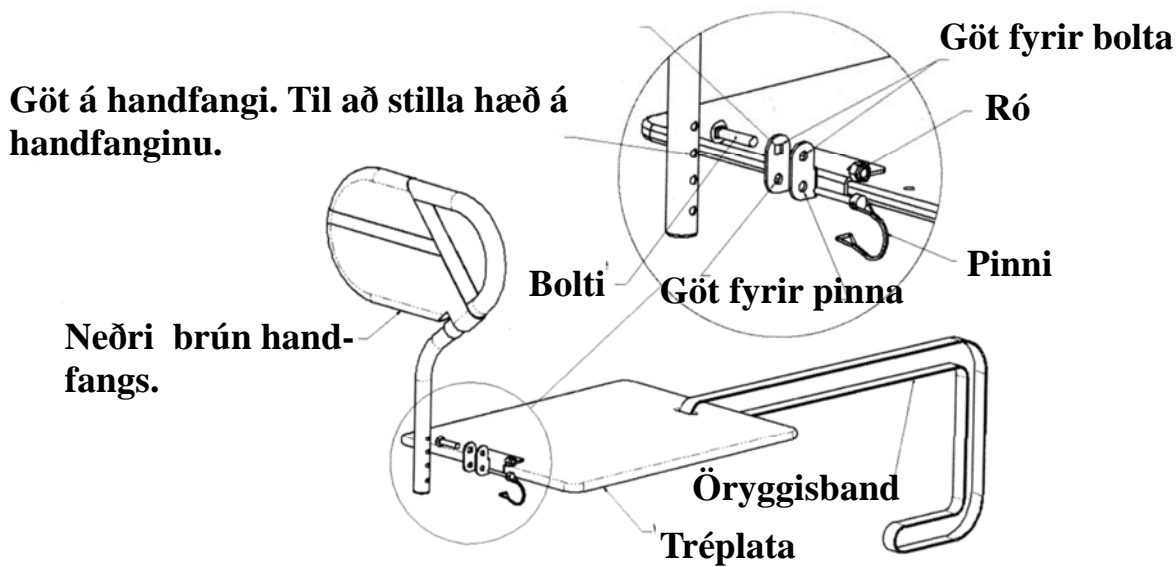

1. Hægt er að velja hæðina á handfanginu eftir götunum á rörinu, miðið við þykktina á dýnunni.
2. Stillið hæðina á handfanginu þannig að neðri brún handfangsins sé ekki fyrir ofan dýnuna
3. Boltinn á að fara í efri götin en pinninn í neðri götin þegar handfangið er sett á tréplötuna. Festið boltann vel svo handfangið sé stöðugt.
4. Tréplatan fer á milli rúmdýnunnar og boxdýnunnar, dýnan þarf alveg að hylja plötuna.
5. Festið öryggisbandið í rammann á rúminu, sjá mynd.

