

ARTHRITIS ROLLATOR TIGER
Art. 312201, 312202, 312211


Notendahandbók



Göngugrind sem hentar
innan hús fyrir
liðagigtarsjúkling




Hæðarstillanleg
framhandleggs-
stuðningur

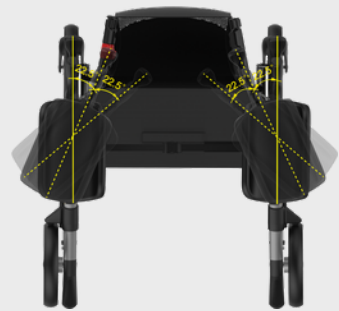

Snúanlegar framhandleggsstoðir

Opinn/læsanlegur
aukabúnaður

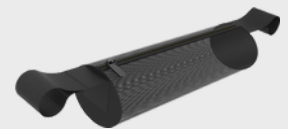

Mobilex A/S Grønlandsvej 5, 8660
Skanderborg, Denmark,

www.mobilex.dk

Rekstaravörur Ehf
Réttarháls 2 110 Reykjavík
S: 520-6666 netfang: sala@rv.is

1. Inngangur Þakka þér fyrir að kaupa hágæða Mobilex vöru. Þessar notkunarleiðbeiningar innihalda lýsingu og mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins.

Það er ætlað að hjálpa þér að nota vöruna á réttan hátt og örugglega. Það er mjög mikilvægt að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað. Skoðaðu vel öryggisleiðbeiningarnar og fylgdu þeim. Mobilex er stöðugt að reyna að bæta og uppfæra vörur sínar. Þess vegna áskiljum við okkur rétt til að breyta forskriftum og tækniupplýsingum vörunnar. Mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins til að auðvelda notkun á réttan hátt.

Fyrirhuguð notkun tækisins.

Þessi vara er lækningatæki sem hefur verið hannað til að auka hreyfigetu einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með að standa og labba. Göngugrindin gerir þeim einstaklingum kleyft að endurheimta getu til að framkvæma daglegar athafnir. Göngugrindin er mjög hentug fyrir einstaklinga sem þurfa stöðugan stuðning við gang vegna ýmissa ástæðna. Göngugrindina á aðeins að ota sem stuðning við að standa upp og ganga. Öll önnur notkun er bönnuð.

Vísbendingar

Göngugrindin er lækningatæki hannað til að aðstoða fólk með takmarkanir á virkni. Ábendingar um noktun eru sjúkdómar sem valda hreyfihömlum og fötlun, hindra sjálfstætt sitjandi, standandi og gangandi. Þess vegna er þörf fyrir auknum stöðugum stuðningi við framkvæmd ýmissa athafna daglegs lífs. Þetta tengist ekki ákveðinni klíniskri mynd og ábendingar fyrir notkun göngugrindar ráðast af einstaklingsbundnu mati á heilsu hugsanlegs notanda grindarinnar.

Frábendingar

Göngugrindur eru mikilvægar fyrir einstaklinga sem geta ekki haldið jafnvægi í standandi stöðu. Ekki má nota tækið ef notandinn á í vandræðum með skynjun á umhverfi sínu. Frábendingar fyrir notkun göngugrindar geta tengst klíniskri mynd og eru háðar einstaklingsbundnu mati á heilsufari notendans. Matið verður að fara fram með aðstoða sérfræðilæknis eða sjúkraþjálfara.

Notkunarsvæði

Vöruna er hægt að nota í heimahjúkrun, heilsu og hjúkrunarheimili og á sjúkrahúsum.

Læknisatvik og óæskileg atvik.

ef upp koma óæskileg atvik sem tengjast tækinu, vinsamlegast hafðu samband við söluaðila eða framleiðanda.

Rekstrarvörur
Réttarhálsi 2
110 rvk

Sími
email

5206666
sala@rv.is

Öryggiskröfur

- Gakktu úr skugga um að þessi handbók hafi verið lesin af öllum sem nota tækið.
- Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjón og /eða meiðslum sem hlýst af því að ekki er fylgt notkunarleiðbeiningum.
- Notaðu vöruna einungis í gallalausum ástandi.
- Ef gallar eða villur finnast verður þú tafarlaust að hætta að nota tækið og hafa samband við söluaðila
- Fylgdu öllum ráðleggingum og viðvörðunum framleiðanda
- Vertu meðvituð um upplýsingarnar á vörumerkinu
- Notaðu vöruna aðeins í þeim tilgangi sem lýst er.
- Ekki klifra á vörunni.
- Forðastu að gera breytingar á tækinu nema þú hafir samþykki framleiðanda (skriflegt)
- Tækið og pokann má ekki hlaða með meiri þyngd en tilgreint er í tæknigögnum.
- Öll hjól verða að vera í snertingu við gólfið allan tímann á meðan á notkun stendur. Þetta mun tryggja að göngugrindin sé í réttu jafnvægi.
- Farðu varlega þegar þú setur saman eða stillir hluta tækisins.
- Athugaðu hvort að bremsurnar virki fyrir notkun. Notaðu göngugrindina aðeins þegar hann hefur verið tekin upp að fullu og læsibúnaðurhefur verið virkjaður.
- Aðeins má nota sætið þegar bremsunum hefur verið læst. Báðum bremsunum ætti alltaf að læsa samtímis. Óheimilt er að bera mann eða aðra hlut á sætinu á meðan göngugrindin er í notkun. Stöðuhemlar verða alltaf að vera virkir þegar göngugrindin er ekki í notkun.

Varahlutir sem fylgja

Tækið er afhent í öskju. Innihald pakkans er:

- ✓ 1 Göngugrindin samanbrotin ; sæti og innkaupapoki
- ✓ 1 Hækjuhaldari
- ✓ 1 Notendahandbók

Bráðabirgðaathugun


Berðu saman innihald kassans við listann hér að ofan. Ef þú uppgötvar á þessu stigi að hluti vantar eða er skemmdur hafðu strax samband við birgjann þinn.

3. Vörulýsing

Göngugrindin er með húðaða grind og 4 hjól. Létti ramminn gerir það auðvelt að brjóta grindina saman og býður upp á auðveldari geymslu og flutning. Göngugrindin er auðveld í notkun og er stöðug. Hæð þrýstihandfanganna er stillanleg. Göngugrindin er afhent með uppsettu sæti, hækjuhaldara og innkaupapoka. Bakstuðningur og handföngin ættu að vera komin á við afhendingu.

Göngugrindin samanstendur af eftirfarandi hlutum:

1. Stuðningur fyrir handleggi
2. Bremsuhandfang
3. Sæti
4. Sætisrör
5. Stjórnuhnappur fyrir hæðarstillingu handfanga
6. Bremsur
7. Afturhjól
8. Þrýsti handföng
9. Bremsuhandfang
10. Ól á milli handfanga
11. Fellanleg ól
12. Læsing
13. Innkaupapoki
14. Snúningshjól að framan.

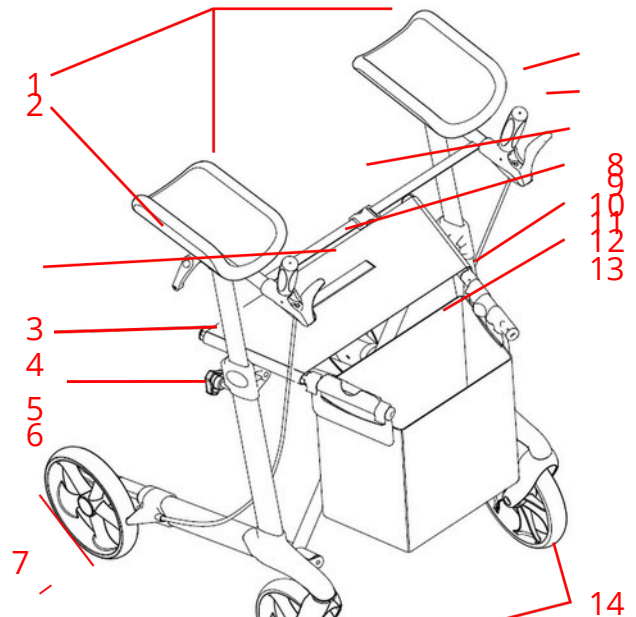

Lýsing á samsetningu Til að setja göngugrindina saman skaltu festa framhandleggsstöðirnar tvær með því að fjarlægja stöðugleikabandið fyrir framhandleggsstöðirnar, setja framhandleggsstöðirnar í gráu rörin og aftur- festa stöðugleikabandið við framhandleggsstöðirnar með skrufunum tveimur. Festu bremsustangirnar tvær með því að stinga slöngunni inn í framarmsstuðningana og herða handfangsstöngina til að stilla lengd stangarinnar.

Aðgerðalýsing

Brjóta saman/ setja göngugrindina upp

Til að brjóta grindina upp ýttu á felliláshnappinn og ýttu niður á sætisrörin þar til grindin sleppir og smellur sem gefur til kynna ða göngugrindin sé læst í uppsettri stöðu. Til að brjóta göngugrindina saman skaltu draga upp fellibandið og ljúktu við að brjóta grindina saman með því að ýta sætisrörum saman þar til felliláshnappurinn smellur.

Viðvörðun! Sætisrör verða að smella vel á sinni stað á báðum hliðum þegar rúllarinn er settur upp. Allir hlutar verða að vera þéttir og læstir áður en hægt er að nota göngugrindina. Ef þessum viðvörðunum er ekki fylgt gæti orðið slys.

Hæðarstilling á handleggsstuðningi

Til að stilla hæð handleggsstuðningsins skaltu fyrst losa rammafestingarólina, losa hæðarstillinguna (stjórnuhnappurinn) og renndu stuðningnum í þá stillingu sem þú vilt. Herðið á stjórnuhnappinum og endurtakið fyrir hinn stuðninginn. Eftir að báðir stuðningar hafa verið stilltir, festu rammansfestingarólina aftur.

Athugið: báðar handleggsstuðningarnir ættu alltaf að vera í sömu hæð.

Stilling fyrir handleggsstuðning (týpa 312202)

Til að stilla láréttan snúning handleggstuðningsins skaltu losa stjórnuhnappinn undir stuðningshandfanginu, stilltu snúninginn og hertu aftur stjórnuhnappinn. Endurtaktu fyrir hinn stuðninginn. Stilltu stöðugleikaólina ef hún verður laus eða of stutt. Þrýstið handfangsdýpti og hallstillingu. Losaðu handfangið og renndu rörinu á handfanginu til að stilla dýptina eða snúðu því til að halla handfanginu, hertu svo aftur á festingunni.

Bremsur


Hægt er að virkja bremsurnar smám saman með því að draga bremsustangirnar aftur með aukningu afls. Bremsur eru að fullu virkjaðar þegar bremsuhandfangið snertir handföngin og göngugrindin er alveg stöðvuð.

Til að hætta að bremsa slepptu bremsuhandfanginu. Göngugrindin er einnig búin handbremsuaðgerð. til að virkja handbremsuna ýttu á hemlahandfangið. til að aftengja handbremsuna skaltu draga bremsustangirnar aftur í hlutlausu stöðu.

Viðvörðun! virkjaðu alltaf handbremsuna þegar göngugrindin er ekki notuð! þegar göngugrindin er á óstöðugu yfirborði þarf að nota bremsur.

viðvörðun ! Bremsurnar verða alltaf að vera í læstri stöðu þegar göngugrindin er ekki í notkun. Notaðu aldrei sætið ef bremsur eru ekki læstar! Þegar þú situr skaltu aldrei halla þér aftur á bak. Mælt er með því að sitja aðeins á fremri hluta sætis. Ekki setjast á töskuna.

Viðvörðun! Áður en sest er á göngugrindina verður að losa rammafestingarólina. Þegar göngugrindin er notuð til að ganga með þarf alltaf að passa stillinguna á göngugrindinni.

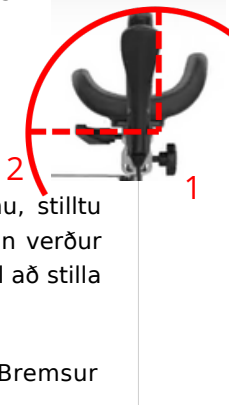

Aukabúnaður

Tækið er hægt að útbúa með eftirfarandi aukabúnaði (ekki hluti af staðalbúnaði)




- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ✓ Sæti | ✓ Lokaður poki með rennilás | ✓ Rauður/blár bjalla |
| ✓ hraðaminnkandi tæki | ✓ Opin netapoki | ✓ LED ljós hvít/rauð |
| ✓ Bakki | ✓ Netapoki með rennilás | ✓ Súrefniskútahaldari |

4. Tæknilegar upplýsingar

Arthritis Rollator Tiger	Standard Art. 312201, 312211	With rotatable armrests Art. 312202
Litur	grár, rauður	brúnn
Hæð á handföngunum (stillanleg)	150 - 200 cm	
Hæð notenda	62 cm	
Sætishæð	62 / 22,5 cm	
Breidd samanbrotin/opin	46 cm	
Sætisbreidd /breidd milli handfanga	66 cm	
Lengd	9,5 kg	
Þyngd	150 kg / 5 kg	
Hámarksþyngd / pokaburðarþol	2 læsanleg dekk	
Bremsur	200 x 35 mm	
Dekkjarstærð(fram og afturdekk)		

Product label

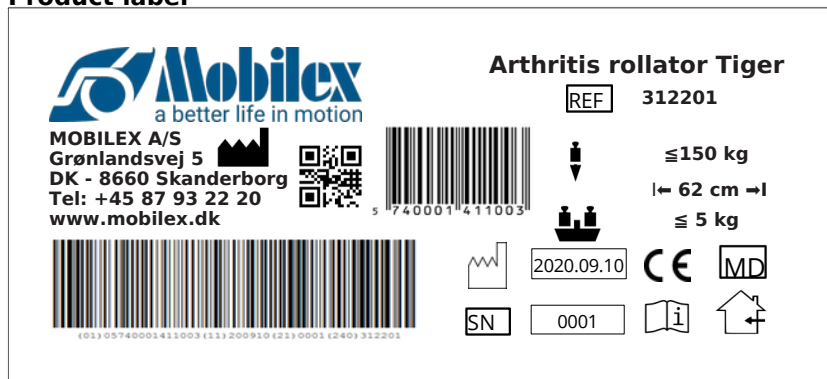

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	Only to be used indoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device

Meaning of the icons

Example of the product label

5. Umhirða og viðhald venjuleg óhreinindi má fjarlægja með venjulegum hreinsiefnum og svampi eða mjúkri tusku. Athugaðu tiltekna vöruupplýsingar og notaðu aðeins hreinsiefni sem henta til hreinsunar. Til sóthreinsunar skal aðeins nota sóthreinsiefni sem eru vottuð til notkunar á lækningatækjum.

Hjól má þrifa með heitu vatni með mildu hreinsiefni. Eftir hreinsun ætti hjólalegur að vera smurðar með olíu reglulega eða þegar hjólin bryja að ískra.

Þrátt fyrir trausta byggingu og notkun geta komið slit. Það er því mælt með að skoða vöruna með reglulegu millibili.

Við mælum með :

- ✓ Þrif og sóthreinsun vörunnar
- ✓ Skoða grindina með tilliti til beygla, skemmda, slit/tæringu
- ✓ Athugaðu slithluti og skiptu um þá ef þörf er
- ✓ Almenn endurspenning á íhlutum

Ráðlagður endingardagur: Venjulega 10 ár fer eftir notkun.

Geymsla: Mælum með geymslu á þurrum stað með hitastigi við og yfir 0°

Flutningur

Mælt er með því að brjóta tækið saman við flutning. Tækið ætti að vera flutt í stöðugu og öruggri leið án hættu á skyndilegum eða hættulegum hreyfingum á meðan það er flutt.

Endurnotkun

Vægan er hentug til endurnotkunar. Áður en nýr notandi tekur við vörunni þarf að athuga tækið með tilliti til stillinga.

6. Algengustu vandamál og lausnir

Vandamál	Mögulegar ástæður	Lausnir
Göngugrindin er stíf og erfið í notkun	Skítur á hjólum	Fjarlægðu skítinn
Bremsurnar virka ekki eða virka	Bremsurnar notaðar eða ónýtar	Lagaðu bremsurnar eða skiptu um bremsur
Sætið passar ekki í grindina þegar grindin er samanbrotin.	Læsibúnaðurinn er rangur eða gallaður	Athugaðu hvort að læsibúnaðurinn sé í réttri stöðu, skiptu um búnaðinn ef þörf er á.
Bakbeltið og grindin nær ekki fyrir hvert annað	bakbeltið og rammin mynda stöðugleika þegar þau eru læst saman	Læstu bakbeltinu og festingarólinni saman áður en rúlluvélin er tekin í notkun.

7. Förgun vörunnar: Ekki má farga vörunni með heimilissorpi og verður að koma henni á endurvinnslustöð.

8. Ábyrgðarskilmálar

Mobilex veitir 2 ára ábyrgð á tjóni sem stafar af mistökum í framleiðslu eða efnisvillum. Ábyrgðin gildir ekki með ófyrirséðri viðgerð eða notkun vörunnar. Hlutar sem verða fyrir eðlilegu sliti falla ekki undir ábyrgð, nema slit sé af völdum framleiðslugalla. Ef vörubreytingar eru gerðar án skriflegs samþykkis framleiðanda ef það er gert þá fellur CE-merkingin og vöruábyrgð úr gildi. Verði vörutjón sem falla undir þessa ábyrgð, vinsamlega látið söluaðila eða Mobilex vita strax. Ábyrgðin nær ekki til flutningskostnaðar og leiða ekki til bóta vegna líkamstjóns eða ónotunar vörunnar meðan á viðgerð stendur. Ábyrgðin nær ekki til skemmdavegna þess að notendahandbókinni er ekki fylgt.

9. Samræmisýfirlýsing

Tækið hefur staðist samræmismat í samræmi við reglugerð ESB: MDR 2017/745 varðandi lækningatæki og er CE merkt. Samræmisýfirlýsing hefur verið gefin út fyrir tækið og fæst á :

[mobilex.dk/medias/2021-08/ce_artritis_rollator_tiger_312201_312211_8416.pdf](https://www.mobilex.dk/medias/2021-08/ce_artritis_rollator_tiger_312201_312211_8416.pdf)

eða með því að skanna QR kóðann hér til hægri.

