

# PROBed

Leiðbeiningar

# Framleiðandi

## Proton Caretec AB


---

Armaturgatan  
SE-331 21 VÄRNAMO

Phone	Switchboard	0370-69 26 60
	Customer Service	0370-69 26 61
	Spar parts	0370-69 26 77
Fax		0370-69 26 70
E-post		<a href="mailto:caretec@proton.se">caretec@proton.se</a>
www		<a href="http://www.protoncaretec.se">www.protoncaretec.se</a>

Certified in accordance with ISO9001:2000 and 14001:1996

# Vörulýsing

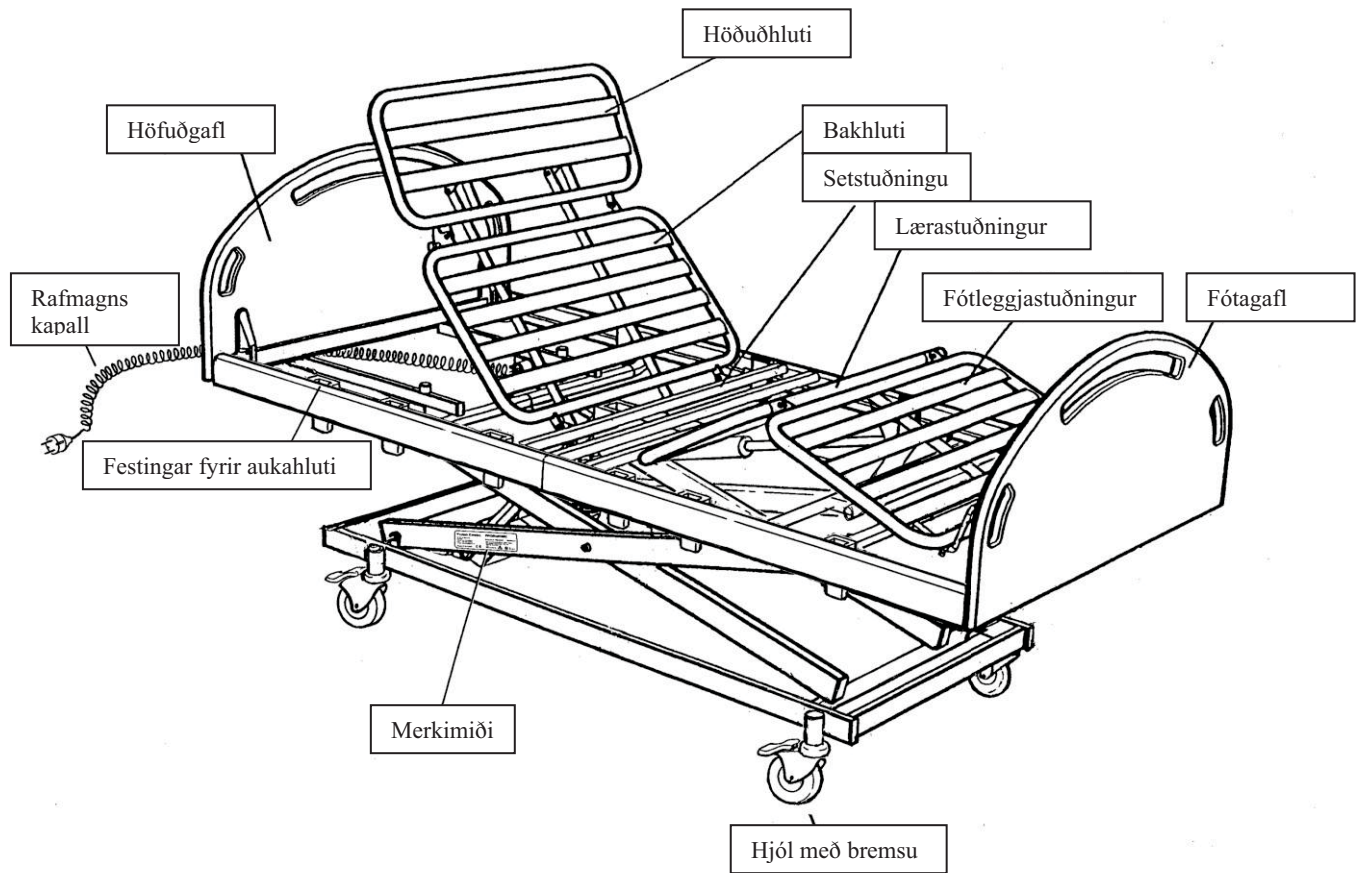

# Merking



## Upplýsingar

Framleiðsluheiti


Framleiðsludagur  
Ár/mánuður/dagur



**Proton Caretec PROBed** 2004/06/16

SE-331 21 Varnamo  
Sweden  
Phone: +46 370 692660  
Fax: +46 370 692670  
e-mail: caretec@proton.se

Cust.ord.nr: 700000 /27

Safe working load=200kg 230V~ / 50Hz  
Max patient weight=165kg Max 1A  
10% max 6 min / tim

Made in Sweden 

IP54  
40dB (ISO3746)   typ B

Hámarks rafmagnsnotkun

Lotur  
IP-Flokkun  
Hljóðstyrkur

Aðvörðun: Lesið leiðbeiningar áður en rúmið er tekið í notkun

Flokkur II  
Tvöföld einangrun

Ekki er einangrun milli sjúklings og jarðar og málmgrindar


Framleiðsluheit



**Proton Caretec PROBed/HMC**

SE-331 21 Varnamo  
Sweden  
Phone: +46 370 692660  
Fax: +46 370 692670  
e-mail: caretec@proton.se

Cust.ord.nr: 700000 /16 2004/06/16

Safe working load=200kg 230V~ / 50Hz  
Max patient weight=165kg Max 1A  
10% max 6min / tim


Made in Sweden 

IP54  
40dB (ISO3746)   typ B


# Uppsetning

Ef taka á rúmið í tvo hluta, lyftuhluta og leguflöt  
vísun við í kaflana: “Hvernig á að taka rúmið í  
sundur” og “Hvernig á að setja rúmið saman”

**1**

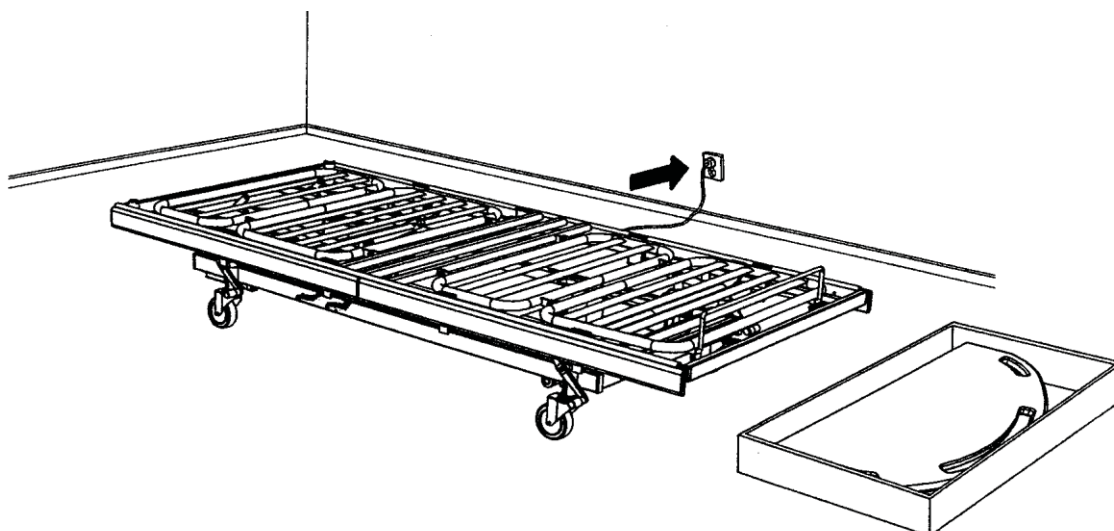

**2**

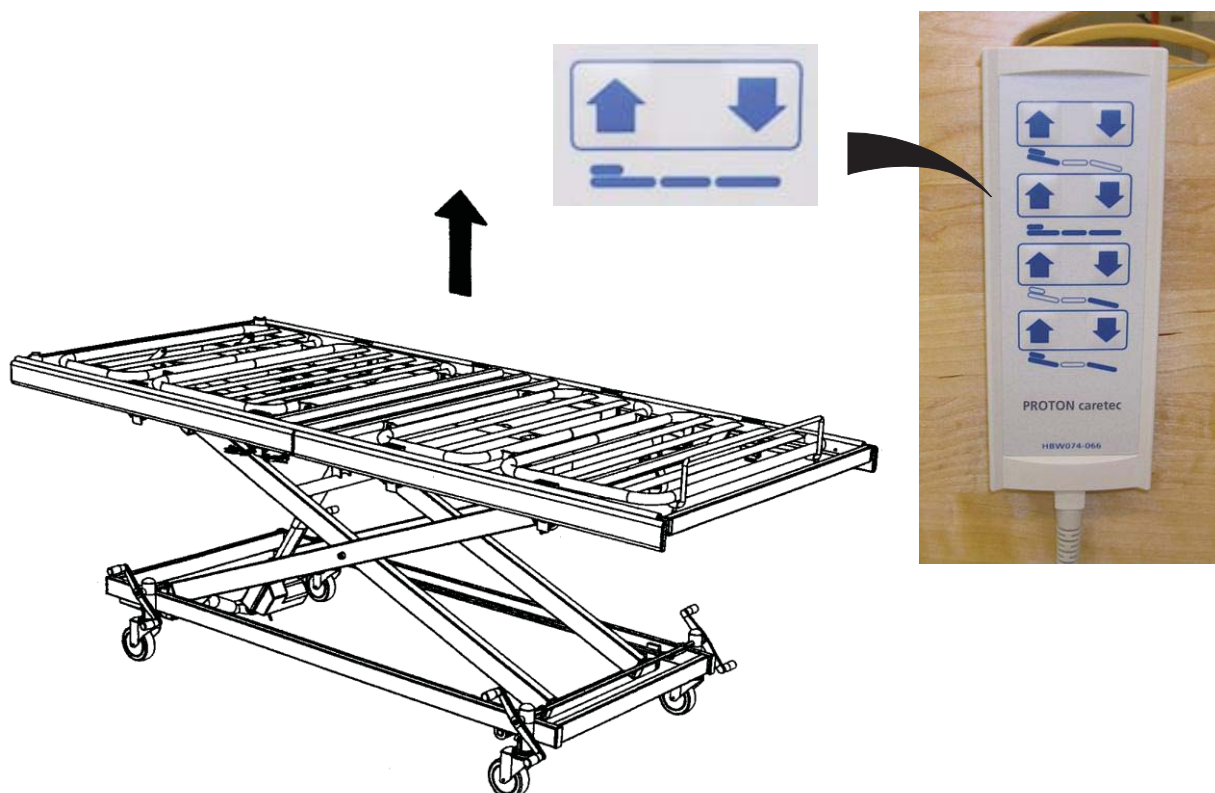

# Hvernig á að festa gafla

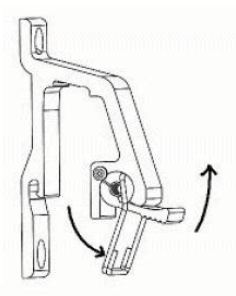


Bild 1.

1. Höfuðgaflinn er með tveimur litlum hjólum sem koma í veg fyrir að gaflinn nuddist við vegg þegar rúmið er hækkað og lækkað.



Bild 2

2. Setjið gaflana á höfuð og fóthlutann á rúminu, sjá mynd 2.


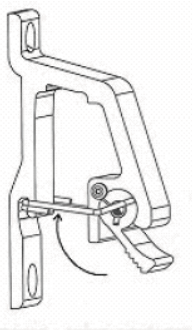


Bild 3.

3. Gaflarnir koma með tveimur gerðum af festingum, annars vegar smellufestingu, sjá mynd 3. Hins vegar vinkill sem skrúfast í gegnum gaflinn.

# Hvernig á að ganga frá hliðargrindum

## Samsetning viðargafla og inngreiptra hliðargrinda

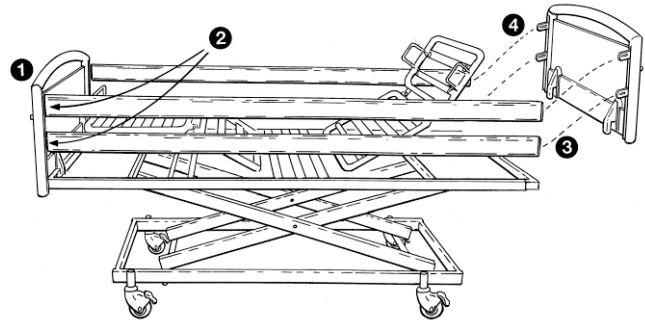

### SOLIDE

- 1 Festið gaflana á rúmið
- 2 Losið splitti við fóthlutann og lengið leguflötinn
- 3 Þrýstið hliðargrindunum upp á plasteyrun á höfuðgaflinum
- 4 Þrýstið hliðargrindunum upp á plasteyrun á fótagaflinum og ýtið leguflötinum samann og læsið splittunum




---

### TUBE



- 1 Festið gaflana á rúmið
- 2 Setjið raufarnar á hliðargrindunum upp á plasteyrun á göflunum
- 3 Skrúfið hliðargrindurnar fastar með meðfylgjandi skrúfum.
- 4 Gætið þess að herða ekki of mikið því þá verða hliðargrindurnar of stífar

# Höðuðlyfta-notkun

## Aftenging

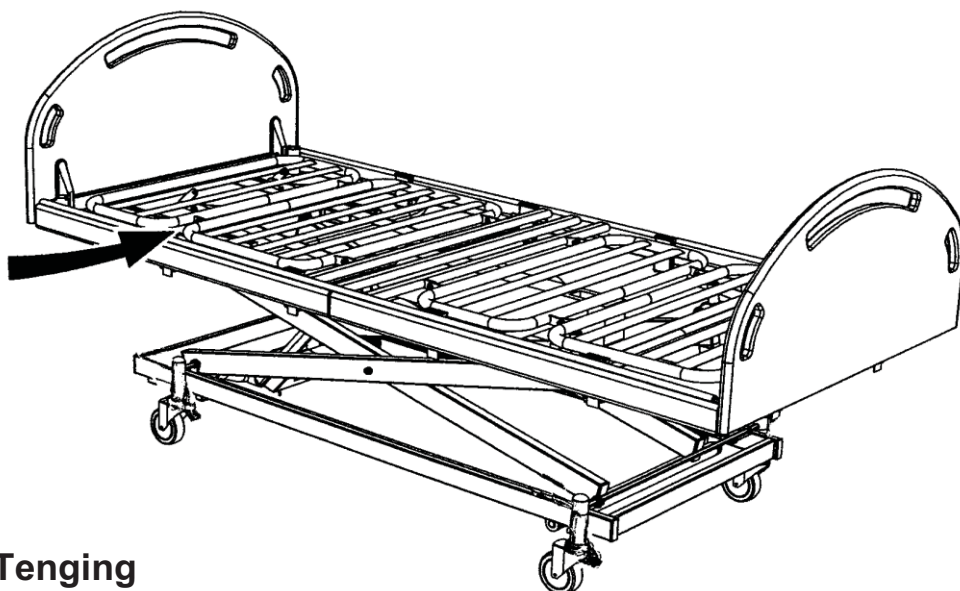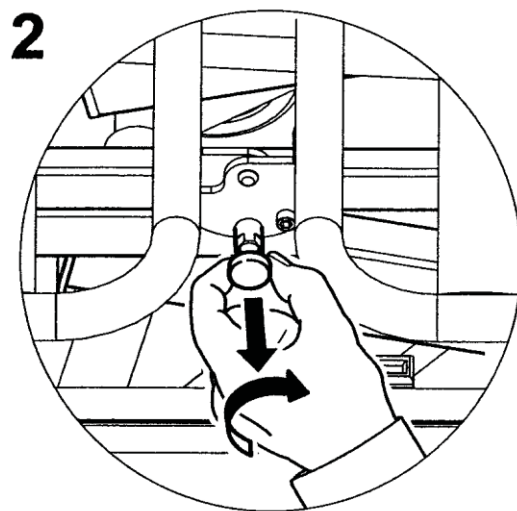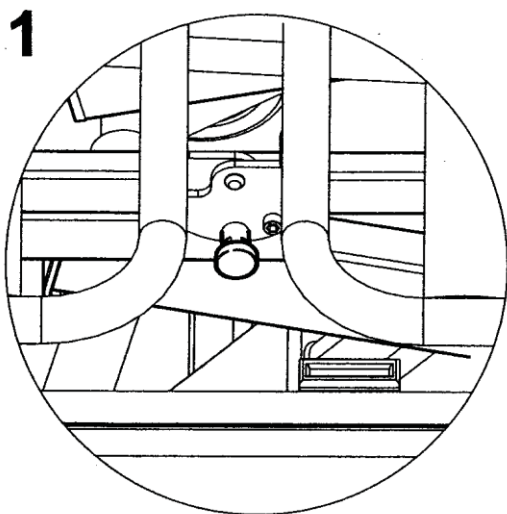

## Tenging

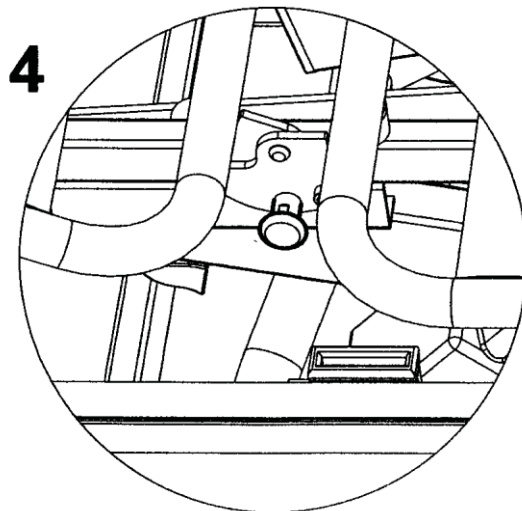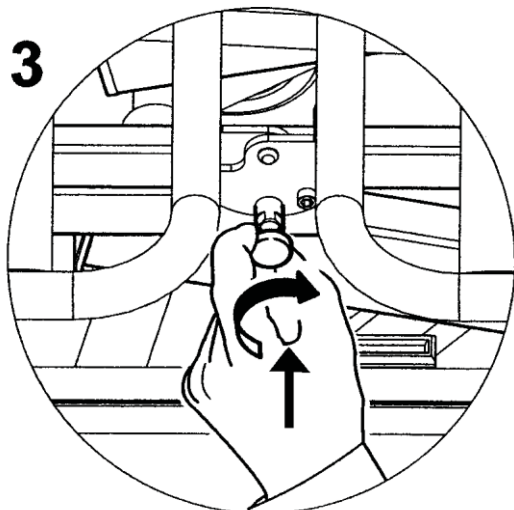




# Aukahlutir

Hvernig á að festa /losa:


- Stuðningshandföng
- Rúmgálga

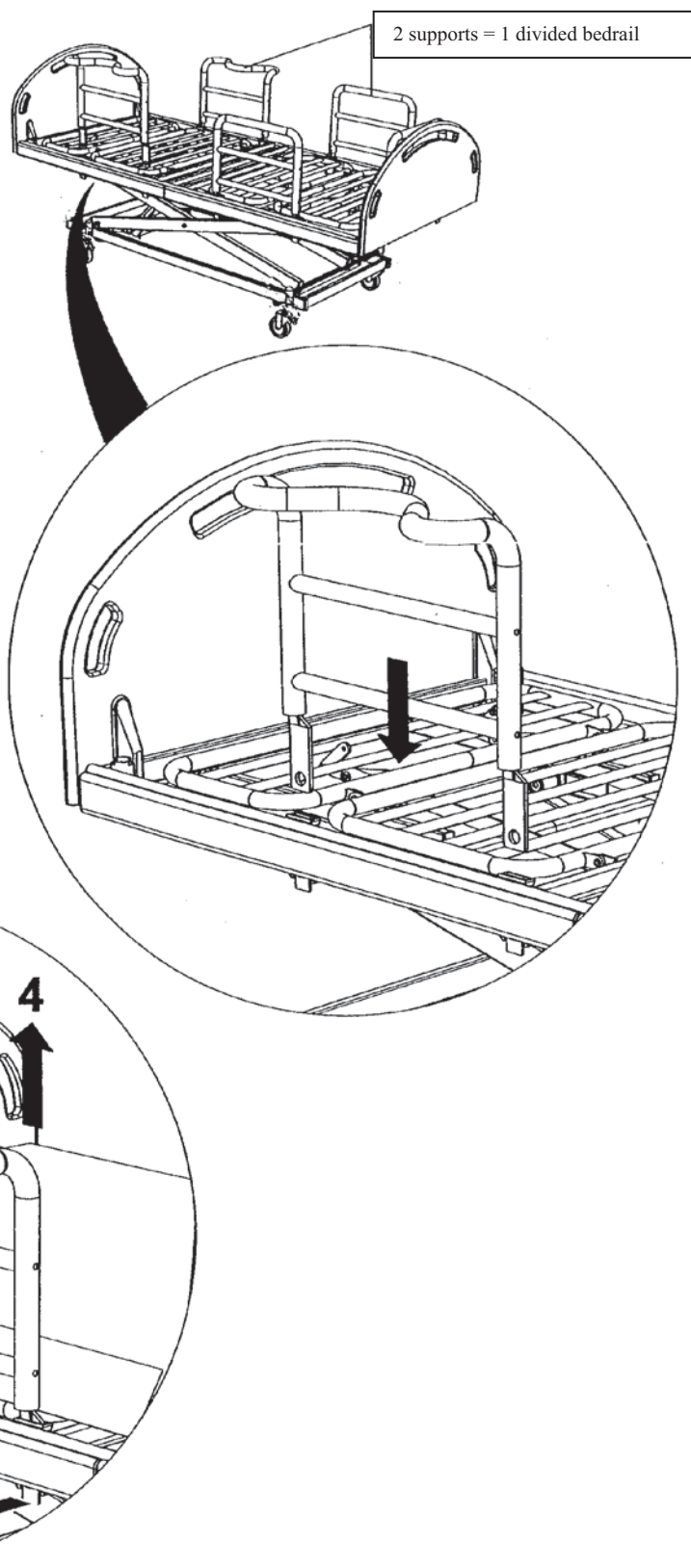



# Hvernig á að festa rúmgálga

## Rúmgálgi




Setjið gálgan í gatið við höfuðhlutan þannig að hann sé yfir rúminu, eins og sýnt er á myndinni.

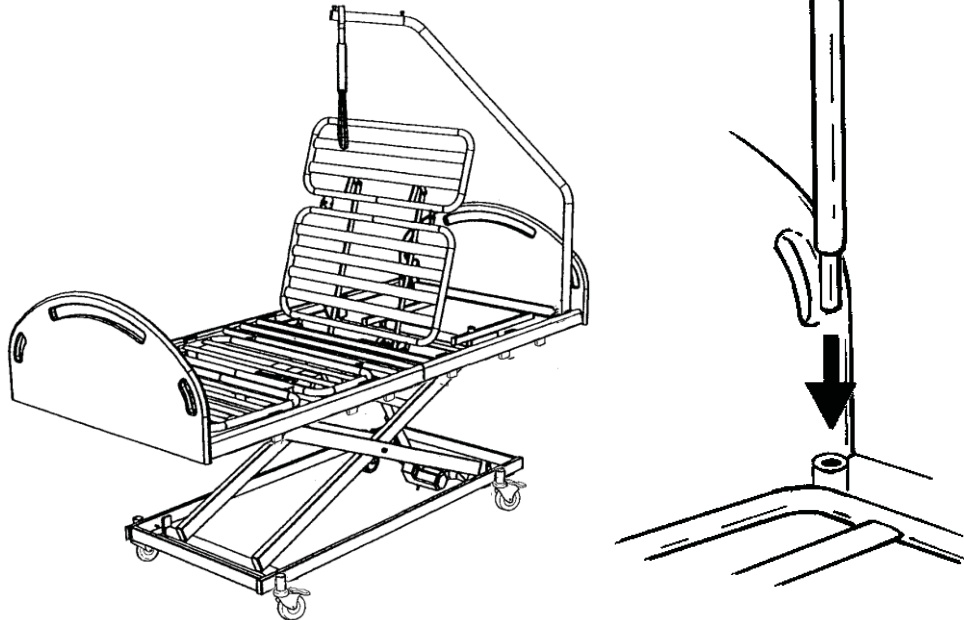


# Bak/Höfuðhluti

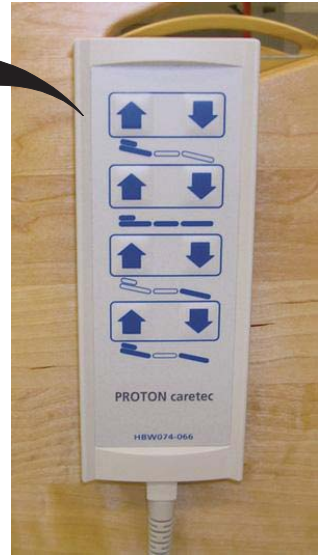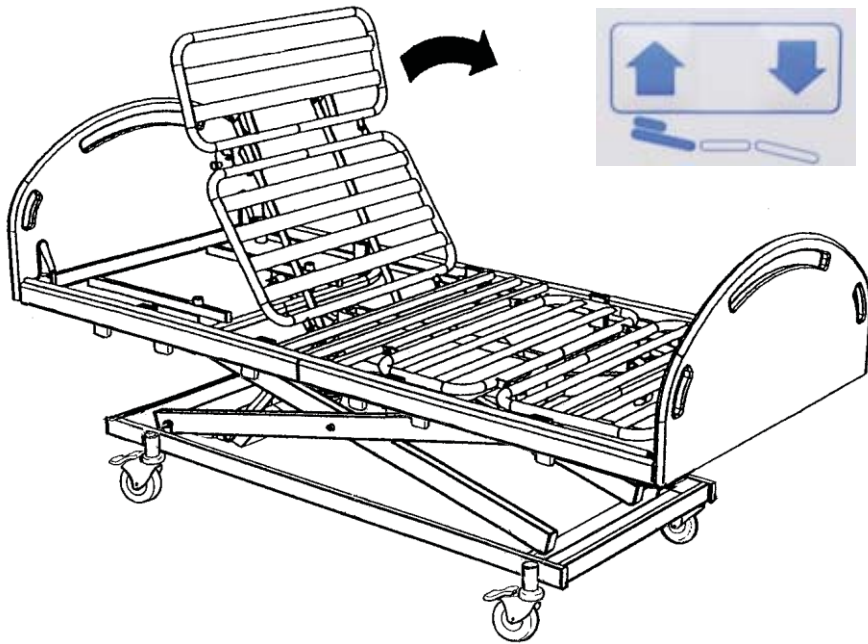

# Fóthluti

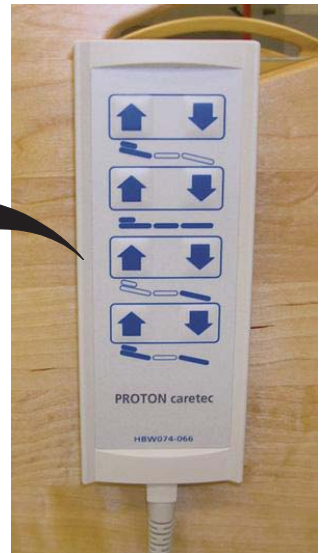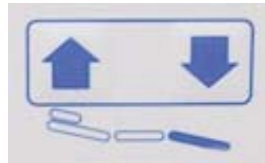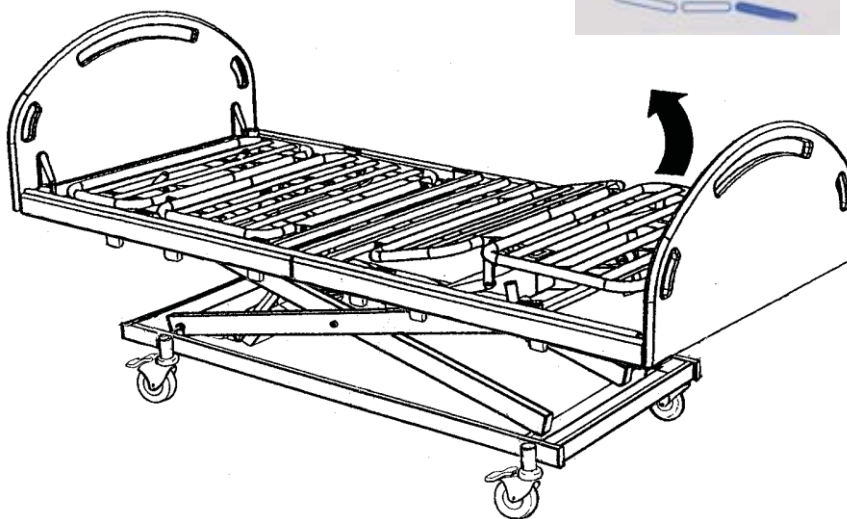


# Stilling á bak og fóthluta samtímis

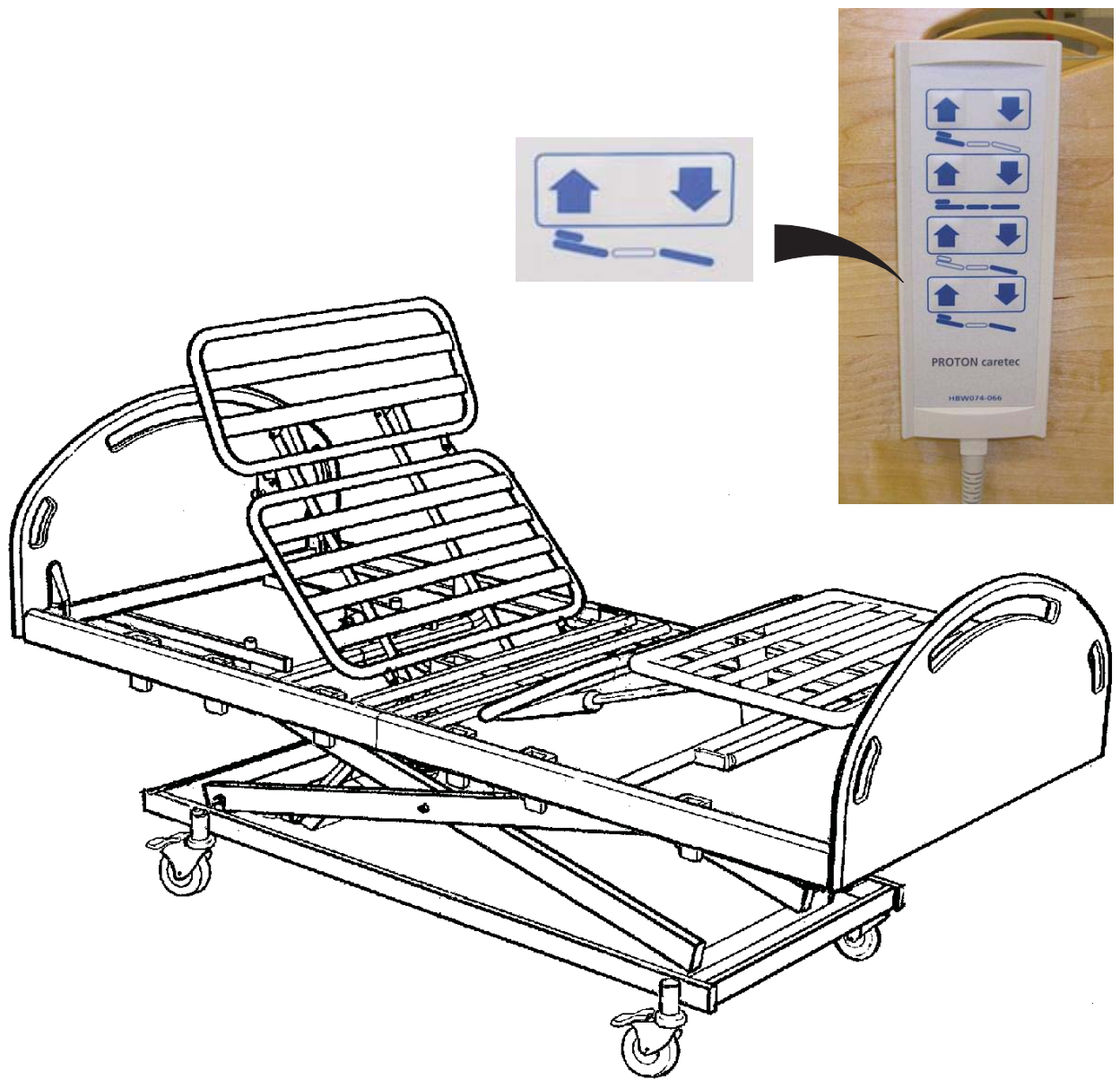

# Hvernig á að fella hliðargrindur

- 1 Lyftið efri langhliðinni aðeins upp.
- 2 Þrýstu á hnappinn sem er utan á göflunum.
- 3 Láttu hliðina síga niður.

**Endurtaktu aðgerðina hinum megin.**

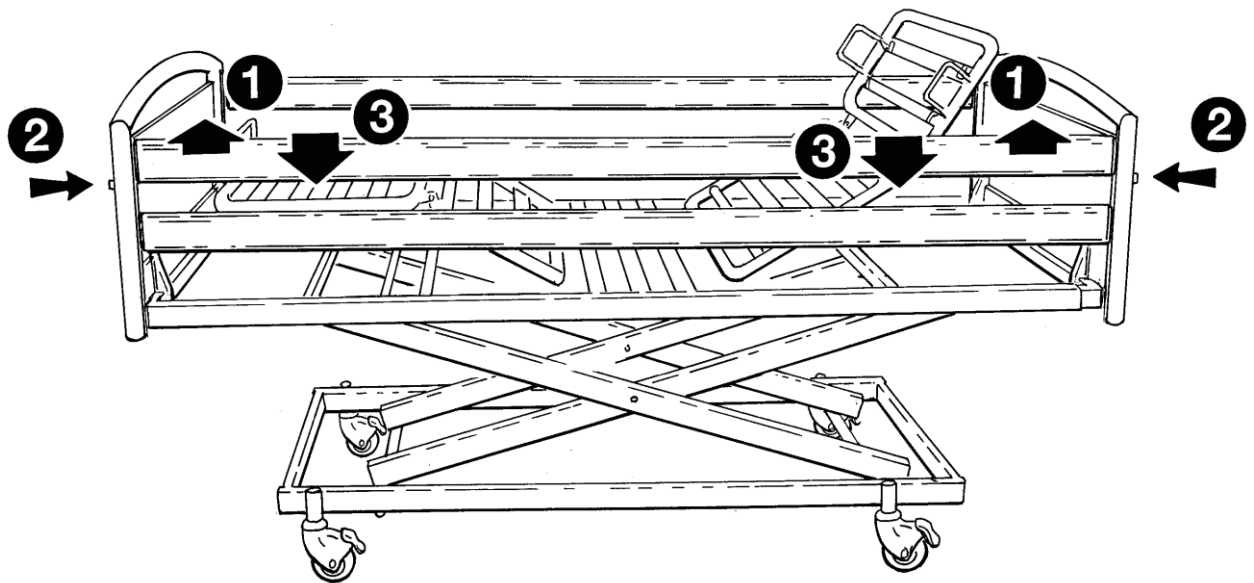

# Bremsur




Hafið rúmið alltaf í bremsu þegar það er í notkun.


## Samlæstar bremsur

---


Rauður pedali: Hjólin læst

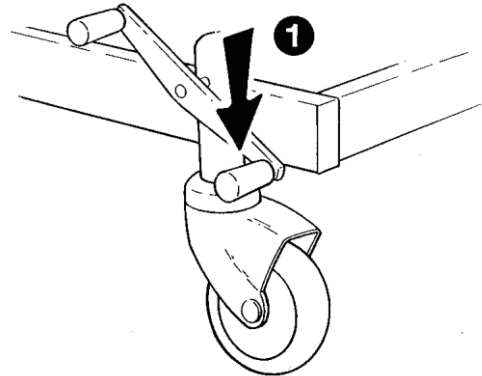





Grænn pedali: Hjólin laus,  
Eitt hjól læst í akstursstefnu  
til að auðvelda akstur

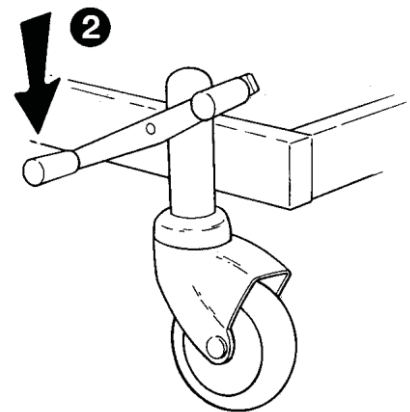

Miðjustaða: Hjólin laus

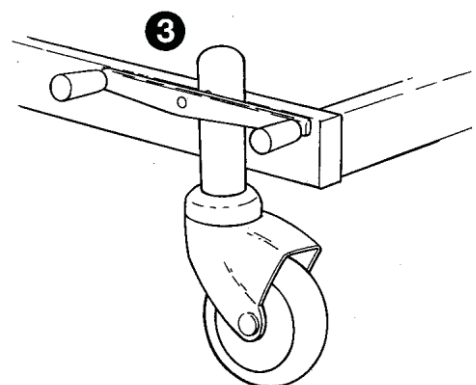

Hvernig á að taka rúmið í sundur.

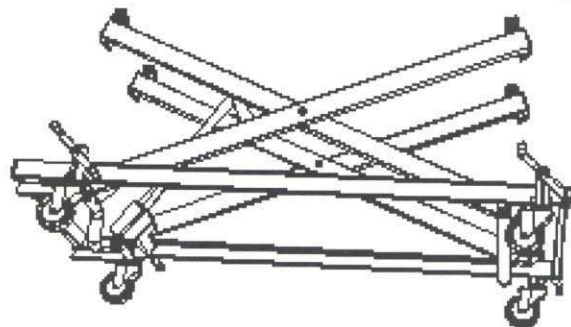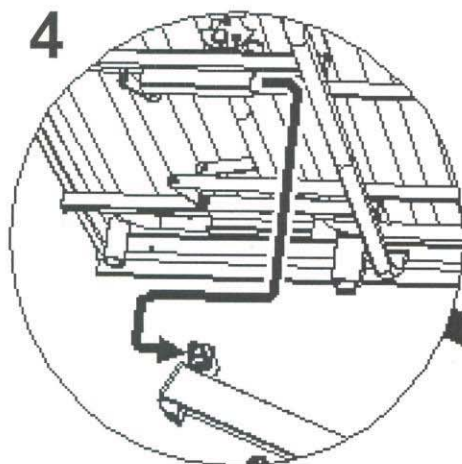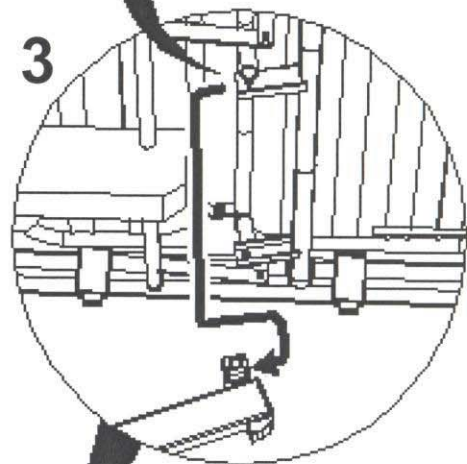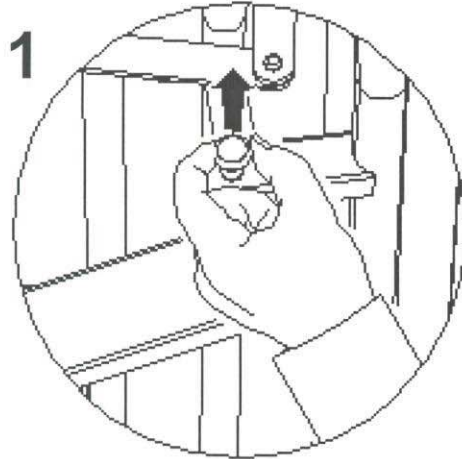

Hvernig á að setja rúmið saman.

