

Þegar búið er að ná í QTA Access Point E smáforritið er QTA hitastigsmælir stöðvar á eftirfarandi hátt:

1. Opnið QTA Access Point E smáforritið. 
2. Veljið  „Read Tracer - Scan Tracer“
3. Mikilvægt er að ýta á  áður en QR kóði QTA mælis er skannaður, þannig að hringurinn verður rauður á litinn 
4. Skannið inn QR kóða QTA mælis.
5. Athugasemd kemur upp hvort það eigi að stoppa mæli, „STOP, Do you really like to stop tracer“. Veljið OK.
6. **Mikilvægt** er að hreyfa mælinn fram og til baka þannig að gögnin færist yfir.

Ath! Ekki má geyma blóðhluta í blóðflutningstösku eftir að hún hefur verið opnuð.

Skráið einnig á meðfylgjandi eyðublað hvenær mælir er stöðvaður og merkið við hvort hitastig í flutningi var í lagi eða utan skilgreindra marka.



Grænt ljós

Hitastig í flutningi er **innan** skilgreindra marka



Rautt ljós

Hitastig í flutningi er **utan** skilgreindra marka

Ef rautt ljós er á mæli þarf að hafa samband við Blóðbankann tafarlaust í síma 543 5507.

Starfsmaður Blóðbanka metur í samráði við lækni hvort óhætt sé að nota blóðhlutana.

Sendið mæli og útfyllt eyðublað til Blóðbankans ásamt töskunni.