

PANDA COMFORT ROLLATOR
Art. 312601

Notendahandbók



The Panda Comfort kemur með:
flutningslás, færanlegum
lokuðum innkaupapoka, bakbelti
og hækjuhaldara

‘Utbúinn með færanlegum
lokuðum innkaupapoka



Létt göngugrind Panda
Comfort er með dökkblárrí
álgrind



Með stórum
mjúkum hjólum



Rekstaravörur Ehf
Réttarhás 2
110 Reykjavík
S: 520-6666
netfang: sala@rv.is



1. Inngangur: Þakka þér fyrir að kaupa hágæða Mobilex vöru. Þessar notkunarleiðbeiningar innihalda lýsingu og mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins. Það er ætlað til að hjálpa þér að nota vöruna á réttan hátt og öruggan. Það er mjög mikilvægt að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað. Skoðaðu vel öryggisleiðbeiningarnar og fylgdu þeim. Mobilex er stöðugt að reyna að bæta og uppfæra vörur sínar. Þess vegna ákasiljum við okkur rétt til að breyta forskriftum og tækniupplýsingum vörunnar.

Mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins til að auðvelda notkun á réttan hátt.

ÍFyrirhuguð notkun tækisins.

Þessi vara er lækningartæki sem hefur verið hannað til að auka hreyfigetu einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með að standa og labba. Göngugrindin gerir þeim einstaklingum kleift að endurheimta getu til að framkvæma daglegar athafnir. Göngugrindin er mjög hentug fyrir einstaklingum sem þurfa stöðugan stuðning við gang vegna ýmissa ástæðna. Göngugrindina á aðeins að nota sem stuðning við að standa upp og ganga. Hægt er að nota sætið til að setjast niður og hvíla sig. Öll önnur otkun er bönnuð.

Vísbendingar

Göngugrindin er lækningatæki hannað til að aðstoða fólk með takmarkanir á virkni. Ábendingar um nokkun eru sjúkdómar sem valda hreyfihömlum og fötlun, hindra sjálfstætt sitjandi, standandi og gangandi. Þess vegna er þörf fyrir auknum stöðugum stuðningi við framkvæmd ýmissa athafna daglegs lífs. Þetta tengist ekki ákveðinni klíniskri mynd og ábendingar fyrir notkun göngugrindar ráðast af einstaklingsbundnu mati á heilsu hugsanlegs notanda grindarinnar.

Frábendingar

Göngugrindur eru mikilvægar fyrir einstaklinga sem geta ekki haldið jafnvægi í standandi stöðu. Ekki má nota tækið ef notandinn á í vandræðum með skynjun á umhverfi sínu. Frábendingar fyrir notkun göngugrindar geta tengst klíniskri mynd og eru háðar einstaklingsbundnu mati á heilsufari notendans. Matið verður að fara fram með aðstoða sérfræðilæknis eða sjúkráðgjafara.

Notkunarsvæði

Varan er hentug til notkunar inni og úti og er hægt að nota vöruna í heimahjúkrun, heilsu og langtímahjúkrun og á sjúkrahúsum..

Læknisatvik og óæskileg atvik. ef upp koma óæskileg atvik sem tengjast tækinu, vinsamlegast hafðu samband við söluaðila eða framleiðanda.

Rekstrarvörur ehf Réttarhálsi 2 110 Reykjavík	Sími:	520-6666
	email:	sala@rv.is

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone:	+45 87 93 22 20
	Telefax	+45 87 93 17 77
	: Email:	info@mobilex.dk

Öryggiskröfur

- Gakktu úr skugga um að þessi handbók hafi verið lesin af öllum sem nota tækið
- Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni og/eða meiðslum sem hlýst af því að ekki er fylgt notkunarleiðbeiningum.
- Notaðu vöruna einungis í gallalaus ástandi
- Ef gallar eða villur finnast verður þú tafarlaust að hætta að nota tækið og hafa samband við söluaðila.
- Fylgdu öllum ráðleggingum og viðvörðunum framleiðanda.
- Vertu meðvituð um upplýsingarnar á vörumerkinu.
- Notaðu vöruna aðeins í þeim tilgangi sem lýst er.
- Ekki klifra upp á tækið
- Forðastu að gera uppbyggilegar breytingar á tækinu, nema þú hafir samþykki framleiðanda (skriflegt).
- Tækið og pokann má ekki hlaða með meiri þyngd en tilgreint er í tæknigögnum.
- Öll hjól verða að vera í snertingu við gólið allan tíman með á notkun stendur. Þetta mun tryggja að göngugrindin sé í réttu jafnvægi.
- Farðu varlega þegar þú setur saman eða stillir hluta tækisins.
- Athugaðu alltaf hvort bremsurnar virka rétt fyrir notkun.
- Notaðu göngugrindina aðeins þegar hann hefur verið tekinn upp að fullu og læsibúnaðurinn hefur verið virkjaður.
- Aðeins má nota sætið þegar bremsurnar hafa verið læstar.
- Báðar bremsurnar ættu alltaf að vera læstar samtímis.
- Óheimilt er að bera mann eða hluti á stæinu á meðan göngugrindin er í notkun/á hreyfingu.
- Stöðuhemlar verða alltaf að vera virkir þegar göngugrindin er ekki í notkun.

Varhlutir sem fylgja

Tækið er afhent í öskju. Innihald pakkans er:

- ✓ 1 Göngugrindin samanbrotin, sæti og innkaupapoki
- ✓ 1 hækuhaldari
- ✓ 1 Notendahandbók

Bráðabirgðaathugun


berðu saman innihald kassans við listann hér að ofan. Ef þú uppgötvar á þessu stigi að hluti vantar eða eru skemmdir hafðu strax samband við birgjann þinn.

3. Vörulýsing

Göngugrindin er með 4 stór mjúk hjól og álhúðaða grind. Vegna efna sem notuð eru eru göngugrindin tæringarþolinn. Létti ramminn gerir það auðvelt að brjóta grindina saman og býður upp á auðveldla geymslu og flutninga. Göngugrindin er auðveld í notkun og er stöðug. Hægt er að stilla hæðina á handföngunum. Göngugrindin er afhent með uppsettu sæti, bakól og innkaupapoka. Göngugrindin er með endurskinismerki á þrýstihandföngum, poka og hliðum rammans.

Göngugrindin samanstendur af eftirfarandi hlutum:

1. Handföngum
2. Bremsum við handföng
3. Sæti
4. Stillingu fyrir handföng
5. Brems
6. Afturhjól
7. Tip-pedali
8. Sæti með ól til að leggja saman
9. Endurskinsmerki
10. Bakstuðningur
11. Fallin læsi hnappur
12. Innkaupapoki
13. Snúningshjól að framan

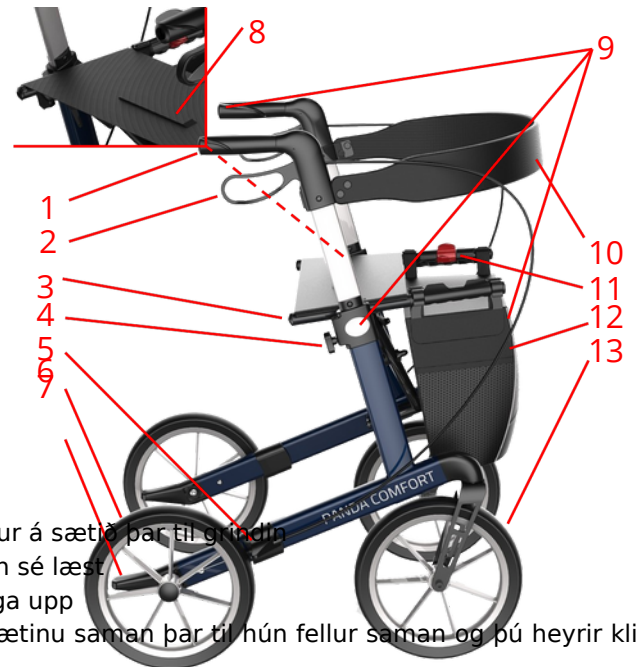

Lýsing á samsetningu

Þetta tæki þarf ekki samsetningarleiðbeiningar.

Aðgerðarlýsing

Brjóta saman/setja grindina upp

Til að brjóta rammann upp ýttu á fellilásarhnappinn og ýttu niður á sætið þar til grindin fellur út og þú heyrir smell, sem gefur til kynna að göngugrindin sé læst í uppsettri stöðu. Til að brjóta göngugrindina saman skaltu draga upp fellibandið og ljúka við að brjóta hana saman með því að ýta sætinu saman þar til hún fellur saman og þú heyrir klikk í læsihnappnum.

Viðvörðun! Sætið verður að smella á báðum hlið þegar göngugrindin er sett saman. Allir hlutar verða að vera læstir áður en hægt er að nota göngugrindina. Ef þessum viðvörðunum er ekki fylgt geta orðið slys.

Hæðarstilling þrýstihandfangsins.

Til að stilla hæð á handfanginu, losaðu skrúfuna og renndu handfanginu í þá stillingu sem þú vilt. Hertu á skrúfunni og endurtaktu fyrir hitt handfangið.

Athugið: Bæði handföngin ættu alltaf að vera í sömu hæð. Rétt hæð á handföngunum ætti alltaf að vera á hæð við ulnlíð notandans þegar hann stendur með handleggina meðfram líkamanum.

Bremsur

Hægt er að virkja bremsurnar smám saman með því að toga bremsustangirnar upp með auknum krafti. Bremsur eru fullvirkar þegar bremsuhandfangið snertir handföngin og göngugrindin er alveg stöðvuð. Til að stöðva hemlun slepptu bremsunum. Göngugrindin er einnig búinn handbremsuáðgerð. Til að virka handbremsuna ýttu bremsuhandfangunum niður. Til að aftengja handbremsuna skaltu draga bremsustöngina aftur í hlutlausu stöðu.

Viðvörðun! Virkjaðu alltaf handhemilinn þegar göngugrindin er ekki í notkun. Þegar göngugrindin er sett í hallandi /óstöðugt umhverfi þarf alltaf að setja hana í handbremsu.

Viðvörðun! Bremsurnar verða alltaf að vera í læstri stöðu þegar rúlluvélinni er lagt. notaðu aldrei sætið ef bremsur ekki læstar.

þegar þú situr skaltu aldrei halla þég aftur á

bak. Mælt er með því að sitja aðeins á fremri hluta sætis. Ekki

setjast niður á töskuna.

Endurskinsmerki

Göngugrindin er með endurskinsmerki á öllum hliðum þar á meðal á handföngum, poka og hliðum grindarinnar.

Tip-pedali

Pedalinn gerir það auðveldara fyrir notandann að forðast hindranir með því að halla göngugrindinni afturá bak.

Aukabúnaður

Tækið er hægt að útbúa með eftirfarandi aukabúnaði (ekki hluti af staðalbúnaði)

- ✓ Föst sæti
- ✓ Bakki
- ✓ Lokaður poki með rennilás

- ✓ LED ljós hvít/rauð
- ✓ Súrefniskútshaldari
- ✓ Regnhlífur haldari

- ✓ Bak belt H=200 mm
- ✓ Netataska
- ✓ Rauð bjalla

4. Tæknilegar upplýsingar

Panda komfort göngugrind Hæð handfanga stillanleg	Art. 312601 77.5 – 99.1 cm 160 – 200 cm 59 cm
Hæð notenda	45.5 x 19 cm
Sætishæð	77.5 x 65 x 77.5-99.1 cm
Sætisbreidd (L x D)	77.5 x 26.4 x 77.5-99.1 cm
Heildarbreidd óbrotin (L x W x H)	45.5 cm
Heildarbreidd samanbrotin (L x W x H)	77,5 cm
Breidd á milli handfanga	89.5 cm
Lengd (dýpt)	8.82 kg
Snúningsshringur	9.44 kg
Þyngd án aukahluta	150 kg / 5 kg
Þyngd með aukahlutum	2 læsanleg hjól
Hámarksburðarget / pokahleðsla	285 mm x 45 mm
Bremsur	Algrind, hjól úr PP og gummí
Hjólasterðir (fram og afturhjól)	
Efni	

Product label



Example of the product label

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	To be used indoor and outdoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device

Meaning of the icons

5. Umhirða og viðhald.

venjuleg óhreinindi má fjarlægja með venjulegum hreinsiefnum og svampi eða mjúkri tusku. Athugaðu tiltkenar vörurupplýsingar og notaðu aðeins hreinsiefni sem henta til hreinsunar. Til sótthreinsunar skal aðeins nota sótthreinsiefni sem eru vottuð til notkunar á lækningatækjum. Hjól má þrifa með heitu vatni með mildu hreinsiefni. Eftir hreinsun ætti hjólalegur að vera smurðar með olíu reglulega eða þegar hjólin bryja að ískra. Þrátt fyrir trausta byggingu og notkun geta komið slit. Það er því mælt með að skoða vöruna með reglulegu millibili. Við mælum með :

- ✓ Þrif og sótthreinsun vörunnar
- ✓ Skoða grindina með tilliti til beygla, skemmda, slit/tæringu
- ✓ Athugaðu slithluti og skiptu um þá ef þörf er
- ✓ Almenn endurspenning á íhlutum

Ráðlagður endingartím: Venjulega 10 ár, fer eftir notkun Geymsla: Mælum með geymslu á þurrum stað með hitastig við og yfir 0°C

Flutningur/samgöngur Mælt er með því að brjóta tækið saman við flutning. Tækið ætti að vera flutt í stöðugu og öruggri leið án hættu á skyndilegum eða hættulegum hreyfingum á meðan það er flutt.

Endurnotkun Varan er hentugt til endurnotkunar. Áður en nýr notandi tekur við vörunni þarf að athuga tækið með tilliti til stillinga.

6.6. Algengustu vandamálin og lausnir

Problems	Possible causes	Solutions
Göngugrindin er stíf og erfið í notkun	Óhreinindi á hjólum Bremsurnar eru slitnar,	Remove dirt or hair between wheels and forks lagaðu bremsurnar og skiptu um bremsurnar ef þörf er
Bremsurnar virka ekki eða virka illa	ekki stillta rétt. Læsibúnaðurinn er bilaður	Athugaðu hvort að læsibúnaðurinn sé í réttri stöðu.
Sætið passar ekki við grindina á meðan hún er samanbrotin	eða stendur á ser	Skiptu um læsibúnaðinn ef þörf er á því.

7. Förgun vörunnar Ekki má farga vörunni með heimilissorpi og verður að koma henni á endurvinnslustöð

8. Ábyrgðarskilmálar

Mobilex veitir 2 ára ábyrgð á tjóni sem stafar af mistökum í framleiðslu eða efnisvillum. Ábyrgðin gildir ekki með ófyrirséðri viðgerð eða noktun vörunnar. Hlutar sem verða fyrir eðlilegu slit falla ekki undir ábyrgð, nema slit sé af völdum framleiðslugalla. Ef vörubreytingar eru gerðar án skriflegs samþykkis fellur ábyrgð CE merkingar og vöruábyrgð úr gildi. Verði vörutjón sem falla undir þessa ábyrgð, vinsamlega látið söluaðila eða Mobilex vita beint. Ábyrgðin nær ekki til flutningskostnaðar. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir ef notendahandbókinni er ekki fylgt.



9. Samræmisýfirlýsing

Tækið hefur staðist samræmismat í samræmi við reglugerð ESB: MDR 2017/745 varðandi lækningatæki og er CE merkt. Samræmisýfirlýsing hefur verið gefin út fyrir tækið og fæst á mobilex.dk/medias/2023-03/panda_comfort_ce_11877.pdf eða með að skanna QR kóðann hér til hægri. .