



HOPLA

Göngugrind fyrir börn frá Eurovema

Notendaleiðbeiningar

Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar og hafið samband við Stoð ef spurningar vakna.

Til að stilla hæðina á grindinni þarf að nota sérstakan lykil sem fylgir grindinni. Hann er settur í gatið neðarlega á svarta hlutanum og snúið. Athugið að hjólin að framan og aftan þurfa að vera í sömu hæð.

Hæðin á bolhringnum er stillt með stóru svörtu skrífunni framan á grindinni.

Öryggisatriði.

Athugið að Hopla er hönnuð til innanhúsnota.

Skiljið barn aldrei eftirlitslaust í grindinni.

Hámarks notendabýngd er 35 kg.

Til viðhalds og viðgerða skal nota varahluti frá Eurovema.

Þrif.

Þurrkið af grindinni með rökum, mjúkum klút og notið milda sápu. Smyrjið hjólin með olíu.