

ARTHRITIS ROLLATOR TIGER
"OUTDOOR"
Art. 312205, 312206

Notendahandbók



Útigöngugrind sem
hentar gigtarsjúklingum




**Mobilex A/S Grønlandsvej 5, 8660
Skanderborg, Denmark,**

www.mobilex.dk



Hæðarstillanlegur
framhandleggs-
stuðningur

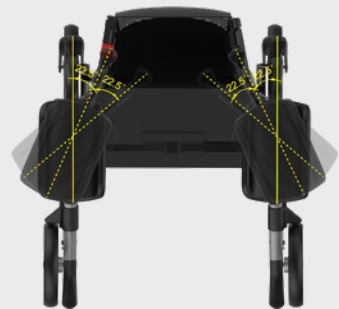

Snúanlegir
framhandleggsstuðningur

Opin(læsanlegur
aukabúnaður fyrir
netpoka



**Rekstaravörur Ehf Réttarháls 2 110
Reykjavík S: 520-6666 netfang:
sala@rv.is**

1. Inngangur Þakka þér fyrir að kaupa hágæða Mobilex vöru. Þessar

notkunarleiðbeiningar innihalda lýsingu og

mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins. Það er ætlað að hjálpa þér að nota vöruna á réttan hátt.

og örugglega. Það er mjög mikilvægt að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað. Gættu sérstaklega að öryggisleiðbeiningum og fylgdu þeim alltaf. Mobilex er stöðugt að reyna að bæta og uppfæra vörur sínar. Þess vegna áskiljum við okkur rétt til að breyta forskriftum og tæknigöngum vörunnar án frekari fyrirvara.

Fyrirhuguð notkun tækisins.

Þessi vara er lækningatæki sem hefur verið hannað til að auka hreyfigetu einstaklinga sem eiga í erfiðleikum standandi eða gangandi. Göngugrindin gerir þeim einstaklingum kleift að endurheimta getu til að framkvæma daglega athafnir. Göngugrindin hentar einstaklingum sem vegna ýmissa sjúkdóma þurfa stöðugan stuðning við gang. Göngugrindin ætti aðeins að vera notuð sem stuðningur við að standa og ganga. Öll önnur notkun er bönnuð.

Vísbendingar

Göngugrind er lækningatæki sem er ætlað til að hjálpa fólki sem hefur takmarkaða hreyfigetu. Ábendingar um notkun tækisins eru sjúkdómar sem valda hreyfihömlun og fötlun, sem hindrar að einstaklingur geti setið, staðið eða gengið sjálfur. Þess vegna er þörf á auknum stöðugum stuðningi við framkvæmd þessara atvika. Vísbendingar geta tengst mörgum mismunandi ástæðum fyrir því að einstaklingar þurfi göngugrind. Einstaklingur þarf að gangast undir mat heilbrigðisstarfsfólk á sinni klíniskri mynd. Göngugrindur geta nýst fólki, með mænuskáða, gigtarsjúklingum, öldruðum eða fólki sem er með takmarkaða hreyfigetu einhverja hluta vegna. Notkun grindarinnar í öðrum tilgangi en lýst er að ofan er bönnuð.

Frábendingar

Göngugrindur eru ekki ákjósanlegar fyrir einstaklinga sem geta ekki haldið jafnvægi í standandi stöðu. Ekki má nota tækið ef notandinn á í vandræðum með skynjun. Frábendingar geta ekki tengst einum tilteknum sjúkdómi, heldur eru þær háðar einstaklingsbundnu mati á heilsufari hugsanlegs notenda. Valið á grind verður alltaf að vera gert með aðstoð heilbrigðisstarfsfólks. Að auki skaltu fylgjast með öryggisupplýsingum sem koma hér neðar.

Notkunarsvæði

Vöruna er hægt að nota í heimahjúkrun, hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsum.

Læknisatvik og óæskileg atvik

Ef upp koma óæskileg atvik sem tengjast tækinu, vinsamlegast hafðu samband við söluaðila.

Rekstrarvörur	Sími	
Réttarhálsi 2	email	5206666
110 rvk		sala@rv.is

Öryggiskröfur

- Gakktu úr skugga um að þessi handbók hafi verið lesin af öllum sem munu nota tækið.
- Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni og/eða meiðslum sem hlýst af því ef notkunarleiðbeiningum er ekki fylgt.
- Notaðu vöruna einungis í gallalausum ástandi.
- Ef gallar eða villur finnast verður þú tafarlaust að hætta að nota tækið og hafa samband við söluaðila.
- Fylgdu öllum ráðleggingum og viðvörðunum framleiðandans.
- Vertu meðvituð um upplýsingar á vörumerkinu.
- Notaðu vöruna aðeins í þeim tilgangi sem lýst er.
- Ekki klifra á vörunni
- Forðastu að gera breytingar á tækinu nema þú hafir samþykki framleiðanda (skriflegt).
- Tækið og pokann má ekki hlaða með meiri þyngd en tilgreint er í tæknigöngum.
- Öll hjól verða að vera í snertingu við gólfið allan tímann á meðan á notkun stendur. Þetta mun tryggja að göngugrindin sé í réttu jafnvægi.
- Farðu varlega þegar þú setur saman eða stillir hluta tækisins.
- Athugaðu hvort að bremsurnar virki fyrir notkun
- Notaðu göngugrindina aðeins þegar bremsur hafa verið aflæstar og hægt er að hreyfa hjólin, læsibúnaður verður að vera virkur
- Aðeins má nota sætið þegar bremsunum hefur verið læst.
- Báðum bremsunum ætti alltaf að læsa samtímis.
- Óheimilt er að bera mann eða aðra hluti á sætinu á meðan göngugrindin er í notkun. Stöðuhemlar verða alltaf að vera virkir þegar göngugrindin er ekki í notkun.

Varahlutir sem fylgja

Tækið er afhent í öskju. Innihald pakkans er:

- ✓ 1 Göngugrindin samanbrotin: sæti og innkaupapoki
- ✓ 1 Hækjuhaldari
- ✓ 1 Notendahandbók

Bráðabirgðaathugun


Berðu saman innihald kassans við listann hér að ofan. Ef þú uppgötvar á þessu stigi að hluti vantar eða er skemmdur hafðu strax samband við birgjann þinn

3. Vörulýsing

Göngugrindin er með húðaðri grind og 4 hjólum. Létti ramminn gerir það auðvelt að brjóta það saman og býður upp á auðveldla geymslu og flutning. Göngugrindin gengur auðveldlega og er nægilega stöðugur. Hæð handleggs stuðningsins er hægt að stilla. Göngugrindin er afhent með uppsettu sæti, bakbelt og innkaupapoka.

Göngugrindin samanstendur af eftirfarandi hlutum:

1. Stuðningur fyrir handleggi
2. Bremsuhandfang
3. Sæti
4. Sætisrör
5. Stjórnuhnappur fyrir hæðarstillingu handfanga
6. Bremsur
7. Afturhjól
8. Þrýstihandföng
9. Bremsuhandföng
10. Ól á milli handfanga
11. Fellanleg ól
12. Læsing
13. Bakbelti
14. Fellilásahnappur
15. Innkaupapoki
16. Snúningshjól að frama

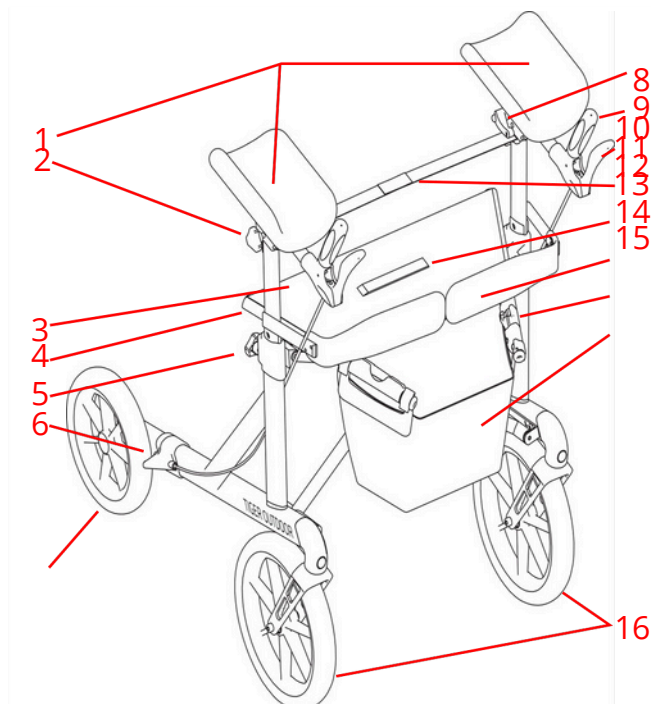

Lýsing á samsetningu

Til að setja göngugrindina saman skaltu festa framhandleggsstöðirnar tvær með því að fjarlægja stöðugleikabandið fyrir framhandleggsstöðirnar og setja stöðirnar í gráu rörin og festa síðan stöðugleikabandið við framhandleggsstöðirnar með skrufunum tveimur. Festu bremsustangirnar tvær með því að stinga slöngunni inn í framarmsstuðningana og herða á handfangsstönginni til að stilla lengd stangarinnar.

Aðgerðalýsing

Brjóta saman/setja göngugrindina upp.

Til að setja grindina saman ýttu á fellilásahnappinn og ýttu sætisrörinu niður þar til grindin sleppir og smellur sem gefur til kynna að göngugrindin sé læst í uppsettri stöðu. Til að brjóta göngugrindina saman skaltu draga upp fellibandið og ljúktu við að brjóta grindina saman með því að ýta sætisrörunum saman þar til fellilásahnappurinn smellur. **Viðvörðun** Sætisrör verða að smella á sinn stað á báðum hliðum þegar göngugrindin er sett upp. Allir hlutar verða að vera þéttir og læstir áður en hægt er að nota göngugrindina. Ef þessum viðvörðunum er ekki fylgt gæti orðið slys.

Hæðarstilling á handleggsstuðningi

Til að stilla hæð handleggsstuðningsins skaltu fyrst losa rammafestingarólina, losa um hæðarstillinguna með stjórnuhnappinum og renndu stuðningnum í þá stillingu sem þú vilt. Herðið stjórnuhnappinn og endurtakið fyrir hinn stuðninginn. Eftir að báðar stöðirnar eru stilltar festu rammafestingarólina aftur.

Athugið Báðar handleggstuðningarnir ættu alltaf að vera í sömu hæð.

Stilling fyrir snúning á handleggstuðningi.

Til að stilla láréttan snúning handleggstuðningsins skaltu losa stjórnuhnappinn undir stuðningum stilltu snúninginn og hertu aftur á stjórnuhnappinum. Endurtaktu fyrir hinn stuðninginn. Stilltu stöðugleikaólina ef hún verður laus eða of stutt. Þrýstið handfangsdýptinni og hallstilltu handföngin. Losaðu handfangið, renndur rörinu á handfanginu til að stilla dýptina eða snúðu því til að halla handfangi og hertu aftur á stönginni. Stilltu stöðugleikaólina ef hún verður laus eða of stutt.

Bremsur

Hægt er að virkja bremsurnar smám saman með því að draga bremsustangirnar aftur með auknigu afls. Bremsur eru að fullu virkjaðar þegar bremsuhandföngin snerta handföngin og göngugrindin er alveg stöðvuð. Til að hætta að bremsa slepptu bremsuhandfanginu. Göngugrindin er einnig búin handbremsuaðgerð. Til að virkja handbremsuna ýttu á hemlahandfangana áfram. Til að aftengja handbremsuna skaltu draga bremsustangirnar aftur í hlutlausa stöðu.

Viðvörðun! Virkjaðu alltaf handbremsuna þegar göngugrindin er ekki notuð! Þegar göngugrindin er sett á hallandi yfirborð verður bremsan alltaf að vera á.

Viðvörðun! Bremsurnar verða alltaf að vera í læstri stöðu þegar göngugrindinni er lagt! Notaðu aldrei sætið ef bremsur eru ekki læstar! Þegar þú situr skaltu aldrei halla þér aftur á bak. Mælt er með því að sitja aðeins á fremri hluta sætisins. Ekki setjast niður á töskuna.



Aukabúnaður


Tækið er hægt að útbúa með eftirfarandi aukabúnaði:

- ✓ Sæti
 - ✓ Hraðaminnkandi tæki
 - ✓ Lokaður poki með rennilás
- ✓ Nettaska með rennilás
 - ✓ Rauð/blá þjalla
 - ✓ LED ljós Hvítt/rautt
- ✓ Haldari fyrir súrefniskút
 - ✓ Bakki

4. Technical data

Arthritis Rollator Tiger	Art. 312205	Art. 312206
Litur	antracite grey	metallic brown
Hæð á handföngum (stillanleg)	87 - 110 cm	
Hæð notenda	140 - 185 cm	
Sætishæð	62 cm	
Breidd samanbrotin/ opin	71 / 31 cm	
Sætisbreidd/breidd milli handfanga	56 / 46cm	
Lengd	77 cm	
Þyngd	12 kg	
Hámarksþyngd / pokaburðarpól	200 kg / 5 kg	
Brakes	2 læsanleg dekk	
Dekkjastærð	200 x 35 mm	

Product label

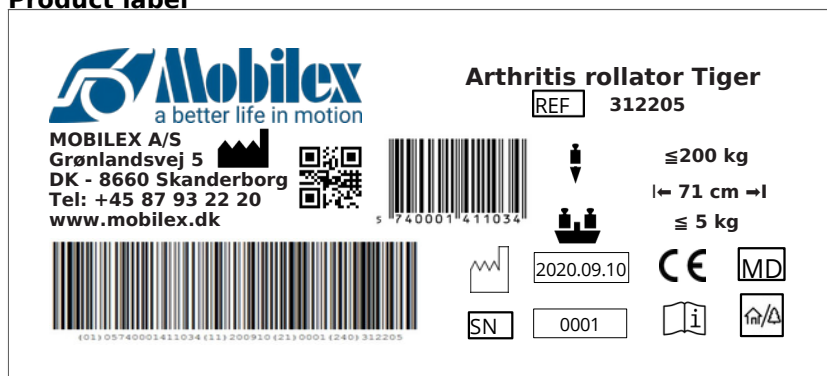

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	Only to be used indoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device

Meaning of the icons

Example of the product label

5. Umhirda og viðhald venjuleg óhreinindi má fjarlægja með venjulegum hreinsiefnum og svampi eða mjúkri tusku. Athugaðu tiltkenar vörurupplýsingar og notaðu aðeins hreinsiefni sem henta til hreinsunar. Til sótthreinsunar skal aðeins nota sótthreinsiefni sem eru vottuð til notkunar á lækningatækjum.

Hjól má þrifa með heitu vatni með mildu hreinsiefni. Eftir hreinsun ætti hjólalegur að vera smurðar með olíu reglulega eða þegar hjólin byrja að ískra.

Þrátt fyrir trausta byggingu og notkun geta komið slit. Það er því mælt með að skoða vörurna með reglulegu millibili.

Við mælum með :

- ✓ Þrif og sótthreinsun vörunnar
- ✓ Skoða grindina með tilliti til beygla, skemmda, slit/tæringu
- ✓ Athugaðu slithluti og skiptu um þá ef þörf er
- ✓ Almenn endurspenning á íhlutum

Ráðlagður endingardagur: Venjulega 10 ár fer eftir notkun.

Geymsla: Mælum með geymslu á þurrum stað með hitastigi við og yfir 0°

Flutningur

Mælt er með því að brjóta tækið saman við flutning. Tækið ætti að vera flutt í stöðugu og öruggri leið án hættu á skyndilegum eða hættulegum hreyfingum á meðan það er flutt.

Endurnotkun

Varan er hentug til endurnotkunar. Áður en nýr notandi tekur við vörunni þarf að athuga tækið með tilliti til stillinga.

6. Algengustu vandamálín og lausnir

Vandamál	Mögulegar ástæður	Lausnir
Göngugrindin er stíf og erfið í notkun	Skítur á hjólum	Fjarlægðu skítinn
Bremsurnar virka ekki eða virka illa	Bremurnar notaðar eða ónýtar	Lagaðu bremsurnar eða skiptu um bremsur
Sætið passar ekki í grindina þegar grindin er brotin saman.	Læsibúnaðurinn er rangur eða gallaður	Athugaðu hvort að læsibúnaðurinn sé í réttri stöðu, skiptu um búnaðinn ef þörf er á.
Bakbeltið og grindin nær ekki fyrir hvert annað.	Bakbeltið og ramminn mynda stöðugleika þegar þau eru læst saman	Læstu bakbeltinu og festingarólinni saman áður en rúlluvélin er tekin í notkun.

7. Förgun vörunnar Ekki má farga vörunni með heimilissorpi og verður að koma henni á endurvinnslustöð

8. Ábyrgðarskilmálar

Mobilex veitir 2 ára ábyrgð á tjóni sem stafar af mistökum í framleiðslu eða efnisvillum. Ábyrgðin gildir ekki með ófyrirséðri viðgerð eða notkun vörunnar. Hlutar sem verða fyrir eðlilegu sliti falla ekki undir ábyrgð, nema slit sé af völdum framleiðslugalla. Ef vörubreytingar eru gerðar án skriflegs samþykkis framleiðanda ef það er gert þá fellur CE-merkingin og vöruábyrgð úr gildi. Verði vörutjón sem fallla undir þessa ábyrgð, vinsamlega látið söluaðila eða Mobilex vita strax. Ábyrgðin nær ekki til flutningskostnaðar og leiða ekki til bóta vegna líkamstjóns eða ónotunar vörunnar meðan á viðgerð stendur. Ábyrgðin nær ekki til skemmdavegna þess að notendahandbókinni er ekki fylgt.

9. Samræmisfirlýsing

Tækið hefur staðist samræmismat í samræmi við reglugerð ESB: MDR 2017/745 varðandi lækningatæki og er CE merkt. Samræmisfirlýsing hefur verið gefin út fyrir tækið og fæst á :

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_arthritis_rollator_tiger_outdoor__312205_6__8420.pdf

eða með því að skanna QR kóðann hér til hægri.

