

Mobilex "DYNAWALK"
Light weight - Verticalizer/Walking frame
Item No. 313001 & 313002

Notendahandbók

Týpa 313002
Bremsuhandfang á
hanfangi



2 læsanlegar
bremsur á
handföngum



Afturhjól með
bremsu og núningi



Göngugrind



1. Almennar upplýsingar

Þessi notendahandbók inniheldur lýsingu á lækningatækinu og mikilvægar leiðbeiningar til að tryggja rétta og örugga notkun af vörunni.

Það er mikilvægt fyrir notkun að lesa þessa handbók vandlega. Það er sérstaklega mikilvægt að lesa öryggiskröfur og fylgja þeim.

Við þróum vörur okkar stöðugt og áskiljum okkur rétt til að breyta vörunni án frekari fyrirvara.

Forskriftir og virkni vara.

Mobilex varan er lækningatæki sem er eingöngu ætlað til notkunar sem standandi og gangandi aðstoðarmaður á meðan á göngu stendur endurmenntun sjúklinga sem vegna örorku geta ekki staðið og gengið sjálfstætt og sem þurfa aukinn stöðugan stuðning við göngu. Það gefur slíkum einstaklingum möguleika á að æfa sig göngufærni í endurhæfingarferli með eða án aðstoða aðstoðarmanns. Öll önnur notkun er bönnuð. Ef spurningar eru vinsamlega hafið samband við söluaðila eða beint til Mobilex A/S

Rekstrarvörur ehf
Réttarhálsi 2
110 Reykjavík

Sími: 520-6666
email: sala@rv.is

2. Öryggiskröfur

- Notaðu vöruna aðeins í gallalaus ástandi.
- Ef gallar eða villur uppgötvast verður þú tafarlaust að hafa samband við söluaðila.
- Fylgdu upplýsingum á vörumerkingunni.
- Notaðu einungis vöruna í þeim tilgangi sem lýst er.
- Forðastu að gera uppbyggilegar breytingar á tækinu, nema þú hafir skriflegt leyfi framleiðanda og fengið samþykki fyrir breytingunum.
- Við mismunandi stillingar sem mögulegar eru á tækinu verður notandinn að gæta þess að klemma ekki fingur eða aðra líkamshluta á milli tveggja hluta tækisins.
- Tækið má aðeins nota á flötu, sléttu og stöðugu yfirborði.
- Öll hjól verða að vera í snertingu við gólfið allan tímann meðan á notkun stendur. Þetta mun tryggja að varan sé rétt jafnvægi og ætti að forðast slys.
- Þegar tækið er notað í kyrrstöðu verður að passa að læsa hjólunum.
- Heildarþyngd á tækinu má ekki vera meiri en 135 kg.
- Tækið er eingöngu ætlað til notkunar innandyrna.
- Tækinu er ekki ætlað að vera sjálfknúíð á meðan setið er á því
- Öryggisbeltið hefur aðeins stuðningsvirki og getur ekki borið hámarksþyngd notenda
- Tækið er ekki eldvarið ekki skilja það eftir nálægt eldi

3. Lýsing


Vörulýsing

Það býður upp á mikla stjórn hæfni og stöðugleika. Það er stillanlegt á hæð og breidd til að passa við notanda. Það er líka hægt að stilla lengd og horn handfanganna. Það er búið þæginlegum, lyftanlegum og læsanlegum öryggisstöngum og mjúkt, stillanlegt öryggisbelti sem gerir notanda kleift að hvíla sig ef þörf krefur.

Dynawalks eru afgreiddar í öskjum, losaðar í nokkra hluta til að auðvelda flutning:

Innihaldið er:

- 1 Aðalramma
- 2 aftanlegar hliðar- og handleggjastöðir með stillanlegum handföngum og öryggisbakstöngum
- 1 Notendahandbók

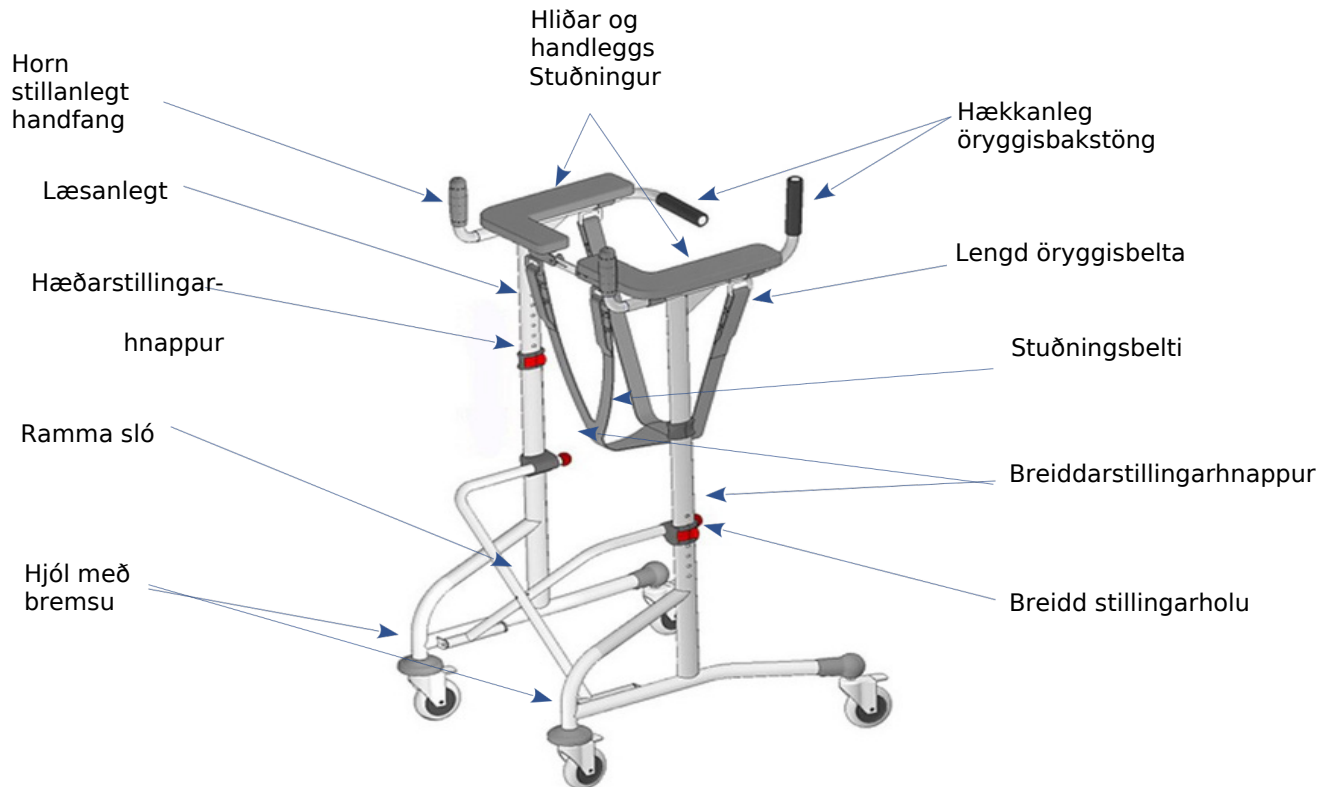


Samsetningarlysing og aðgerðarlýsing

- **Fyrsta athugun :** Athugaðu með listann að ofan ef ekkert vantar. Ef þú kemst að því á því stigi að einhver hluti vantar eða er skemmdur skaltu ekki halda áfram samsetningarferlinu. Hafðu strax samband við söluaðila vörunnar.
- **Opnun/lokun ramma og breiddarstillingu.** Ýttu framhlutum beggja þverslána niður þar til breiddarstillingarhnappurinn nær upp á eitt af breiddarstillingarholunum. Snúðu síðan báðum hnúðunum réttisælis til að festa þá rammabreidd sem óskað er eftir. Neðra gatið sem þú velur, því breiðari rammabreidd verður stillt. til að loka rammaþann þarf að losa tvo breiddarstillingarhnappa og draga báðar þverslárnar upp.
- **Festing á hliðar og hannleggjum og hæðarstilling.** Renndu hliðar- og armstuðningsstönginni inn í sérstaka sporöskjulaga gatið efst á aðalgrindinni. Veldu þá hæð sem þú vilt á stuðninginn og hertu á hæðarstillingarhnappnum, þannig að stuðningurinn se fastur og stöðugur. Endurtaktu skrefin hér að ofan til að festa stuðninginn á hinni hliðinni. Ef þú vilt breyta stilltri hæð hliðarstuðnings skaltu einfaldlega losa hnappana sem stillt er á viðeigandi hæð og binda hnappana aftur.



Viðvörðun! Bæði hliðar- og handleggsstuðningur verður alltaf að stilla í sömu hæð.

- **Læsing á arm og hliðarstuðning.** Dragðu læsipinnann úr stað þess. Stingdu rörendanum með minna þvermál, staðsettur á annarri hliðar- og handleggstuðningi. Stilltu götin á báðum slöngunum saman. Settu síðan læsipinnann aftur inn á sinn stað. ATH! til að stilla rammabreiddina aftur eða brjóta rammaþann saman verður þú fyrst að opna rammalásinn!.

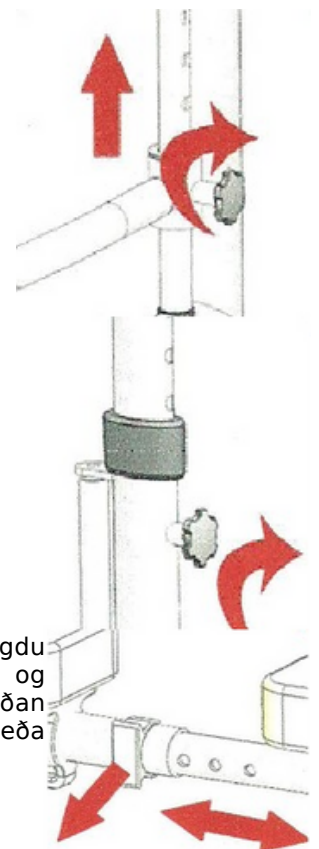

Adjusting the handles position.


- **Til að stilla horn handfangsins** skaltu losa hnappinn sem staðsettur er á snúningspunktinum, stilla æskilegt horn og binda hnúðinn. Endurtaktu skrefin hér að ofan fyrir annað handfangið. Til að stilla lengd handfangsins ýttu á pinnahnappinn sem er undir handleggsstuðningunum og renndu handfanginu í þá stöðu sem þú vilt. Láttu pinnahnappinn grípa gatið sem er næst viðkomandi stöðu. Það mun læsa handfanginu á sínum stað **Athugið!** Við mælum með því að stilla bæði handföngin í sömu lengd og horn, nema það séu mikilvægar ástæður fyrir að gera það ekki. Notkun lyftu öryggisbakstönganna. Öryggisstangir á bakinu eru hannað til að vernda notanda gegn því að velta á bakið og fella tækið. Til að notandinn komist inn í tækið ætti að lyfta bakstöngunum upp með því að ýta á þrýstihnappalásinn sem staðsettur er undir handleggjunum og draga þær upp. Þegar notandi er settur í tækið ætti að lækka bakstöngina í lárétta stöðu og læsa. **Viðvörðun!** Það er nauðsynlegt fyrir öryggi notanda að öryggisbakstöngin sé alltaf lækkuð og læst í flatri stöðu, alltaf þegar notandi er í tækinu. Öryggisstöngunum á bakhliðinni ætti að opna og lyfta aðeins þegar notandi fer inn í eða yfirgefur tækið.
- **Notkun af stuðningi öryggisbelti.** Öryggisbelti er stillanlegt á lengd og fest við grindina með fjórum hraðspennum. Þegar notandi gerir ráð fyrir að þú farir inn í tækið slepptu 2 sylgjum að aftan á beltinu, þannig að beltíð myndi hanga á 2 fremri sylgjunum. Dragðu tvo lausa afturenda beltsins á milli fóta notandans og læstu 2 sylgjunum þegar notandi er í tækinu og öryggisbakstöngin er lækkuð og læst. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla lengd beltsins með því að stytta eða lengja 4 hala beltsins. **Athugið** Allt beltíð ætti að vera stillt að vera um það bil í sömu lengd allar hliðar beltsins. **ATH** rétt sætisbeltislengd næst þegar miðhluti beltsins er rétt á milli fóta notanda, um 3-4 cm fyrir neðan klof notanda. Notandi ætti ekki alltaf að sitja á beltinu á meðan á göngu standur. Beltið er öryggisbúnaður sem er aðeins notaður þegar notandinn er þreyttur.
- **Viðvörðun!** Ekki fjarlægja belltið þegar notandinn er í tækinu. Beltið verður alltaf að vera í lokaðri stöðu þegar tækið er í notkun! Annars getur notandinn fallið niður og slasast. Notkun bremsunnar er mikilvæg. Auðvelt er að virkja bremsurnar með því að ýta niður með fæti á pedalann sem staðsettur er efst á hverju hjóli. Til að opna bremsuna ætti að lyfta stykkinu upp aftur á dekkinu.

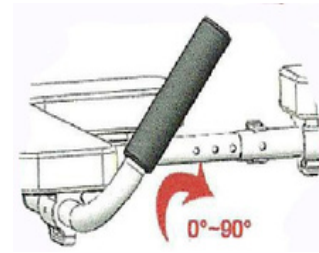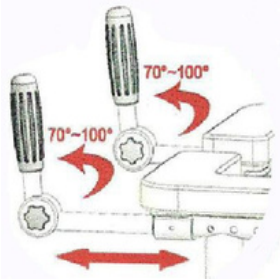

Brake lever on model 313002



Rear brake on model 313002

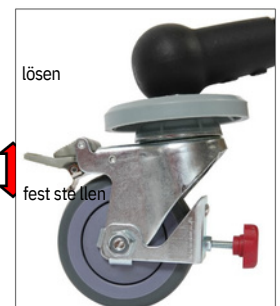

Rear brake with pedal and sliding brake on model 312001

Viðvörðun! Hafðu alltaf bremsurnar á þegar tækið er notað í kyrrstöðu! Skildu aldrei tækið eftir án bremsa þegar einhver situr á því.

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg www.mobilex.dk

Misbrestur í að fylgja fyrirmælum og ráðleggingum! getur valdið líkams og eða eignatjóni! Tækið er samnanbrjótanleg vara sem hentar vel til flutnings. Ef það er nauðsynlegt að flytja það, mælum við með að brjóta það saman eins og það er skrifað í lýsingu hér að ofan. Tækið ætti að flytja á þann hátt að það sé stöðugt og engin hætt sé á skyndilegum og hættulegum hreyfingum þess sem flutt er. **Aukabúnaður** enginn aukabúnaður fylgir þessu tæki.

4 tæknigögn:

Göngugrind Mobilex Bison Max. load

Þyngd

Lengd

Breidd (stillanleg)

Hæð armpúða (stillanleg)


Hámark hæð handfanga







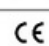





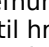
Bremsur að framn/bremsur að aftan

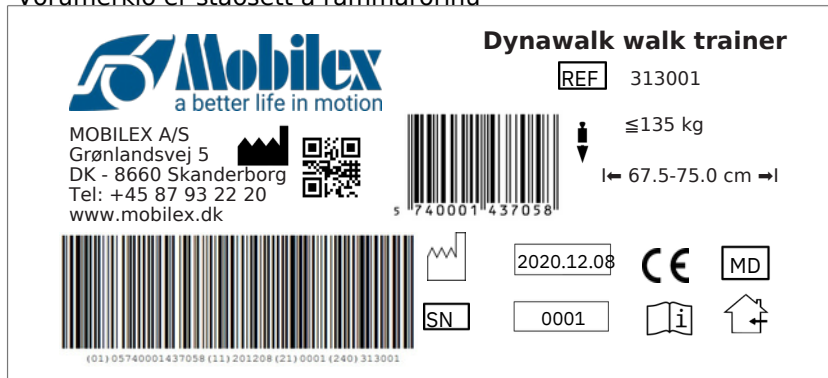	Item nr. 313001 Standard	Item nr. 313002 Brake
	135 kg	135 kg
	12,5 kg	12,5 kg
	82 cm	82 cm
	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
	100 - 123 cm	100 - 123 cm
	136 cm	136 cm
	136 cm 2 lockable pedal brakes	2 lockable pedal brakes
	2 lockable pedal brakes, with friction	2 lockable brakes on the handles

Vörumerki

Vörumerkið er staðsett á rammarörinu

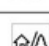

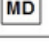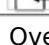	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	To be used indoor and outdoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device
	Only to be used indoor		

Overview icon meaning

Mynd af vörumerkimaðanum fyrir Dynawalk 313001

5. Viðhald og þrif: Venjuleg óhreinindi má fjarlægja með venjulegum hreinsiefni og svampi eða mjúkri tusku. Athugaðu tiltekna vöruupplýsingar og notaðu eingöngu hreinsiefni sem henta til hreinsunar og sóttgreinsunar (notið ekki vörur sem innihalda áfengi og endin leysiefni eða slípiefni). Tækið þarf í grundvallaratriðum ekki viðhald. Þrátt fyrir trausta byggingu og notkun þá er varan háð sliti. Því er mælt með því að athuga vöruna með reglulegu millibili af fagaðila. Við mælum með að eftirfarandi sé athugað

- ✓ Hreinsun og sóttgreinsun vörunnar
- ✓ Athuga skal grind/vöru ef hún hefur verið bogin, skemmd, slitin eða tærð.
- ✓ Slithlutir eru skoðaðir og skipt út ef þörf krefur.
- ✓ Almennt viðhald á vörunni

Ráðlagður endingartími: Venjulega 10 ár eftir notkun.

Hreinsun hjólanna Mælt er með því að þrifa hjólin í heitu vatni með mildu hreinsiefni. Smyrðu legurnar reglulega með olíu eða þegar hjólin fara að ískra.

Viðvörðun



Ef varan kemst í snertingu við mjög kalkríkt vatn getur orðið kalkbinding og uppsöfnun í hjólalegum og öðrum hreyfanlegum hlutum. Í þessu tilviki er hægt að þrifa vöruna með kalkhreinsiefni og smyrja síðan með smurólíu.

Warning



Þegar varan er notuð í mjög klóruðu umhverfi getur of mikil tæring átt sér stað og ábyrgðin fellur úr gildi.

Warning



Athugið að ef ramminn er boginn eða brotinn má ekki endurvinna vöruna heldur þarf að skipta henni út.

Geymsla Við mælum með geymslu á þurrum stað. **Flutningsráðleggingar** Varan á að flytja á stöðugan og öruggan hátt án áhættu á skyndilegum eða hættulegum hreyfingum meðan á flutningi stendur. **Endurnotkun** Varan er hentug til endurnotkunar. Fyrir endurnotkun þarf sem nýr notandi á að taka við vörunni þarf að athuga vöruna samkvæm lið 5. **6. Úrræðaleit**

Vandamál	Mögulegar orsakir	Lausnir
Göngugrindinni er erfitt að stýra eða ýta	Óhreindi milli hjóla og gaffla.	Fjarlægðu óhreindi eða hár á milli hjóla
Bremsurnar virka ekki eða önnur virkar bara	Bremsurnar eru slitnir eða bremsur eru ekki rétt stilltar.	Stilltu bremsurnar. Skiptu um bremsuna ef þörf krefur.
Sætið passar ekki inn þegar göngugrindin er óbrotin.	Læsibúnaðurinn er rangur eða gallaður	Athugaðu hvort læsibúnaðurinn sé í réttri stöðu. Skiptu um ef þörf er á

7. Förgun vörunnar Ekki má farga vörunni með heimilissorpi heldur verður að koma henni á endurvinnslustöð.

8. Ábyrgð Mobilex býður upp á 2 ára ábyrgð á tjóni sem stafar af mistökum í framleiðslu eða efnisvillum. Ábyrgðin gildir ekki af ófyrirseðri viðgerð eða notkun vörunnar. Hlutar sem verða fyrir eðlilegu sliti falla ekki undir ábyrgðina, nema slit sé af völdum framleiðslugalla. Ef vörubreytingar eru gerðar án skriflegs samþykkis okkar mun CE- merkingin og vöruábyrgðin ekki gilda. Ef um skemmdir á vöru er að ræða sem falla undir þessa ábyrgð, vinsamlegast látið söluaðilann eða Mobilex A/S vita beint. Ábyrgðin nær ekki til flutningskostnaðar og felur ekki í sér bætur vegna líkamstjóns eða ónotunar á vörunni við viðgerð. Ábyrgðin nær ekki til tjóns vegna þess að notendahandbókinni er ekki fylgt.