



Eirberg



“We love easy transfers”

**RoMedic**<sup>®</sup>

A company in the Handicare Group

## Auto slide snúningssegl fyrir bílsæti.

Auto slide er notað til að auðvelda snúning þegar farið er inn/út úr bíl. Snúningsseglið samanstendur af tveimur hlutum sem renna auðveldlega þegar þeir eru lagðir saman. Á snúningsseglinu er band sem fest er fyrir aftan bílsæti og tvö handföng fyrir aðstoðarmann.

Leggið Auto slide í bílsætið stama efnið á minni hlutanum snýr niður. Festið bandið utan um sætiðbak og herðið vel.

ATH : Notið alltaf öryggisbelti þegar setið er á Auto slide.

Notkun: Notandi sest á Auto slide og lyftir/snýr fótum til að auðvelda sér að komast inn/út úr bílnum.

Aðstoðarmaður getur hjálpað til með því að toga í handfangið .

Auto slide má þvo í þvottavél við 70°C , notið ekki mýkingarefni Hengið til þerris eða þurrkið á vægum hita.Yfirfarið Autoslide reglulega: Togið í handföng og festiband til að kanna hvort saumar haldi . Berið Auto slide saman við nýtt til að sjá hvort rennslið hefur versnað.

Framleiðandi : Handicare Svíþjóð



Seljandi: Eirberg ehf. Stórhöfða 25, 110 Reykjavík. Sími 569 3100. Vefang: [www.eirberg.is](http://www.eirberg.is)