

## Tæknileg lýsing (Tækniupplýsingar geta breyst og gilda því aðeins um þessa vöru)

Mál		Monaco	Cannes	Nizza
Sethæð (stillanleg)	cm	41.5-56.5	41.5-56.5	41.5-56.5
Sethæð stillt	cm	50.0	50.0	50,0
Hæð með örmum	cm	-----	60.50-75.5	-----
Hæð með örmum	cm	-----	-----	83,0-98,0
Set breidd (LxB)	cm	40.0x40.0	40.0x4.,0	40.0x40.0
Minnsti flötur fyrir stól	cm	45.0x45.0	45.0x53.0	51.0x53.0
Sethæð stillanleg í		7 sinnum 25 mm	7 sinnum. 25 mm	7 sinnum 25 mm
Þyngd stóls	kg	2.4 / 2.8	3.2 / 3.6	4.4 / 4.8
Notendabyngd	kg	<b>max. 130</b>	<b>max. 130</b>	<b>max. 130</b>

## Varahlutir

Vöru: Nr.	Heiti	Remarks/Colour
463.90.20	Armar (með splittum)	Plastic, white
463.90.30	Bak (með splittum)	Plastic, white
463.90.40	Festi ró (fyrir fót)	Plastic, white
201.90.98	Splitti fyrir fætur (hæðarstilling)	Round, white
463.90.60	Splitti fyrir arma og bak	Square, red
442.00.25	Plug for tube	Plastic, black
456.00.25	Leg tip	Plastic, white

## Accessory

284.00.30	Pouch with shower aid	Textile fabric, black
-----------	-----------------------	-----------------------

## Endurnotkun.

Þessi vara er ætluð til endurnotkunar. Endurnotkun takmarkast af ástandi á hverjum tíma. Áður en hægt er að endurnýta stólinn þarf að yfirfara ástand hans og tryggja að allir hlutar stólsins séu í góðu ástandi og að allir fylgihlutir séu til staðar. ATH! Endurnotkun skal vera í samræmi við (MMD) reglur um Medical Device Directive.

## Ábyrgð

Ábyrgðartími vörunnar er 24 mánuðir frá söludegi.

Ábyrgð nær þó ekki til hluta sem kunna að skemmast/bila vegna rangrar norkunar



## Notkunarleiðbeiningar

BA No.: 02.08.076/12-09)



REBOTEK Rehabilitationsmittel GmbH  
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
<http://www.rebotech.de>  
Dreifing á Íslandi  
Öryggismiðstöðin  
Askalind 1  
201 Kópavogi  
S:570 2400  
Netfang: [oryggi@oryggi.is](mailto:oryggi@oryggi.is)

Serial No. / Product



## Sturtustólar

Sturtustóll  
"Monaco"  
Art. No.: 363.00.10



Sturtustóll  
"Cannes"  
Art. No.: 363.00.20



Sturtustóll  
"Nizza"  
Art. No.: 363.00.30



## Notkun

Sturtustólar eru ætlaðir til notkunar innandyrna og á sléttu og stöðugu undirlagi eða í sturtuklefum. Stólarnir eru ekki ætlaðir til langtíma setu.


## Til upplýsinga.

Stóllinn er samsettur og hægt er að taka hann sundur til að auðvelda flutning á honum ef notandi vill nota hann á fleiri en einum stað

## Fyrsta notkun




Stóllinn er ekki afhentur tilbúin til notkunar. Fyrst þarf að setja stóllinn saman fyrir fyrstu notkun. Kynnið ykkur leiðbeiningar um samsetningu áður en stóllinn er settur saman

ATH! Í leiðbeiningum eru upplýsingar fyrir fleiri en eina gerð af stól  
Notið leiðbeiningar í samræmi við þann stól sem við á hverju sinni.

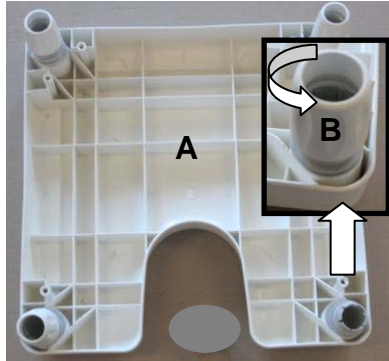


### Sturtustóll Monaco

- Setjið setuna (A) á sléttan flöt
- Losið festiró (B) snúið rangsælis
- Setjið stólfótinn í festirónna og látið hana setjast alla leið niður í botn
- Snúið stólfæti þannig að splitti (F) vísi út frá sætishliðinni gætið að allir fætur festast á sama hátt.
- Herðið festiró (B) snúið réttisælis þar til hún er vel hert.
- Festið hina 3 fæturna á sama hátt
- Togið splitti (F) út og styllið hæð stólsins með því að draga innra rörið út.
- Setjið splittið aftur í það gat sem hentar sethæð
- **VARÚÐ ! Setjið splittið alla leið og gætið þess að það sitji vel og endinn sjáist í gegnum rörið (C)**
- **Stillið hina 3 fæturna á sama hátt**
- **Eftir samsetningu athugið stöðugleika stólsins**
- 

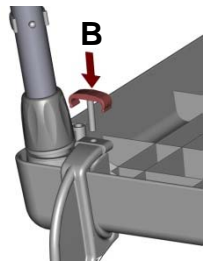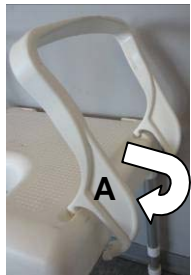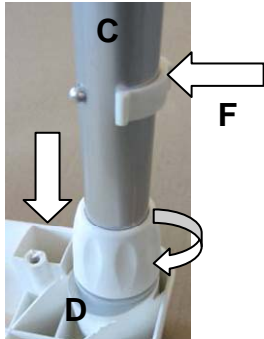

### Sturtustóll Cannes

Til viðbótar við sturtustól Monaco.  
Þrýstið örmum (A) þétt í raufina á setunni og ýtið  
Til hliðar þar til þeir hitta í sæti undir setu  
ýtið armi lítilleg til þar til festisplitti passar í  
Gatið og festið með splitti (B)  
**VARÚÐ! Þrýstið splittinu alla leið þar til það smellur fast**

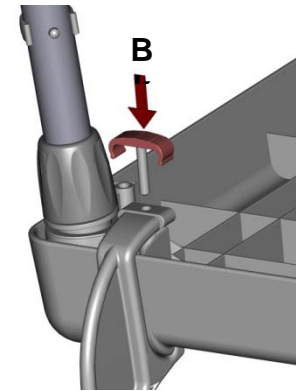

### Sturtustóll Nizza

Til viðbótar við gerð Monaco.  
Armar eins og á stól Cannes  
Þrýstið bakinu að setunni og ýtið aftur  
(A) og setjið splitti undir setunni (B)  
Festið splittið þar til það smellur fast.

**ATH! Gangið úr skugga um að splittið hafi farið alla leið og sé örugglega fast.**

## Þrif og sótthreinsun

Stóllinn má þvo og sótthreinsa en varist að nota sterk upplausnarefni og gætið þess að fylgja leiðbeiningum er varða þvottaefni og sótthreinsiefni.  
Létt skolon eftir notkun er auðveldsasta leiðin til að halda stólum hreinum.

## Viðhald

Reglubundið viðhald er óþarft en þó ætti á hverjum tíma að fylgjast með ástandi stólsins og ef grunur er um bilun þá að hafa samband við seljanda eða koma með stóllinn til yfirferðar og lagfæringar.

## Öryggi !

- **Notið stóllinn aðeins fyrir uppgefna notenda þyngd 130 KG**



### Öryggisatriði !

- **Hafið eftirfarandi í huga við notkun stólsins.**
- Athugið að stóllinn sé stöðugur og á öruggu undirlagi
- Athugið að öllum atriðum um samsetningu stólsins sé lokið og samsetningin sé gallalaus
- Gætið þess að armar og bak hafi verið fest á viðeigandi hátt
- Hallið ykkur ekki of langt út fyrir stóllinn