


Sole seglalyftari



Styttar notkunarleiðbeiningar

1. Komið segli fyrir undir einstaklingi. Gætið þess að seglið nái undir læri hans og höfuðstuðningur nái upp fyrir höfuð.
2. Færið lyftarann að einstaklingi. Aukið bilið milli undirstöðuarma með fjarstýringu ef þörf krefur.
3. Festið seglið á lyftarann með því að setja lykkjuna fyrir ofan krókinn á lyftiarminum þegar hann er í opinni stöðu. Togið lykkjuna niður þannig að krókurinn lokist.
4. Notið fjarstýringuna til að lyfta einstaklingnum.
5. Færið lyftarann til þangað sem ætlað er (úr rúmi í stól/Wc eða öfugt). Gætið að fótum og höndum einstaklings.
6. Losið lykkjur seglsins.
7. Fjarlægjið lyftarann. Gangið úr skugga um að fætur og líkami einstaklings séu ekki fyrir.
8. Fjarlægjið segl eftir notkun.

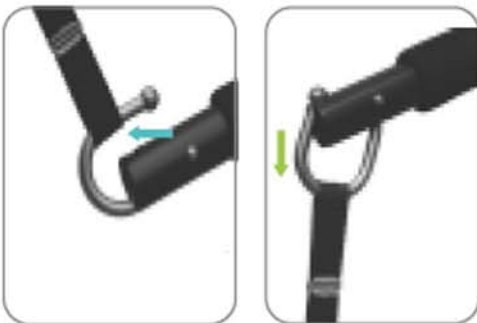

Festið beltið með því að setja lykkjuna fyrir ofan krókinn þegar hann er í opinni stöðu. Togið lykkjuna niður þannig að krókurinn lokist.

ATH! Upplýsingar sem hafa ber í huga áður en lyftarinn er tekin í notkun er að finna í ítarlegum leiðbeiningum sem fylgir lyftaranum.

Festið beltið með því að setja lykkjuna fyrir ofan krókinn þegar hann er í opinni stöðu. Togið lykkjuna niður þannig að krókurinn lokist.



Lyftiarmur

Handföng
Fjarstýring

Stjórnborð með rafhlöðum

Mastur

Mótor

Hlíf fyrir rafbúnað

Undirstell