


Viking M, L, XL

Flýti handbók

Íslenska

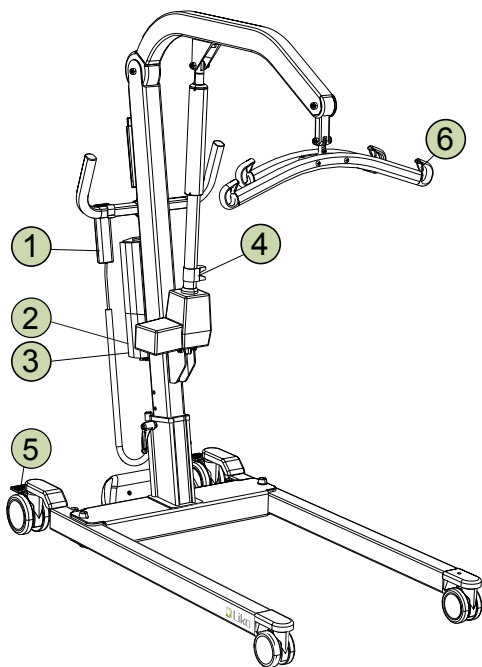

Öryggis leiðbeiningar

- Lesið leiðbeiningarnar áður en lyftan eða fylgihlutir hennar eru notaðir.
- Skipuleggið lyftingar ferlið vandlega.
- Verið viss um að lykkjurnar á seglinu séu rétt festar við krókana á herðatrénu áður en sjúklingnum er lyft.

• Mesta þyngd:

Viking M 205 kg (450 lbs.)

Viking L 250 kg (550 lbs.)


Viking XL 300 kg (660 lbs.)

Til að lyfta hámarksþyngd þurfa allir aukahlutir sem eru notaðir að vera fyrir sömu eða meiri þyngd.

Áriðandi!


Þessi flýti leiðbeiningar koma ekki í staðin fyrir notenda handbókina sem hægt er að nálgast vef Liko. www.liko.com.

1 Stjórtæki

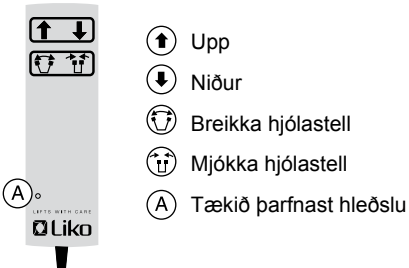


2 Neyðarstop


Virkjað:

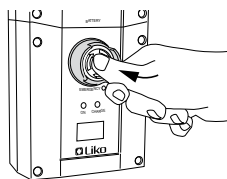

Tekið af:

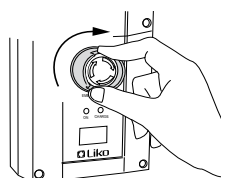


3 Neyðarslökun með rafmagni

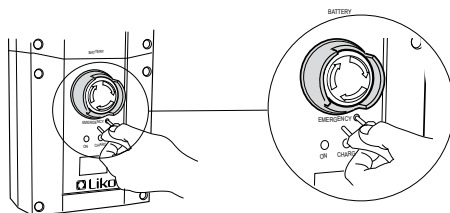


⚠ Notið ekki oddhvassan hlut til að ýta á takkann fyrir neyðarslökun því það getur skemmt stjórnboxið!

4 Handvirk neyðarslökun

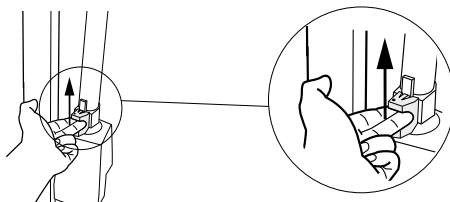


5 Setja hjól í bremsu

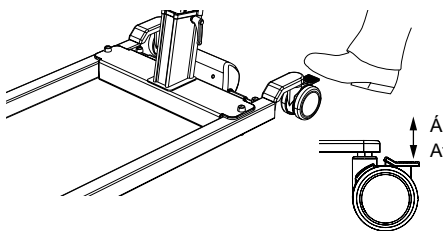


6 Öryggislás


Viking M, L

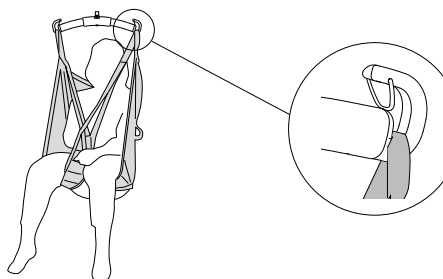

Viking XL

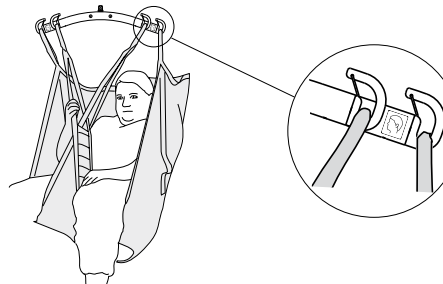

Hleðsla

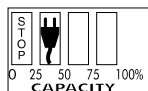

Hlaða strax!



Fullhlaðin

- Hlaðið lyftaran reglulega eftir notkun.
- Ekki er hægt að nota lyftarann á meðan hlaðið er
- Verið viss um að neyðarprofi sé ekki virkjaður meðan lyftarinn er hlaðinn.

Vinnuvistfræði

- Ekki lyfta með höndum-látið lyftarann vinna verkið.
- Verið róleg. Vinnið rólega og skipulega.
- Ekki ofreyna bakið! Vinnið í uppréttri stöðu og verið bein í baki.
- Stílið rúmið í rétta vinnuhæð.
- Minnið vogaraflið og standið nálægt einstaklingnum og lyftunni.

Þvottur

Þrifið lyftarann með rakri tusku og sóttþreinsandi vökva þegar þörf er á.

Einföld bilanaleit

Athugið hvort:

- neyðarrof sé virkjaður
- vanti hleðslu
- stjórtækið sé örugglega tengt.

Aðrar handbækur

Aðrar handbækur um Liko lyftara og segl er hægt að nálgast á vef Liko. www.liko.com.

© Copyright Liko AB



LIFTS WITH CARE

Liko

www.liko.com

Liko Distributor in UK:

Liko (UK) Ltd.

Phone: +44 (0) 1453 827272

Fax: +44 (0) 1453 828844

info@liko.co.uk

National Distributor in USA and Canada:

Liko North America

Phone: 508-553-3993, 1-888-545-6671

Fax: 508-528-6642

info@liko.com