





icepharma

Bætt líðan • Betra líf

Leiðbeiningar fyrir Snúningslak Easy Turn

Setjið lakið ofarleg í rúmið (5-10 cm inn undir koddann), þannig að líkaminn frá öxlum niður á mið læri liggi á snúningsfletinum. Hliðarnar á lakinu fara undir dýnuna þannig að öryggiskantar (stamt svæði) séu báðum megin. Mikilvægt öryggisatriði, þannig að einstaklingur renni ekki til.

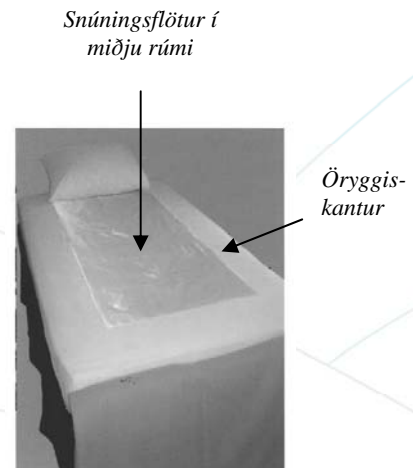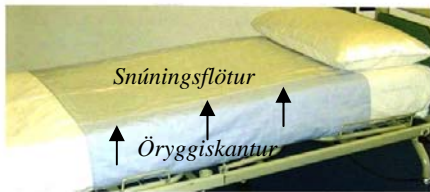

Snúningslök Easy Turn til að auðvelda snúning í rúmi.
Fánleg í mismunandi stærðum:

Vörunúmer	Stærð	Stærð snúningsflatar
4500-0010	110 x 200 cm þverlak	60 x 60 cm
4500-0020	110 x 200 cm þverlak	70 x 70 cm
4500-0040	200 x 85 cm rúmlak með svuntu	60 x 150 cm

Allar gerðir Easy Turn snúninglaka hafa öndunareiginleika og mega vera stöðugt í rúminu.

Efni:

Snúningsflötur 100% polyester.
Lak 35% polyester og 65% bómull

Þvottaleiðbeiningar:

Snúningslökin má þvo við 90°C og það má setja þau í þurrkara.
Má strauja við max. 150°, við það verður snúningsflöturinn betri.
Forðist oddhvassa hluti nálægt laki.