


FOREARM CRUTCH  
Art. 315021

Notendahandbók

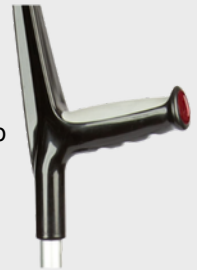

Mjúkt grip



Stöðugur framhandleggsstuðningur



Varanleg hönnun



**1. Inngangur** Þakka þér fyrir að kaupa hágæða Mobilex vöru. Þessar notkunarleiðbeiningar innihalda lýsingu og mikilvægar upplýsingar um notkun lækningatækisins. Það er mikilvægt að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað. Skoðuðu vel öryggisleiðbeiningar og fylgdu þeim. Mobilex er stöðugt að reyna að bæta og uppfæra vörur sínar. Þess vegna áskiljum við okkur rétt til að auðvelda notkun á réttan hátt.

### Fyrirhuguð notkun tækisins.

Framhandleggshækjur eru hannaðar til notkunar fyrir fólk með takmarkaða hreyfigetu. Þau eru notuð sem bæklunarhjálpi til að styðja jafnvægi, ganga, sitja og standa. Varan er hönnuð til notkunar innanhúss og utan.

### Vísendingar

Varan er ætluð öldruðum, fólki með takmarkaði hreyfigetu í mjóhrygg, hnjám eða mjöðmum og öllum þeir sem eiga í erfiðleikum með að standa og ganga án viðbótarstuðnings. Notandinn þarf að vera fær um að halda jafnvægi standandi og sitjandi, auk þess að hafa getu til að hreyfa sig sjálfur.

### Frábendingar

Ekki nota vöruna ef þú átt í vandræðum með jafnvægi eða skynjun eða ef þú ert með ófullnægjandi vöðvastyrk til að halda þér standandi. Val á bæklunartæki sem er aðlagað ástandi og þörfum sjúklings verður alltaf að vera gert af sérfræðingi eða sjúkráþjálfara.

### Notkunarsvæði

Vöruna er hægt að nota á í heimahúsi, hjúkrunarheimili og sjúkrahúsum

### Læknisatvik og óæskileg atvik

Ef upp koma óæskileg atvik sem tengjast tækinu vinsamlegast hafðu samband við söluaðila eða framleiðanda.

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: Telefax: Email:	+45 87 93 22 20 +45 87 93 17 77 info@mobilex.dk
Rekstrarvörur Réttarhálsi 2 110 rvk	Sími email	5206666 sala@rv.is

## 2. Öryggiskröfur

- Gakktu úr skugga um að þessi handbók hafi verið lesin af öllum fyrir notkun.
- Framleiðandi tekur enga ábyrgð á tjóni og/eða meiðslum sem hýst af því að fylgja ekki notkunarleiðbeiningunum.
- Notaðu vöruna einungis í gallalusu ástandi
- Ef gallar eða villur finnast verður þú tafarlaust að hætta að nota Tækið og hafa samband við söluaðila
- Fylgdu öllum ráðleggingum og viðvörðunum framleiðanda
- Vertu meðvituð um upplýsingarnar á vörumerkinu
- Notaðu vöruna aðeins í þeim tilgangi sem lýst er.
- Ekki klifra á vörunni.
- Forðastu að gera uppbyggilegar breytingar á tækinu nema þú hafir Samþykki framleiðandan (skriflegt)
- Tækið og pokann má ekki hlaða með meiri þyngd en tilgreint er í tæknigögnum
- Varan ætti að vera alveg samsett, hæðarstillt og fest fyrir notkun
- Farðu varlega þegar þú setur saman eða stillir hluta tækisins.
- Athugaðu alltaf hvort varan sé stíf og vel hert fyrir hverju notkun.
- Gætið ytrustu varúðar við framhandleggshækjuna á stigum og hálfu
- Þrífðu vöruna reglulega
- Athugaðu alltaf stöðugleika framhandleggs áður en hækjan er notuð
- Gúmmifæturnir mega ekki vera óhóflega slitnir.

### Varahlutir sem fylgja

Tækið er afhent í óskju. Innihald pakkans er:

- ✓ 1 hækjan ;
- ✓ 1 Notendahandbók;

### Bráðabirgðaathugun

Athugaðu innihald kassans með listanum hér að ofan. Ef þú uppgötvar á þessu stigi að hluta vantar eða er skemmdur, hafðu strax samband við birgjann þinn.

## 3. Lýsing

### Vörulýsing

Framhandleggshækjan gefur þér öryggistilfinningu og liggur mjög vel í hendinni þótt sé handfanginu sem er úr mjúku handfangi. Þar sem framhandleggshækjan er stillanleg á lengd er hægt að stilla hana sem hentar hæð notendans.

### Lýsing á samsetningu

Þetta tæki þarf ekki samsetningu.

### Aðgerðarlýsing

#### Lengdar stilling

Til að stilla lengd framhandleggshækjunnar skaltu fyrst losa festihringinn með því að snúa honum ransælis. Einu sinni þar til hringurinn er laus, ýttu alveg á læsingarhnappinn og renndu neðra rörinu þannig að hnappurinn smelli í hol sem samsvarar í æskilega lengd. Herðið svo festihringinn aftur.

**Viðvörðun!** Eftir að stillingu er lokið of gyrrir notkun skal ganga úr skugga um að festihringurinn sé hertur þannig að einingin sé stöðug. Ef ekki er farið eftir þessu getur það leitt til meiðsla.

## Accessories

There are no accessories provided for this device.

## 4. Technical data

<b>Framhandleggshækja</b>	<b>Art. 315021</b>
Lengd	93-122 cm
Þyngd	0,52 kg
Hámarksþyngd notenda	150 kg

### Product label



Þýðing tákanna			
	QR-code link to homepage		Manufacturer
	CE marked product		Item Number
	Observe the user manual		Max load
	Medical Device		Manufacturing date
	To be used indoor and outdoor		Serial no

Sýnishorn af merkingu vörunnar

**5. Umhirða og viðhald** Venjuleg óhreinindi má fjarlægja með venjulegum hreinsiefnum og svampi eða mjúkri tusku. Athugaðu tiltekna vöruupplýsingar og notaðu aðeins hreinsiefni sem henta til hreinsunar. Til sótthreinsunar skal aðeins nota sótthreinsiefni sem eru vottuð til notkunar á lækningatækjum sem fánleg eru á staðnum. Þrátt fyrir trausta byggingu og notkun er varan háð sliti. Það er því mælt með því að athuga vöruna með reglulegu millibili af fagaðila. Við mælum með eftirfarandi:

- ✓ Þrif og sótthreinsun vörunnar
- ✓ Athugaðu grindina fyrir beygjur, skemmdir, slit eða tæringu
- ✓ Athugaðu slithluti og skiptu um þá ef þörf krefur
- ✓ Alemenn endurspenning á íhlutum.

**Ráðlagður endingartími:** Venjulega 10 ár, fer eftir notkun.

**Geymsla:** Við mælum með geymslu á þurrum stað við hitastig yfir 0°C.

### Flutningur

Tækið ætti að flytja á stöðugan og öruggan hátt án hættu á skyndilegum eða hættulegum hreyfingum við flutning.

### Endurnotkun

Varan er hentug til endurnotkunar. Áður en nýr notandi tekur við vörunni þarf að athuga tækið á tæknistigi og sótthreinsað reglulega.

## 6. Algengustu vandamál og lausnir

Vandamál	mögulegar orsakir	Lausnir
Þegar hækjan er notuð þá ískrar í henni	Ekki nógu vel sett saman og hert á skrúfum	Herðið á skrúfum

## 7. Förgun vörunnar

Ekki má farga vörunni með heimilissorpi og verður að koma henni á endurvinnslustöð.

## 8. Ábyrgðarskilmálar

Mobilex veitir 2 ára ábyrgð á tjóni sem stafar af mistökum í framleiðslu eða efnisvillum. Ábyrgðin gildir ekki með ófyrirséðri viðgerð eða notkun vörunnar. Hlutar sem verða fyrir eðlilegu sliti falla ekki undir ábyrgð, nema slit sé af völdum framleiðslugalla. Ef vörubreytingar eru gerðar án skriflegs samþykkis framleiðanda ef það er gert þá fellur CE-merkingin og vöruábyrgð úr gildi. Verði vörutjón sem falla undir þessa ábyrgð, vinsamlega látið söluaðila eða Mobilex vita strax. Ábyrgðin nær ekki til flutningskostnaðar og leiða ekki til bóta vegna líkamstjóns eða ónotunar vörunnar meðan á viðgerð stendur. Ábyrgðin nær ekki til skemmdavegna þess að notendahandbókinni er ekki fylgt.

## 9. Samræmisýfirlýsing

Tækið hefur staðist samræmismat í samræmi við reglugerð ESB: MDR 2017/745 varðandi lækningatæki og er CE merkt. Samræmisýfirlýsing hefur verið gefin út fyrir tækið og fæst á :

[mobilex.dk/medias/2021-11/ce\\_albuestok\\_med\\_bloedt\\_haandstoette\\_\\_315021\\_\\_8917.pdf](http://mobilex.dk/medias/2021-11/ce_albuestok_med_bloedt_haandstoette__315021__8917.pdf)

eða með því að skanna QR kóðann hér til hægri.

