



## Invacare Dacapo rúmdýnur

### Að nota Dacapo dýnur

#### **Dýnan sett í rúmið**

Á dýnunni er skýr merking um hvor hliðin á að snúa upp  
ATH: Þegar skipt er um áklæði er mikilvægt að rétt hlið snúi upp.

#### **Lámærks hæð**

Þegar hliðarrim rúmsins er uppi er mikilvægt að það sé að lámærki 22 cm frá efribrún þess niður á dýnuna, en þegar hliðarrimin er niðri á það að vera 2 cm neðar en efri kantur dýnnar.

#### **Handföng**

Handföngin á dýnunni má ekki nota til að færa sjúkling til. Handföngin eru eingöngu til að lyfta dýnunni sjálfri og þola ekki annað álag.

#### **Dacapo® Comfort og Comfort Plus**

*Dacapo Comfort* er standard dýna sem uppfyllir allar grunnþarfir notenda. Svampurinn er úr efninu „*Waterlily miljðskum*“ 53 kg/m<sup>3</sup>, en þessi mikli þéttleiki gefur góða hvíld. Uppbygging efnisins er þannig að það loftar vel um líkaman. Dýnan lagar sig vel að líkamanum og gefur þægilegan stuðning. Efri hluti dýnnar er mótaður í ferninga sem hver um sig getur hreyfst óháður hinum. Þessi formun dýnnar gefur notendum hámarks hvíld og slökun.

12 cm „*Waterlily miljðskum*“ , 53kg/m<sup>3</sup> (Comfort)

14 cm „*Waterlily miljðskum*“ , 53kg/m<sup>3</sup> (Comfort Plus)

Áætluð hámarksþyngd: 130 kg.

### Umhirða og þrif

#### **Regluleg þrif**

*Dacapo*® áklæði er hægt að þrifa með hefðbundnum þvottaefnum. Einnig má þvo áklæðið við 95° og þurrka í þurrkara. Ekki nota mýkingarefni.

#### **Geymsla**

*Dacapo*® dýnur á að geyma á þurrum og frostfríum stað

#### **Brunatefjandi**

*Dacapo*® dýnur eru eldþolnar og eru viðurkenndar samkvæmt EN 597-1 (sígarettupróf) og EN 597-2 (logapróf).

**Trönuhrauni 8**

**220 Hafnarfjörður**

**Sími 565 2885 / Fax 565 1423**

**stod@stod.is / www.stod.is**