

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

Výroba stehenní protézy se systémem **ProSeal**



Technické informace

Co je ProSeal systém?

Jednoduchý systém pro utěsnění TF lůžek v proximální oblasti. Umožňuje využít maximální plochu podtlaku pro zvýšení ulpění lůžka na pahýlu.

Skládá se ze dvou komponentů:

- kroužek ProSeal 452A1
- liner ProSeal SIL 6Y81

Tyto komponenty se kombinují s pasivním podtlakem (automatický ventil 21Y14) nebo aktivním podtlakem (Harmony e-pulse 4R148).

Postup výroby:

Zkušební lůžko lze získat dvěma způsoby:

1. TF – design

Obvodové míry měřte přes liner ProSeal SIL 6Y81. Doporučujeme tvar podélně oválný (Sit-cast) nebo anatomický. Liner při měření provádí dostatečnou kompresi měkkých tkání, proto je vhodné objednávat s redukcí 0 %. Alternativně lze provést měření bez lineru (přímo na pahýlu) - při této metodě doporučujeme redukcí 3%. Zatím není možné provést výběr kroužku přímo prostřednictvím softwaru, proto je třeba napsat požadavek na natažení lůžka s těsnícím kroužkem do zprávy pro výrobce.

2. sádrování

Sádruje se vždy přes liner ProSeal SIL 6Y81. Sádrový negativ lze provést z ruky nebo za pomoci sádrovacího stojanu Sit-cast.

Úprava sádrového pozitivu:

- jednotně zredukujte obvody i délku o přibližně 2 %
- proximálně v oblasti, kde bude umístěn těsnící kroužek, zredukujte ještě o 10 mm
- věnujte pozornost plynulosti přechodů

Příprava zkušební lůžka:

- na modelu připravte plochu pro umístění ventilu (OBR 1)
- umístěte dummy pro těsnící kroužek tak, aby hrot značky směřoval k distálnímu konci (OBR 2)
- dummy musí přesně přiléhat k povrchu sádrového modelu (OBR 3)
- natáhněte zkušební lůžko běžnou technikou hlubokého tažení (OBR 3)
- po vychladnutí a sejmutí lůžka z modelu vyjměte dummy z lůžka

Vlepení těsnícího kroužku do lůžka:

- pro usnadnění montáže kroužku doporučujeme nejdříve nalepit těsnící silikonový kroužek na kroužek fixační (OBR 4)
- pro zlepšení přilnavosti potřete silikonový těsnící kroužek Silicone Primer (83L1) nebo 3M Scotch-Mount (4298) (OBR 5)



OBR 1



OBR 2



OBR 3




OBR 4




OBR 5



OBR 6

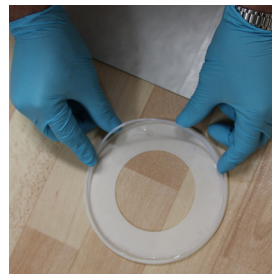

OBR 7

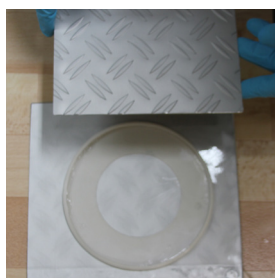

OBR 8

- do drážky v silikonovém těsnícím kroužku naneste tenkou vrstvu silikonového tmelu (616H46) a vložte fixační kroužek (OBR 6 a 7)
- doporučujeme zatížit mezi dvě ocelové desky a nechat přes noc vytvrdit (OBR 8)
- alternativně lze vlepít fixační kroužek do silikonového kroužku pomocí vteřinového lepidla (použijte pouze bodové přichycení)
- poté vlepíte oba kroužky společně do drážky v lůžku:
 - nejdříve naneste tenkou vrstvu Silicon Primer (83L1) nebo 3M Scotch-Mount (4298) jak do drážky v lůžku tak na těsnící kroužek (OBR 9 a 10)
 - naneste do drážky vrstvu silikonového tmelu 616H46 (OBR 11)
 - vložte těsnící kroužek do drážky v lůžku (OBR 12)
 - označení velikosti musí být na vrchu (OBR 13)

Nasazení lůžka na pahýl:

- nejdříve navlečte liner ProSeal SIL 6Y81 hladkou stranou navrch
- poté je možné nastříkat kroužek natahovacím sprejem (640F18) nebo pro lepší komfort gelem (633S2)
- nyní je možné do lůžka nastoupit a uzavřít ventil
- jde-li obouvání ztuhla, lze využít obouvací pomůcku Easy-Proth (OC1560)

Definitivní lůžko:

- pro vlepění kroužku postupujte stejně jako při lepení do zkušební lůžka
- ProSeal systém lze použít jak pro rámová lůžka, tak pro lůžka laminátová
- u laminátových lůžek doporučujeme použít jako první vrstvu ThermoLyn PETG Clear (616T183) pro zajištění maximální těsnosti lůžka OBR14 a 15



OBR 9




OBR 10



OBR 11



OBR 12

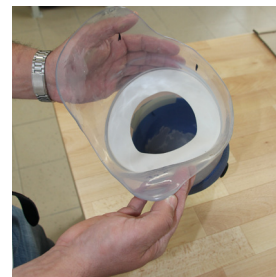

OBR 13



OBR 14




OBR 15



ProSeal

Proximální těsnění podtlakových lůžek

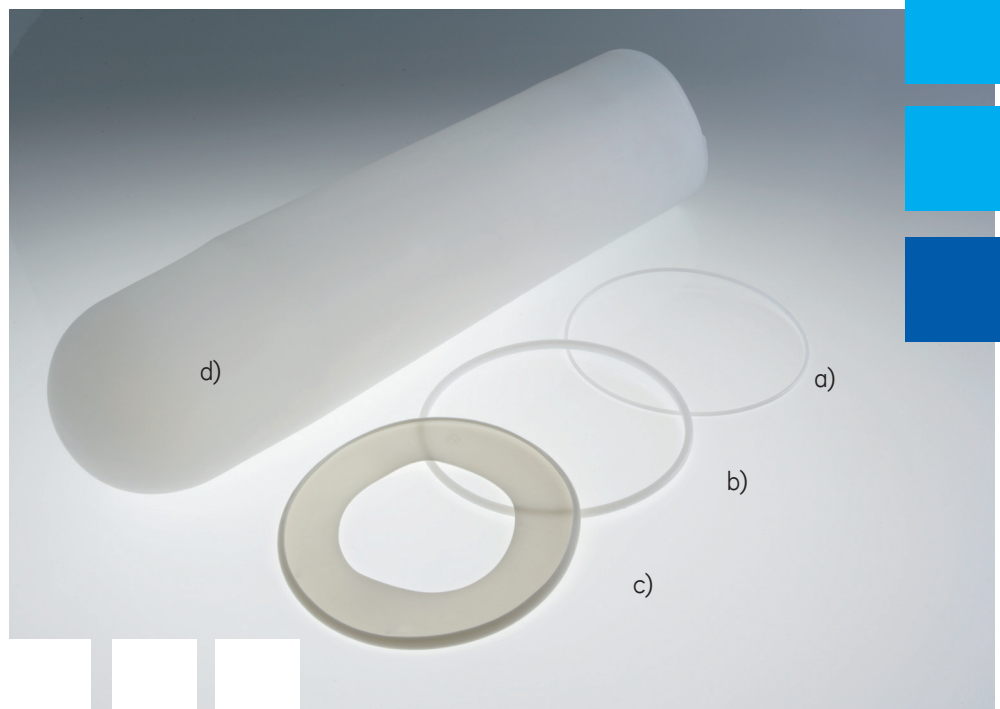

Kroužek ProSeal 452A1=*

- a) Flexibilní fixační kroužek
- b) Laminační pomůcka
- c) Těsnící silikonový kroužek

Lze použít i v případě exartikulace v kolenním kloubu, amputací v bérce, v kombinaci s různými podtlakovými systémy.

ProSeal SIL Liner 6Y81=*

- d) Silikonový liner 3mm
 - nepřilnavý povrch na vnějšíku
 - hebký povrch na vnitřku

Kroužek ProSeal 452A1=*

Silikonový těsnící kroužek se zvláštním fixačním kroužkem a laminační pomůckou pro vytvoření drážky v pahýlovém lůžku.

Velikosti (obvod 30-50mm pod perineem)

320	400	480	560
340	420	500	580
360	440	520	600
380	460	540	

Silikonový liner ProSeal 6Y81=*

Silikonový liner, tl. stěny 3mm, bez potahu, nepřilnavá povrchová úprava, hebký vnitřní povrch.

Velikosti (obvod 40mm nad distálním koncem pahýlu)

280	340	400	500
300	360	420	550
320	380	450	

Doporučeno používat s jednocestným ventilem **PushValve 21Y14**

Ortotik-protetik:



Martin Skudla
+420 724 513 358
skudla@ottobock.cz

Vedoucí Ortotik-protetik:



Vladan Princ
+420 602 650 553
princ@ottobock.cz

Otto Bock®
QUALITY FOR LIFE

Otto Bock ČR s.r.o.

Protetická 460 · 330 08 Zruč-Senec · Telefon: 377 825 044 · Fax: 377 825 036 · email@ottobock.cz · www.ottobock.cz