

オットーボック装具 取扱手引書

317B20 E-MAG 用 バッテリー

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱手引書をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。また取扱手引書は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【テクニカルデータ】

容量	800mAh
電圧	4.8V
重量	120g
環境温度	-10°C～+50°C
サイズ	1 サイズ



317B20




【製品】

『E-MAG 用バッテリー』は E-MAG 専用のニッケル・金属水酸化充電電池です。それ以外の用途では使用できません。

【製品寿命】

適切な使用方法にて使用し、1年間使用できるようにデザインされています。

【安全性】

 注意	機械部分の破損：機能の変化や喪失による怪我の恐れ ●扱うときは注意しながら作業してください。 ●充電されているか、また機能するか確認してください。 ●機能の喪失や低下が認められた場合、使用をやめ担当の有資格者またはオットーボックに連絡してください。
 注意	不適切なアライメント、組み立てまたは調整：機能の変更または損失によるけがの危険性 ●組み立て、調整、メンテナンス作業は有資格者のみが行うことができます。 ●アライメント、組み立て、調整の説明書を守ってください。
 注意	本製品を不適切な環境条件にさらすこと：不適切な取り扱いによる損傷、脆性または破壊 ●結露が起こるような湿気状態の場所や液体に製品をさらさないでください。 ●研磨剤（砂、埃など）との接触は避けてください。 ●本製品を -10°C以下、または +60°C以上（例：サウナ、過度の日光、ラジエーターでの乾燥）の環境に置かないでください。

【使用方法】

注 記	バッテリーを充電し続けることは避ける：破損の原因 ●2日以上連続して充電し続けることを避ける
注 記	接点が汚れたり損傷した状態でバッテリーを充電する：充電・バッテリー機能の不足 ●接点が常に清潔で、グリースがないことを確認する。 ●接続部を糸くずの出ない布で定期的に清掃する。 ●鋭利なもので接続部を傷つけないように注意する。
注 記	バッテリーチャージャーの誤動作 ●チャージャーの LED はバッテリー挿入前は点灯しない。

1) 317B20 E-MAG 用バッテリーを 17L20 E-MAG 用バッテリーチャージャーに挿入します。(右図 1)

※空のバッテリーから満充電までは 8-10 時間かかります。
2 つスロットがあり、LED ライトはそれぞれに対応します。

2) 充電終了後、バッテリーを取り出します。

バッテリーを本体に装着する

・バッテリーを装具のバッテリーケースに取り付けます。(右図 2)

バッテリーを本体から取り外す

・バッテリーケースの青いレバーを押すと、バッテリーを取り外すことができます。



【修理】

電子機器部分に損傷が見られたら、製品ごと取り替える必要があります。

【メーカー責任】

オットーボック社はメーカーとして、本手引書で指定された取扱方法に従って製品を使用し、定期的にメンテナンスした場合にのみ、その責任を負います。オットーボック社はまた、本手引書の指示に従って製品の定期的なお手入れと確認を行なっていただくことをお勧めいたします。

お問い合わせ先

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL. 03-6739-4090 (代表) FAX. 03-6739-4097

O-IFU-C-317B20-202407