

ottobock.



exopulse suit.
Pour la spasticité.

Information destinée au grand public

 EXOPULSE®



Découvrez la combinaison

Une simple pression sur un bouton pour des résultats durables.

La spasticité réduit la mobilité chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale (PC), de sclérose en plaques (SEP), de lésions médullaires, ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC), ou souffrant d'autres troubles neurologiques associés à la spasticité et aux douleurs chroniques.

Portée régulièrement, *exopulse suit* aide à améliorer la mobilité, et peut être associée aux traitements médicamenteux en cours ou à la rééducation.

1 heure tous les deux jours – ou selon la fréquence recommandée par le professionnel de santé.

Bénéfices attendus :



Des résultats en 60 minutes

Une réduction des symptômes de la spasticité peut être observée dès la première heure d'utilisation du dispositif.



Une approche personnalisée

Les paramètres de stimulation peuvent être ajustés afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Une solution non-invasive et non-pharmacologique

La combinaison peut être associée aux traitements médicamenteux en cours ou à la rééducation.

Dernières nouveautés.


Nouveau design & nouvelles fonctionnalités.

Découvrez de plus près la combinaison entièrement repensée :

- 1** **Encore plus de précision :** 50 électrodes intégrées dans la combinaison permettant une stimulation ciblée sur les 43 groupes musculaires.
- 2** **Encore plus de confort :** La veste et le pantalon sont fabriqués dans un tissu extensible et respirant alliant confort et praticité.
- 3** **4** **Encore plus de simplicité :** Les unités de contrôle se connectent en Bluetooth à une application dédiée pour un réglage simple et adapté. Quelques clics suffisent !

L'application vous offre encore plus de possibilités :

- Activez, contrôlez et ajustez le programme en toute simplicité.
- Une application intuitive vous permet de personnaliser les réglages de stimulation.

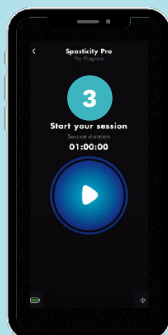

Comment cela fonctionne-t-il ?

Comment la neuromodulation peut aider à soulager la spasticité.

Les 50 électrodes intégrées à la combinaison envoient des signaux électriques légers et imperceptibles, à la fois aux muscles spastiques et aux muscles faibles.

Ils permettent la relaxation des muscles tendus et réactivent les muscles affaiblis afin de rétablir l'équilibre naturel du groupe musculaire et restaurer le fonctionnement normal du corps.

Contre-indications.

NE PAS utiliser *exopulse suit* :

- En association avec des équipements électroniques à haute fréquence ou de maintien en vie
- En association avec des équipements d'ECG

La combinaison peut perturber le fonctionnement des équipements ci-dessus.

Avant toute prescription médicale, une vigilance particulière doit être accordée pour les personnes présentant :

- Maladies cardiaques ou affections associées
- Pathologies malignes (cancer)
- Maladies infectieuses
- Fièvre
- Épilepsie
- Maladies cutanées, éruptions ou autres problèmes dermatologiques
- Utilisation concomitante avec un autre dispositif médical
- Utilisation en association avec un autre traitement médical (par exemple médicamenteux)

i L'utilisation de la combinaison dans les situations décrites ci-dessus peut exposer l'utilisateur à un risque injustifié. Toute utilisation se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Votre parcours avec *exopulse suit*.

Comment *exopulse suit* peut s'intégrer dans votre quotidien ?

1 Découvrez *exopulse suit*

Après avoir établie la prescription médicale, le professionnel de santé vous oriente vers un expert qui fera les réglages adaptés à vos besoins et vous expliquera son utilisation.

2 Intégrez *exopulse suit* dans votre quotidien

Suite à l'essai de la combinaison, il vous sera possible de l'utiliser à la maison, dans votre quotidien, en complément de vos traitements en cours, médicamenteux, de rééducation, et activité physique. Une stimulation d'une heure tous les deux jours est recommandée. Respectez la fréquence d'utilisation préconisée par le prescripteur pour des effets optimum.

3 Consultez régulièrement vos professionnels de santé

Des rendez-vous de suivi sont indispensables afin de vérifier le bon usage de la combinaison et d'évaluer son impact.

4 Optimisez vos traitements en cours

Une stimulation régulière peut aider votre corps à se détendre. Cela peut permettre d'obtenir de meilleurs effets sur vos traitements ou thérapies en cours, kinésithérapie ou activité physique.

Stimulation régulière

À moins d'un avis contraire d'un professionnel de santé, la combinaison doit être portée pendant une heure un jour sur deux. Une stimulation régulière peut aider à maintenir les effets de la combinaison sur la spasticité.

**60
mins**
un jour sur deux

Questions fréquentes.

Y a-t-il des effets secondaires au port de la combinaison ?

Dans de rares cas, les patients portant la combinaison ont rencontré des effets secondaires légers et temporaires, typiquement associés à une stimulation électrique : irritation cutanée mineure, rougeurs superficielles et légères brûlures.

Puis-je poursuivre mes autres traitements pour la spasticité ?

Dans la plupart des cas, oui, mais consultez votre médecin pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec le port de la combinaison. Avec l'accord de votre médecin, *exopulse suit* doit de préférence être utilisée conjointement à une rééducation, à un entraînement ou à une activité physique. Parlez-en avec votre médecin si vous recevez actuellement des injections de toxine botulique ou si vous prenez des médicaments par voie orale contre la spasticité. N'utilisez pas la combinaison si vous êtes équipé d'un dispositif médical implanté.

De quel type de matériau est fait la combinaison ?

La veste et le pantalon sont faits de matières synthétiques lavables, extensibles et confortables (mélange de polyamide et d'élasthanne). Les vêtements ne contiennent ni produits ni fibres d'origine animale.

La combinaison est-elle prise en charge par une assurance ou par la sécurité sociale ?

La combinaison n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Rapprochez-vous de votre Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) pour une demande de prestation de compensation du handicap.



Pour plus d'informations

La combinaison a-t-elle fait l'objet d'études cliniques ?

L'efficacité du dispositif a été évaluée dans plusieurs programmes de recherche clinique, y compris des études indépendantes et parrainées par Ottobock.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de ces études, nous vous invitons à nous contacter. Vous trouverez les informations de contact au dos de la brochure.



Lavable en machine

La veste et le pantalon peuvent être lavés jusqu'à 60 fois en machine.



NE PAS laver les unités de contrôle

Cela pourrait annuler la garantie de deux ans de la combinaison.

Contactez-nous.

La combinaison est actuellement disponible au sein des agences **Ottobock Care**, ainsi que dans certaines cliniques et centres de rééducation.



Pour en savoir plus sur **exopulse suit**
et nous contacter, scannez le QR code.

Avertissement : les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à un public hors des États-Unis. Veuillez noter que les produits qui y sont décrits ne sont pas approuvés par la FDA. Tous les produits et services ne sont pas enregistrés ou disponibles à la vente dans tous les pays.

Fabricant Otto Bock Healthcare.
Ces dispositifs médicaux sont des produit de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé.
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Ottobock France
4, rue de la Réunion, CS 900011 · 91978 Courtaboeuf Cedex
T +33 1 69 18 88 30 · F +33 1 69 07 18 02
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr