

肩関節装具 シリーズ

オモ インモビル (50A10)

オモ インモビル ローテーション (50A11)

オモ インモビル スリング (50A8)

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)



オモ インモビル シリーズ


肩関節装具

外傷や手術後などの肩関節を保持するために、4タイプの製品バリエーションをご用意しています。
疾患や症例に合わせて、バリエーションタイプをお選びいただくことで、装着者に最適なポジションを実現します。

肩関節外転装具

オモ インモビル (50A10)

付属の各種の外転角度設定パーツ(外転ブロック/面ファスナー)を取付けることで、0°/15°/30°/60°/90°の5段階で肩関節外転位保持をすることができます。本体はシンプルでスリムなフレーム構造のため、かさばらず、誰でも扱いやすいデザインとなっています。また、必要に応じて別売の外旋パーツと組み合わせることにより、外転と外旋を合わせて使用することもできます。

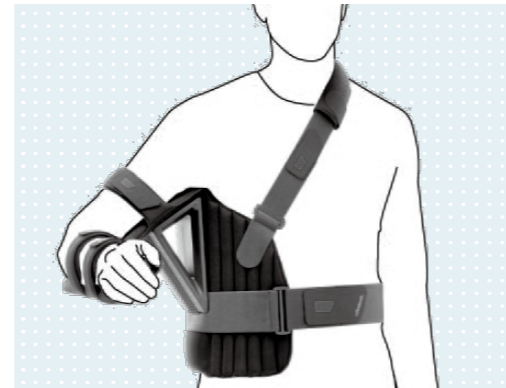

容易な調整機能

・ 本体フレームの設定

オモ インモビル(50A10)の本体フレームは、左右兼用構造となっているため簡単に左右の設定変更をすることができます。

・ 外転角度の調整

2種類の外転ブロックの向きを変えたり、外転ブロックを外して面ファスナーで固定したりすることにより、外転角度の調整が行えます。各パーツは面ファスナーで取付けるため、工具を必要とせずいつでも角度の調整・設定が可能です。この調整方法は、オモ インモビル(50A10)とオモ インモビル ローテーション(50A11)ともに共通です。




外転ブロックの取付

外旋パーツセット

別売のサービスパーツとして肩関節の外旋角度の設定が行える前腕パイプフレームをご用意しています。オモ インモビル(50A10)に肩関節の外転・外旋を組合わせた肢位での保持が可能となるため、症例に応じてご使用いただけます。

発注品番	サイズ
29A222=R-S/M	オモ インモビル 外旋パーツセット 右S/M
29A222=R-L	オモ インモビル 外旋パーツセット 右L
29A222=L-S/M	オモ インモビル 外旋パーツセット 左S/M
29A222=L-L	オモ インモビル 外旋パーツセット 左L

- S、Mは共通サイズです。
- 外旋10°/20°/30°がセットになっています。
- オモ インモビル (50A10) に合わせて外旋用として使用できます。
- オモ インモビルローテーション (50A11) には納品時に梱包されています。

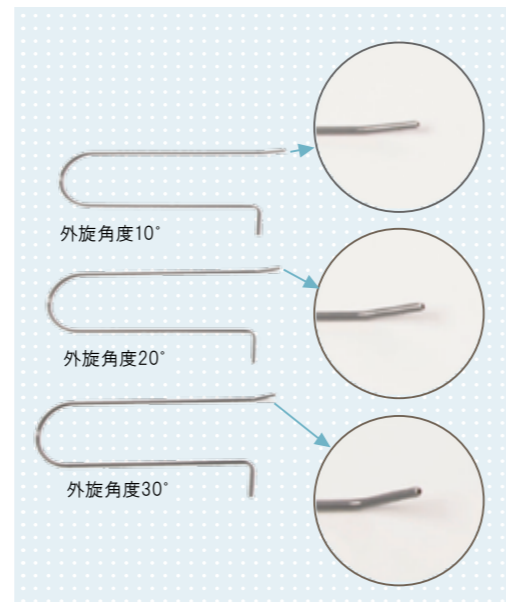

肩関節外転・外旋装具

オモ インモビル ローテーション (50A11)

本製品には、肩関節の外旋位を調整するための前腕部のパイプフレーム(外旋パーツセット)が付属しています。そのため、外転角度0°/15°/30°/60°/90°および外旋角度0°/10°/20°/30°の範囲で、肩関節の外転と外旋の角度を組合わせた保持が可能です。



・ 外旋角度の調整

オモ インモビル ローテーション(50A11)の外旋位の調整は、前腕部のパイプフレームを交換して行います。オモ インモビル(50A10)に、別売りの外旋パーツセットを取付けて、外旋位保持の機能を追加することもできます。



外旋パーツの取付

肩関節内旋装具

オモ インモビル スリング (50A8)

前腕を体幹前面で保持し(肩関節内旋位)、上肢を懸垂します。一般的なスリングに比べ、腰ベルトが付属しているため、上肢を体幹に固定し、安定した肢位で保持することができます。



肩関節軽度外転装具

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)

オモ インモビル スリング(50A8)に外転パッド(外転枕)が付属したモデルです。これにより肩関節を15°外転位で保持、上肢を懸垂し、適切な肢位で肩関節および上肢を保持することが可能です。



製品サイズ

肩関節外転装具

オモ インモビル (50A10)


発注品番	サイズ	適用範囲
		身長(cm)
50A10=S	S	150.0 ~ 165.0
50A10=M	M	165.0 ~ 175.0
50A10=L	L	175.0 以上

- 左右兼用

肩関節外転・外旋装具

オモ インモビル ローテーション(50A11)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲
			身長(cm)
50A11=R-S		S	150.0 ~ 165.0
50A11=R-M	右	M	165.0 ~ 175.0
50A11=R-L		L	175.0 以上
50A11=L-S		S	150.0 ~ 165.0
50A11=L-M	左	M	165.0 ~ 175.0
50A11=L-L		L	175.0 以上

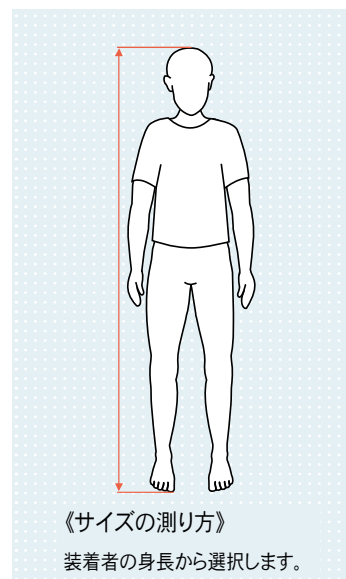

肩関節内旋装具

オモ インモビル スリング (50A8)

発注品番	サイズ	適用範囲
		前腕長(cm)
50A8=S	S	29.0 ~ 32.0
50A8=M	M	32.0 ~ 36.0
50A8=L	L	36.0 ~ 40.0


- 左右兼用

肩関節軽度外転装具

オモ インモビル スリング アブダクション(50A9)

発注品番	サイズ	適用範囲
		前腕長(cm)
50A9=S	S	29.0 ~ 32.0
50A9=M	M	32.0 ~ 36.0
50A9=L	L	36.0 ~ 40.0

- 左右兼用

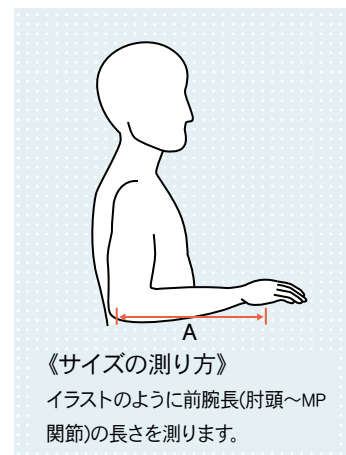

お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2012 年 12 月現在のものです。