

## Procomfort Gel. 633S2.

Procomfort Gel je špeciálny aplikačný gél určený k zjednodušeniu nasádzania protézy alebo epitézy a je nevyhnutnou súčasťou každodenného používania. Je vhodný pre všetky typy kýpťových lôžok, kde efektívne znižuje trenie medzi kýpťom a lôžkom pri nasadzovaní a snímaní protéz.

Gél sa ľahko aplikuje, dobre sa rozotiera a je praktický pre použitie v domácom i klinickom prostredí. Vďaka vodnej báze umožňuje pohodlné a šetrné vklávanie kýpťa do lôžka alebo silikónovej protézy/epitézy, podporuje bezpečné a dlhodobé nosenie a pomáha chrániť mäkké tkanivo kýpťa pred podráždením či poškodením. Navyše nezanecháva masťný film, ktorý by mohol spôsobiť sklznutie protézy alebo degradáciu materiálu vnútorného lôžka.

### Vlastnosti a výhody

- Zjednodušuje nasadzovanie a snímanie protézy alebo epitézy
- Znižuje trenie medzi kýpťom a kýpťovým lôžkom
- Podporuje šetrné a bezpečné nosenie protézy
- Zlepšuje prilnutie protézy či epitézy ku kýpťu
- Vhodný pre všetky typy kýpťových lôžok
- Použiteľný pre protézy horných i dolných končatín
- Vodná báza – rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva masťný film na pokožke
- Vhodné pre použitie v domácom i klinickom prostredí
- Objem balenia: 250 ml



## **Procomfort Gel. 633S2.**



### **Postup aplikácie**

Na čistý a suchý kýpeľ naneste približne 3–5 ml gélu (odvíja sa podľa veľkosti kýpta). Gél rovnomerne rozotrite po celom povrchu pokožky. Následne nasadte protézu alebo epitézu – gél umožní ľahké a pohodlné vklížnutie do lôžka. Po nasadení sa gél rýchlo vstrebe do pokožky a nezanechá mastný film.

### **Upozornenie**

Bežné kozmetické či dermatologické krémy, ktoré zanechávajú na pokožke mastný film, nie sú vhodnou náhradou – môžu vyvolať podráždenie pokožky alebo reakciu, spôsobiť sklĺznutie protézy alebo degradáciu materiálu vnútorného kýptového lôžka. Takto vzniknuté poškodenie nemôže byť predmetom prípadnej reklamácie.