

# Sitzkissen



Quality for life





## Ottobock Seating Philosophie

Unserer Betrachtungsweise nach hat jeder Rollstuhlnutzer einzigartige, individuelle Anforderungen an eine Sitzlösung. Um dem gerecht zu werden, sind maßgeschneiderte Lösungen mit Kombinationen von unterschiedlichen Rollstühlen und Sitzsystemen erforderlich.

### **Sitzlösungen sollten berücksichtigen:**

- Nutzerkomfort: Akzeptanz der Sitzlösung bei statischen und dynamischen Anwendungen
- Funktionalität: Einfluss der Haltung auf Mobilität, Kommunikation, Blickfeld, Atmung, Schlucken, etc.
- Unterstützung gezielter Bewegungen: Unerlässlich für Unabhängigkeit, Mobilität, Komfort und Wohlbefinden
- Sicherheit: Abwegen von Risiko und Nutzen für den Anwender
- Beckenposition: Einfluss auf die Stellung von Wirbelsäule, Nacken und Kopf
- Fußposition: Auswirkungen auf die Beckenposition
- Haltungsstabilität: Wirkung von statischen und dynamischen Anwendungen auf die Positionierung (befahren von Gefälle / Steigungen, Hindernissen oder als Sitz in einem Fahrzeug)
- Flexible Fehllhaltung: erfordert bestmögliche Korrektur
- Fixierte Fehllhaltung: erfordert bestmögliche Lagerung und Unterstützung
- Muskeltonus: Positionierung beeinflusst Muskeltonus und Reflexe
- Gewebetoleranz: Fähigkeit der Haut Druck, Scherkräfte und Mikroklima ohne schädigende Folgen zu tolerieren

# Das Ottobock „Seating Molecule“



Gute Sitzlösungen sollten die individuellen Anforderungen eines jeden Nutzers berücksichtigen. Im Vordergrund steht die Verbesserung von Komfort, Gesundheit und Funktionalität. Das Clinical Seating Molecule ist eine visuelle Darstellung der wichtigsten Faktoren, die für eine optimale Sitzlösung identifiziert und priorisiert werden sollten.

Jedes Rollstuhlsitzkissen sollte anhand einer nach Prioritäten geordneten Kombination der individuellen Bedürfnisse ausgewählt werden. Die Einstufungen zu jedem Baustein in dieser Broschüre dienen zur Orientierung und wurden konzipiert, um klinische Erwägungen bei der Auswahl aus den verschiedenen Ottobock-Rollstuhlsitzkissen zu unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Die Einstufungen stellen keine Aussagen zur generellen Leistung von Ottobock-Sitzkissen im Vergleich zu Produkten anderer Hersteller dar.




**Druckverteilung**

ist die Fähigkeit einer Unterstützungsfläche, ein Einsinken und Umschließen des Nutzers zu ermöglichen. Dadurch werden schädigende Druckspitzen verringert.



**Reduktion der Scherkräfte**

beschreibt die Fähigkeit, die Verschiebung zwischen den Hautschichten gegeneinander zu verringern. Somit wird eine Schädigung in den tiefen Hautschichten reduziert.

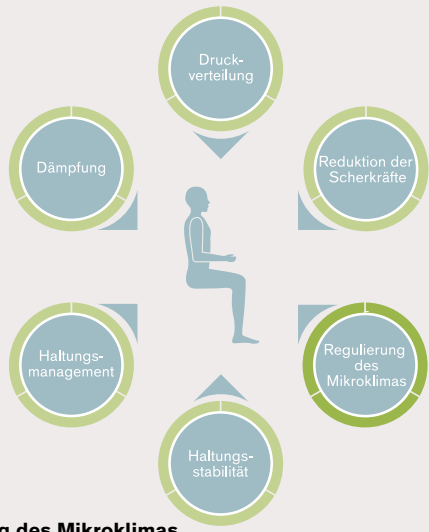

**Regulierung des Mikroklimas**

bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials die Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche zu reduzieren und die Temperatur angemessen zu regulieren. Somit wird das Verletzungsrisiko der Haut verringert.



**Haltungsstabilität**

ist die Fähigkeit eines Sitzes, Nutzer mit schwach ausgeprägter Sitzbalance zu unterstützen. So können sie über einen längeren Zeitraum ihre symmetrische Sitzposition aufrecht erhalten.



**Haltungsmanagement**

bezieht sich auf Sitzsysteme, die modifiziert oder eingestellt werden können, um die individuelle Haltung zu unterstützen oder zu korrigieren (z.B. bei Beckenschiefstand).




**Dämpfung**

ist die Fähigkeit einer Unterstützungsfläche, Stöße und Erschütterungen zu vermindern. So werden beim Fahren Nutzerkomfort und Stabilität erhöht.

# Inhalt



## Entry

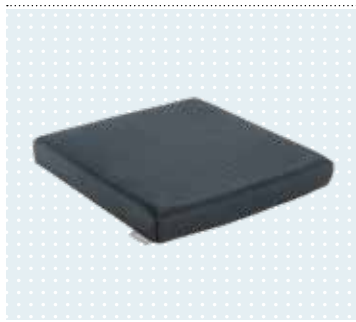

### Livo


**Merkmale:**

- Als Einsteigerkissen geeignet
- Pflegeleicht
- Hochwertiger 2-Schichten Schaumkern

**Max. Zuladung:**

- 125 kg

## Comfort

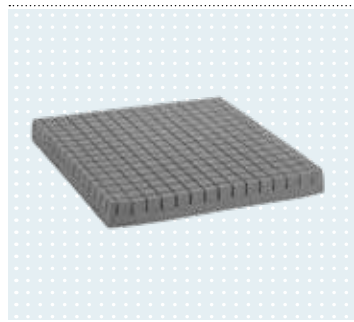

### Cubic Foam

**Merkmale:**

- Für aktive Nutzer
- Dekubitusprophylaxe
- Maximale Scherkraftreduktion
- Guter Sitzkomfort bei geringer Sitzhöhe

**Max. Zuladung:**

- 150 kg



### Evolight

**Merkmale:**

- Für aktive Nutzer
- Dekubitusprophylaxe
- Hohes Maß an Luftzirkulation (Mikroklima) durch Auflage aus Abstandsgewirke und Würfelstruktur des Kissens

**Max. Zuladung:**

- 125 kg

1	Entry Sitzkissen	
	Livo .....	8
2	Comfort Sitzkissen	
	Cubic Foam .....	10
	Evolight .....	12
3	Anatomic Sitzkissen	
	Terra .....	14
	Terra Aquos .....	16
	Terra Flair .....	18
4	Adjust Sitzkissen	
	Cloud .....	20
5	Zubehör	
	Inkontinenzbezug .....	22

## Anatomic



### Terra

**Merkmale:**

- Für Nutzer mit Dekubitusrisiko
- Konturierte Kissenform aus Rest Suspension foam bietet max. Haltusstabilität und Dämpfung

**Max. Zuladung:**

- 150 kg



### Terra Aquos

**Merkmale:**

- Für Nutzer mit Dekubitusrisiko
- Maximale Scherkratreduktion durch Fluid-Auflage
- Rest Suspension foam sorgt für max. Druckverteilung

**Max. Zuladung:**

- 150 kg



### Terra Flair

**Merkmale:**

- Für Nutzer mit hohem Dekubitusrisiko
- Das Beste aus zwei Welten, Luftkammerkissen & Rest Suspension foam
- Maximale Druckverteilung

**Max. Zuladung:**

- 150 kg

## Adjust



### Cloud

**Merkmale:**

- Für Nutzer mit Dekubitusrisiko
- Maximale Scherkratreduktion durch einzelne Floam-Zellen
- Maximales Haltungsmanagement
- Maximale Einstellbarkeit

**Max. Zuladung:**

- 250 kg

# Entry Sitzkissen



## Livo

Das pflegeleichte Sitzkissen

### Eigenschaften

Dieses Sitzkissen aus hochwertigem Visco-Schaum\* mit kombiniertem HR-Schaum\*\* eignet sich besonders als Einsteigerkissen oder für geriatrische Anwender. Es überzeugt durch Qualität und einfache Pflege.

### Vorteile

- Pflegeleichter PU-Bezug:
  - Atmungsaktiv
  - Abnehmbar
  - Waschbar bis 60°
  - Desinfizierbar
- Hochwertiger 2-schichtiger Schaumkern mit einer Oberplatte aus Visco-Schaum und einer Unterplatte aus HR-Schaum
- Einfaches Abnehmen des Bezuges dank nutzerfreundlichem Reißverschluss
- Integrierter Inkontinenzbezug
- CE gekennzeichnet
- Maximale Zuladung: 125 kg




\* Visco-Schaum besitzt druckentlastende Eigenschaften und unterstützt somit die Dämpfungswirkung des Sitzkissens.

\*\* HR-Schaum fördert durch seine grobe Porenstruktur die Luftdurchlässigkeit, was die Regulierung des Mikroklima des Sitzkissens unterstützt.



Pflegeleichter PU-Bezug:  
Atmungsaktiv, abnehmbar,  
desinfizierbar, waschbar bis 60°

Hochwertiger 2-schichtiger  
Schaumkern: Oberplatte aus  
Visco- und Unterplatte aus  
HR-Schaum für hohen Komfort

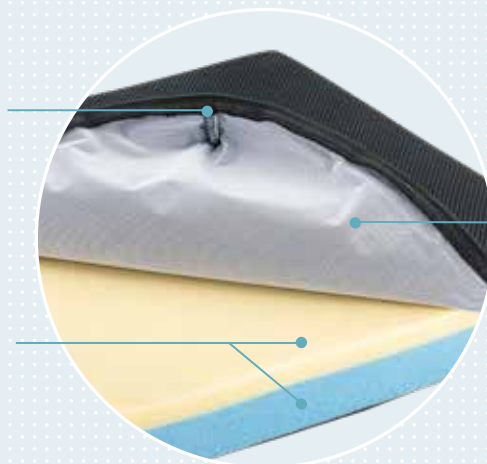


Integrierter  
Inkontinenzbezug

Art.-Nr.	Beschreibung (mm)
476C00=SK1450	Livo 380x400
476C00=SK1451	Livo 400x420
476C00=SK1452	Livo 420x420
476C00=SK1453	Livo 420x440
476C00=SK1454	Livo 420x460
476C00=SK1455	Livo 420x520
476C00=SK1456	Livo 450x420
476C00=SK1457	Livo 450x440
476C00=SK1458	Livo 450x460
476C00=SK1459	Livo 480x420
476C00=SK1460	Livo 480x440
476C00=SK1461	Livo 480x460
476C00=SK1462	Livo 510x440
476C00=SK1463	Livo 510x460
476C00=SK1464	Livo 520x520

Lieferzeit für Sondergrößen auf Anfrage.

- Max. Zuladung: 125 kg
- Sitzkissenhöhe: 50 mm (15 mm obere Visco-Schaum-Schicht, 35 mm untere HR-Schaum-Schicht)

# Comfort Sitzkissen

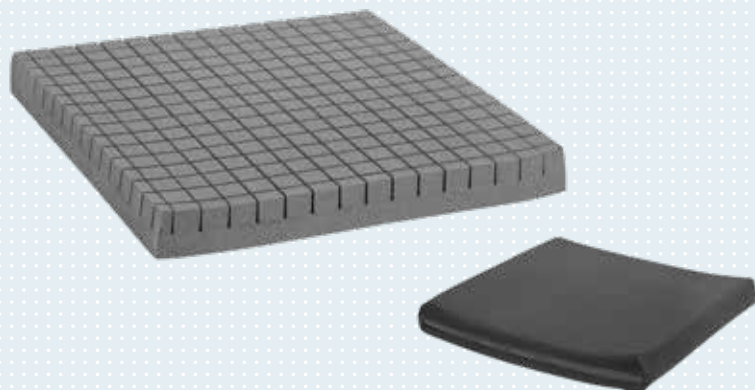

## Cubic Foam

Einfaches Druckverteilungsprinzip


### Eigenschaften

- Sitzkissen aus sehr dichtem, 50 mm starkem, hochelastischem Schaumstoff
- Oberfläche in Würfelstruktur mit Lücken zwischen den Zellen für optimale Zellenbewegung
- Geringes Gewicht
- Dartex-Bezug (wasserabweisend, sehr dehnbar, atmungsaktiv)
- Max. Zuladung: 150 kg

### Vorteile

- Verbesserte Druckverteilung und maximale Scherkraftreduktion dank Würfelstruktur
- Hoher Komfort bei gleichzeitig niedriger Sitzhöhe



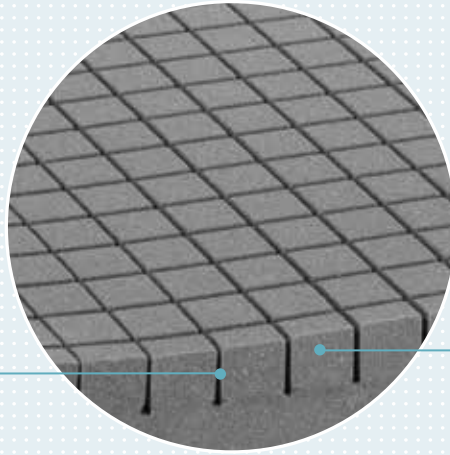

Belüftungskanäle  
zwischen den Zellen

Würfelstruktur

- Max. Zuladung: 150 kg
- Gewicht: 0,65 kg (400 x 400 mm)
- Sitzkissenstärke: 50 mm
- Dartex-Bezug

**Funktionshöhen:**

- Bereich der Sitzbeinhöcker: 50 mm
- Unterstützung der Trochanter: 50 mm
- Oberschenkelmulde: 50 mm
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 50 mm

**Bestell-Nr. Sitzkissen: 476C00=SK100**

		Sitzbreite (mm)																	
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Sitztiefe (mm)	280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	440	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	460	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	540	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Standardgrößen
- Sondergrößen (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

# Comfort Sitzkissen



## Evolight

Verbessertes Mikroklima  
plus Sitzkomfort


### Eigenschaften

- Sitzkissen aus sehr dichtem, hochelastischem, 60 mm starkem Schaumstoff
- Die Würfelstruktur der Schaumstoffbasis mit Lücken zwischen den Zellen sorgen für eine optimale Zellenbewegung
- Verbessertes Mikroklima dank Auflage aus Abstandsgewirke
- Abgerundete Sitzkissenrückseite angepasst an den Durchhang einer Rückenbespannung
- Geringes Gewicht
- Außenbezug aus Abstandsgewirke
- Max. Zuladung: 125 kg

### Vorteile

- Verbesserte Druckverteilung durch Würfelstruktur
- Optimale Regulierung des Mikroklimas durch Verwendung von atmungsaktiven Abstandsgewirke bei Aufleger und Außenbezug
- Hoher Sitzkomfort verbunden mit niedriger Sitzhöhe



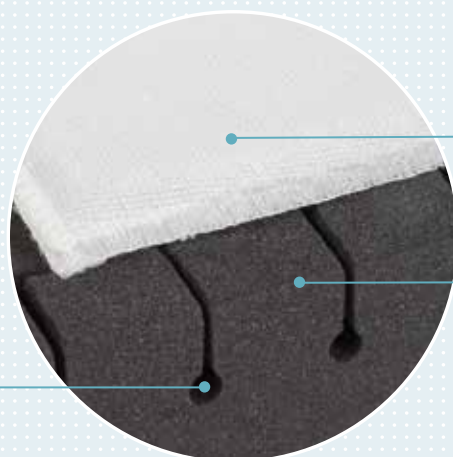

Atmungsaktives Abstandsgewirke bei Aufleger und Außenbezug

Würfelformstruktur

Belüftungskanäle zwischen den Zellen

- Max. Zuladung: 125 kg
- Gewicht: 0,85 kg (400 x 400 mm)
- Sitzkissenstärke: 60 mm
- Außenbezug mit Abstandsgewirke

**Funktionshöhen:**

- Bereich der Sitzbeinhöcker: 60 mm
- Unterstützung der Trochanter: 60 mm
- Oberschenkelmulde: 60 mm
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 60 mm

**Bestell-Nr. Sitzkissen: 476C00=SK350**

		Sitzbreite (mm)																				
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	610	620	
Sitztiefe (mm)	280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	440	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	460	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
540	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
560	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- Standardgrößen
- Sondergrößen (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

# Anatomic Sitzkissen



## Terra

Für mehr Sitzkomfort

### Eigenschaften

- Rest Suspension foam bietet:
  - Ausgezeichnetes Einsinken und Umschließen der Oberschenkel und des Beckens für eine effektive Druckverteilung
  - Vibrations- und Stoßdämpfung für einen verbesserten Sitzkomfort
  - Hohes Maß an Haltungsstabilität
- Anatomisch geformte Sitzfläche:
  - Druckverteilung zur Vermeidung von Druckspitzen im Bereich der Sitzbeinhöcker
- Dartex-Bezug (wasserabweisend, sehr dehnbar, atmungsaktiv)
- Max. Zuladung: 150 kg

### Vorteile


- Wirksame Druckverteilung für Anwender mit mäßigem Dekubitusrisiko
- Verbesserter Sitzkomfort dank stoßdämpfender Eigenschaften des Rest Suspension foam
- Hohe Stabilität bei Aktivitäten und Transfer



Bereich der  
Sitzbeinhöcker

Laterale Oberschenkel-  
führung (Abduktion)

Abgerundete  
Vorderkante mit  
Unterschnitt

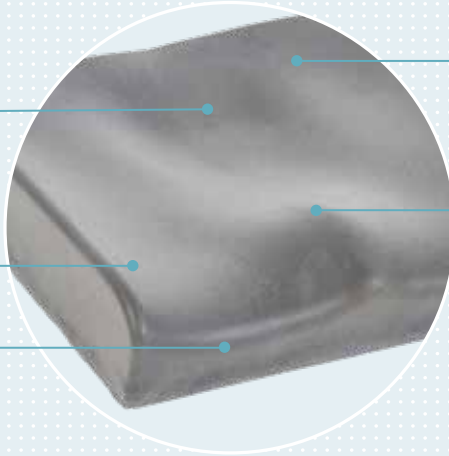

Trochanterunterstützung

Mediale Oberschenkel-  
führung (Adduktion)

Art.-Nr.	Beschreibung (mm)	Rollstuhlbreite (mm)	Rollstuhltiefe (mm)
476C00=SK631	Terra 355 x 355	350–370	340–360
476C00=SK608	Terra 355 x 405	350–370	370–390
476C00=SK606	Terra 380 x 405	380–390	370–390
476C00=SK601	Terra 405 x 405	400–410	370–390
476C00=SK640	Terra 405 x 430	400–410	400–420
476C00=SK604	Terra 405 x 455	400–410	430–450
476C00=SK632	Terra 405 x 505	400–410	460–480
476C00=SK633	Terra 430 x 405	420–430	370–390
476C00=SK638	Terra 430 x 430	420–430	400–420
476C00=SK607	Terra 430 x 455	420–430	430–450
476C00=SK634	Terra 430 x 505	420–430	460–480
476C00=SK603	Terra 455 x 405	440–470	370–390
476C00=SK639	Terra 455 x 430	440–470	400–420
476C00=SK602	Terra 455 x 455	440–470	430–450
476C00=SK635	Terra 455 x 505	440–470	460–480
476C00=SK636	Terra 505 x 405	480–520	370–390
476C00=SK605	Terra 505 x 455	480–520	430–450
476C00=SK637	Terra 505 x 505	480–520	460–480
476C00=SA620*	Sondergröße 505 x 430	480–520	400–420

\* Lieferzeit auf Anfrage

- Max. Zuladung: 150 kg
- Gewicht: 1,0 kg (400 x 400 mm)
- Dartex-Bezug

#### Funktionshöhen:

- Bereich der Sitzbeinhöcker: 70 mm
- Unterstützung der Trochanter: 75 mm
- Oberschenkelmulde: 60 mm
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 95 mm

# Anatomic Sitzkissen



## Terra Aquos

Für Sitzkomfort und Scherkraftreduktion

### Eigenschaften

- Vier LiquiCell-Einleger sorgen für eine sehr gute Scherkraftreduktion bei Aktivität
- Rest Suspension foam bietet:
  - Ausgezeichnetes Einsinken und Umschließen der Oberschenkel und des Beckens für eine gute Druckverteilung
  - Vibrations- und Stoßdämpfung für einen verbesserten Sitzkomfort
  - Auch bei langfristiger Nutzung gleichbleibende Eigenschaften
- Anatomisch geformte Sitzfläche:
  - Druckverteilung zur Vermeidung von Druckspitzen im Bereich der Sitzbeinhöcker
  - Haltungsunterstützung
  - Symmetrische Oberschenkelpositionierung
- Dartex-Bezug (wasserabweisend, sehr dehnbar, atmungsaktiv)
- Max. Zuladung: 150 kg



### Vorteile

- Wirksame Druckverteilung für Anwender mit mittlerem Dekubitusrisiko
- Reduzierung von Scherkräften zur Dekubitusprophylaxe
- Hoher Sitzkomfort dank stoßdämpfender Eigenschaften des Rest Suspension foam
- Gute Haltungsstabilität durch Rest Suspension foam und anatomisch geformte Sitzkissenkontur



Bereich der  
Sitzbeinhöcker

Laterale Oberschenkel-  
führung (Adduktion)

Abgerundete  
Vorderkante mit  
Unterschnitt



Trochanterunterstützung

Mediale Oberschenkel-  
führung (Abduktion)

Art.-Nr.	Beschreibung (mm)	Rollstuhlbreite (mm)	Rollstuhltiefe (mm)
476C00=SK681	Terra Aquos 355 x 355	350–370	340–360
476C00=SK658	Terra Aquos 355 x 405	350–370	370–390
476C00=SK656	Terra Aquos 380 x 405	380–390	370–390
476C00=SK651	Terra Aquos 405 x 405	400–410	370–390
476C00=SK690	Terra Aquos 405 x 430	400–410	400 - 420
476C00=SK654	Terra Aquos 405 x 455	400–410	430–450
476C00=SK682	Terra Aquos 405 x 505	400–410	460–480
476C00=SK683	Terra Aquos 430 x 405	420–430	370–390
476C00=SK688	Terra Aquos 430 x 430	420–430	400–420
476C00=SK657	Terra Aquos 430 x 455	420–430	430–450
476C00=SK684	Terra Aquos 430 x 505	420–430	460–480
476C00=SK653	Terra Aquos 455 x 405	440–470	370–390
476C00=SK689	Terra Aquos 455 x 430	440–470	400–420
476C00=SK652	Terra Aquos 455 x 455	440–470	430–450
476C00=SK685	Terra Aquos 455 x 505	440–470	460–480
476C00=SK686	Terra Aquos 505 x 405	480–520	370–390
476C00=SK655	Terra Aquos 505 x 455	480–520	430–450
476C00=SK687	Terra Aquos 505 x 505	480–520	460–480
476C00=SA660*	Sondergröße 505 x 430	480–520	400–420

\* Lieferzeit auf Anfrage

- Max. Zuladung: 150 kg
- Gewicht: 1,2 kg (400 x 400 mm)
- Dartex-Bezug

**Funktionshöhen:**

- Bereich der Sitzbeinhöcker: 70 mm
- Unterstützung der Trochanter: 75 mm
- Oberschenkelmulde: 60 mm
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 95 mm

# Anatomic Sitzkissen



## Terra Flair

Das Beste im Bereich Luftkammerkissen mit der Stabilität und Sicherheit von Rest Suspension foam

### Eigenschaften

- Luftkisseneinleger:
  - 50 x 50 mm, 70 mm hohe untereinander verbundene Noppen, die ein Einsinken und Umschließen der Oberschenkel und des Beckens zulassen
  - Durch die gebrochene Oberfläche wirken minimale Scherkräfte auf die Haut
  - Ein Ventil für eine einfache und individuelle Einstellung des Kissens auf den Nutzer
- Rest Suspension foam bietet:
  - Ausgezeichnetes Einsinken und Umschließen der Oberschenkel und des Beckens für eine sehr gute Druckverteilung
  - Vibrations- und Stoßdämpfung für einen besseren Sitzkomfort
  - Auch bei langfristiger Nutzung gleichbleibende Eigenschaften
- Dartex-Bezug (wasserabweisend, sehr dehnbar, atmungsaktiv)
- Max. Zuladung: 150 kg



### Vorteile

- Optimale Druckverteilung durch anpassbare Luftkisseneinleger
- Reduzierung von Scherkräften zur Dekubitusprophylaxe
- Hohe Stabilität bei Aktivitäten und Transfer
- Verbesserter Sitzkomfort durch Zusammenspiel von Luftkisseneinleger und dem Rest Suspension foam
- Gute Haltungsunterstützung dank Schaumstoff im Bereich der Trochanter

Trochanteraufnahme

Laterale  
Oberschenkelführung

Mediale  
Oberschenkelführung



Luftkisseneinleger

Abgerundete Vorderkante  
mit Unterschnitt

Art.-Nr.	Beschreibung (mm)	Rollstuhlbreite (mm)	Rollstuhltiefe (mm)
476C00=SK878	Terra Flair 355 x 405	350–370	370–390
476C00=SK876	Terra Flair 380 x 405	380–390	370–390
476C00=SK871	Terra Flair 405 x 405	400–410	370–390
476C00=SK879	Terra Flair 405 x 430	400–410	400–420
476C00=SK874	Terra Flair 405 x 455	400–410	430–450
476C00=SK882	Terra Flair 405 x 505	400–410	460–480
476C00=SK883	Terra Flair 430 x 405	420–430	370–390
476C00=SK888	Terra Flair 430 x 430	420–430	400–420
476C00=SK877	Terra Flair 430 x 455	420–430	430–450
467C00=SK884	Terra Flair 430 x 505	420–430	460–480
476C00=SK873	Terra Flair 455 x 405	440–470	370–390
476C00=SK889	Terra Flair 455 x 430	440–470	400–420
476C00=SK872	Terra Flair 455 x 455	440–470	430–450
476C00=SK885	Terra Flair 455 x 505	440–470	460–480
476C00=SK886	Terra Flair 505 x 405	480–520	370–390
476C00=SK875	Terra Flair 505 x 455	480–520	430–450
476C00=SK887	Terra Flair 505 x 505	480–520	460–480
476C00=SA880*	Sondergröße 505 x 430	480–520	400–420

\* Lieferzeit auf Anfrage

- Max. Zuladung: 150 kg
- Gewicht: 1,4 kg (400 x 400 mm)
- Dartex-Bezug

#### Funktionshöhen:

- Bereich der Sitzbeinhöcker (Zellenhöhe): 70 mm
- Unterstützung der Trochanter: 75 mm
- Oberschenkelmulde: 60 mm
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 95 mm

# Adjust Sitzkissen



## Cloud

Das anpassbare Sitzkissen für Druckverteilung und Haltungsmangement

### Eigenschaften

- Baukastenprinzip mit bis zu 30 Floam-Zellen je nach Größe
- Kombination aus Floam-Zellen mit geringer, mittlerer und hoher Füllung für die individuelle Positionierung
- Floam-Einfassung sorgt für zusätzliche Haltungsverstärkung
- Konfiguration für individuelle Haltungserfordernisse
- Verfügbarkeit einzelner zusätzlicher / Ersatz-Floam-Zellen
- Größen: 300 x 300 mm (9 Floam-Zellen)  
bis 580 x 400 mm (30 Floam-Zellen)
- Wasserdichte Schaumbstoffbasis für zusätzliche Dämpfung
- Dartex-Bezug (wasserabweisend, sehr dehnbar, atmungsaktiv)
- Max. Zuladung: 250 kg

### Vorteile

- Optimale Druckverteilung im Bereich der Sitzbeinhöcker, des Steißbeins und der Trochanter
- Keine Rückstellkräfte wie bei Kissen aus Schaumstoff
- Einfache Anpassbarkeit bei Beckenasymmetrien
- Hervorragende Beckenstabilisierung
- Einzelne Floam-Zellen für hohe Stabilität, z.B. bei Transfers



Bereich der Sitzbeinhöcker anpassbar

Laterale Oberschenkelführung



Anpassbare Oberschenkelführung (Abduktion)

Anpassbare vordere Oberschenkelmulde

Art.-Nr.	Beschreibung (mm)	Rollstuhlbreite (mm)	Rollstuhltiefe (mm)	Anzahl der Zellen			Laterale Führung	
				Blau (klein)	Schwarz (mittel)	Rot (groß)	Kleine Zelle	Große Zelle
476C00=FFC12x12*	Cloud 300 x 300	290–320	290–320	4	4	–	2	–
476C00=FFC14x14	Cloud 350 x 350	340–360	340–370	5	5	1	2	–
476C00=FFC14x16	Cloud 350 x 400	340–360	380–420	7	7	2	2	–
476C00=FFC15x15	Cloud 380 x 380	370–390	360–400	7	7	2	2	–
476C00=FFC15x16	Cloud 380 x 400	370–390	380–420	7	7	2	–	2
476C00=FFC16x16	Cloud 400 x 400	390–410	380–420	7	7	2	–	2
476C00=FFC16x16.5	Cloud 400 x 420	390–410	400–440	7	7	2	–	2
476C00=FFC16x18	Cloud 400 x 460	390–410	420–480	7	7	2	–	2
476C00=FFC16.5x16	Cloud 420 x 400	410–430	380–420	7	7	2	–	2
476C00=FC16.5x16.5	Cloud 420 x 420	410–430	400–440	7	7	2	–	2
476C00=FFC17x17	Cloud 430 x 430	420–440	420–460	7	7	2	–	2
476C00=FFC17x18	Cloud 430 x 460	420–440	420–480	7	7	2	–	2
476C00=FC17.5x16.5	Cloud 440 x 420	430–450	400–440	7	7	2	–	2
476C00=FFC18x16	Cloud 460 x 400	450–470	380–420	7	7	2	–	2
476C00=FFC18x16.5	Cloud 460 x 420	450–470	400–440	7	7	2	–	2
476C00=FFC18x18	Cloud 460 x 460	450–470	420–480	7	7	2	–	2
476C00=FFC18x20	Cloud 460 x 500	450–470	460–520	9	9	3	4	–
476C00=FFC19x18	Cloud 480 x 460	460–500	420–480	13	13	2	4	–
476C00=FFC20x16*	Cloud 500 x 400	480–540	380–420	13	13	2	–	2
476C00=FFC20x18	Cloud 500 x 460	480–540	420–480	13	13	2	4	–
476C00=FFC22x16*	Cloud 560 x 400	520–600	380–420	13	13	2	4	–
476C00=FFC22x18*	Cloud 560 x 460	520–600	420–480	17	17	3	4	–
476C00=FFC22x20	Cloud 560 x 500	520–600	480–520	17	17	3	4	–
476C00=FFC24x16	Cloud 610 x 400	570–650	380–420	17	17	4	4	–
476C00=SA200*	Sondergrößen min. 305 x 305 / max. 910 x 910							

\* Lieferzeit auf Anfrage

- Max. Zuladung: 250 kg
- Gewicht: 3,2 kg (400 x 400 mm)
- Sitzkissenstärke: 110 mm
- Dartex-Bezug

#### Funktionshöhen:

- Bereich der Sitzbeinhöcker: anpassbar
- Unterstützung der Trochanter: anpassbar
- Oberschenkelmulde: anpassbar
- Laterale Oberschenkelunterstützung: 110 mm



## Inkontinenzbezug


Der Inkontinenzbezug ist für die Floam und Terra Sitzkissen erhältlich, und passt unter alle Textilbezüge, direkt um den Schaumstoff.

### Eigenschaften

- Elastischer, transparenter Kunststoff
- Wasserabweisende Oberfläche
- Einfach zu reinigen

### Vorteile

- Schützt den Schaumstoff vor Schmutz und Flüssigkeiten
- Eigenschaften des Sitzkissens bleiben erhalten

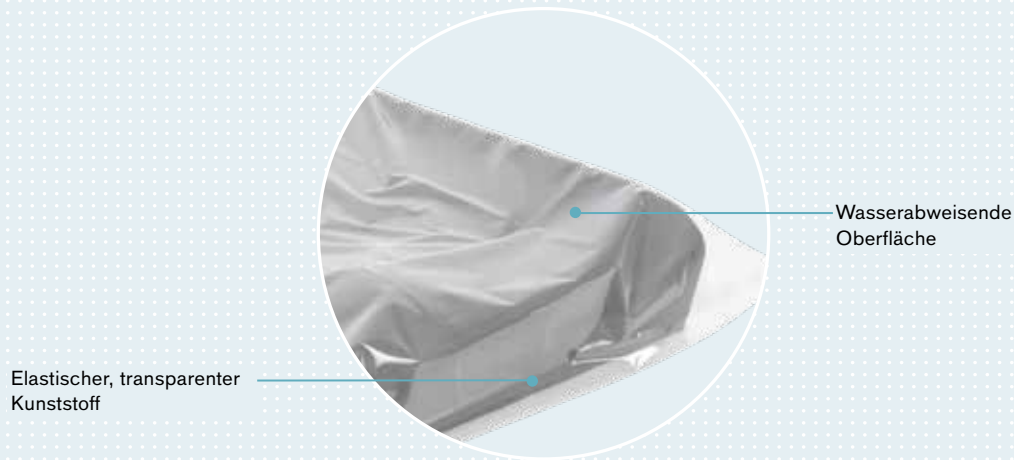

Inkontinenzbezug	Dazu passende Sitzkissen					
	Art.-Nr.	Terra	Terra Aquos	Terra Flair	Cloud	Advantage
476C00=SK461	476C00=SK631	476C00=SK681	-	476C00=FFC12x12	476C00=AC14x14	476C00=Z15x16
476C00=SK450	476C00=SK608	476C00=SK658	476C00=SK878	-	476C00=AC14x16	-
476C00=SK451	476C00=SK606	476C00=SK656	476C00=SK876	476C00=FFC14x14	476C00=AC15x15 476C00=AC15x16	476C00=Z16x16 476C00=Z16x18
476C00=SK452	476C00=SK601	476C00=SK651	476C00=SK871	476C00=FFC15x15	476C00=AC16x16	476C00=Z16.5x16.5
476C00=SK458	476C00=SK640	476C00=SK690	476C00=SK879	476C00=FFC14x16 476C00=FFC15x16	476C00=AC16x16.5	-
476C00=SK453	476C00=SK604	476C00=SK654	476C00=SK874	-	476C00=AC16x18	-
476C00=SK462	476C00=SK632	476C00=SK682	476C00=SK882	-	-	-
476C00=SK463	476C00=SK633	476C00=SK683	476C00=SK883	-	476C00=AC16.5x16	476C00=Z18x16 476C00=Z18x16.5 476C00=Z18x18
476C00=SK459	476C00=SK638	476C00=SK688	476C00=SK888	476C00=FFC16x16	476C00=AC16.5x16.5	-
476C00=SK454	476C00=SK607	476C00=SK657	476C00=SK877	476C00=FFC16x16.5	476C00=AC17x18	-
476C00=SK464	476C00=SK634	476C00=SK684	476C00=SK884	476C00=FFC16x18	-	-
476C00=SK455	476C00=SK603	476C00=SK653	476C00=SK873	-	476C00=AC18x16	-
476C00=SK460	476C00=SK639	476C00=SK689	476C00=SK889	476C00=FFC16.5x16	476C00=AC17.5x16.5 476C00=AC18x16.5	-
476C00=SK456	476C00=SK602	476C00=SK652	476C00=SK872	476C00=FC16.5x16.5 476C00=FFC17x17	476C00=AC18x18	-
476C00=SK465	476C00=SK635	476C00=SK685	476C00=SK885	476C00=FFC17x18	-	-
476C00=SK466	476C00=SK636	476C00=SK686	476C00=SK886	-	-	476C00=Z20x18
476C00=SK457	476C00=SK605	476C00=SK655	476C00=SK875	476C00=FC17.5x16.5 476C00=FFC18x16 476C00=FFC18x16.5	-	-
476C00=SK467	476C00=SK637	476C00=SK687	476C00=SK887	476C00=FFC18x18 476C00=FFC19x18	-	-
476C00=SK468	-	-	-	476C00=FFC20x16 476C00=FFC20x18 476C00=FFC22x16 476C00=FFC22x18 476C00=FFC22x20 476C00=FFC18x20	-	-

┌  
Mit freundlicher Empfehlung von:  
└

┌  
**Warenzeichen**  
└

Alle innerhalb des vorliegenden Dokumentes genannten Bezeichnungen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen Eigentümer.

Alle hier bezeichneten Marken, Handelsnamen oder Firmennamen können eingetragene Marken sein und unterliegen den Rechten der jeweiligen Eigentümer.

Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung der in diesem Dokument verwendeten Marken kann nicht geschlossen werden, dass eine Bezeichnung frei von Rechten Dritter ist.

Neben den angebotenen Produktoptionen entnehmen Sie bitte weitere Optionen dem jeweiligen Produktbestellblatt.

Otto Bock Suisse AG  
Luzerner Kantonsspital 10 • 6000 Luzern 16  
T: 041 455 61 71 • F: 041 455 61 70  
suisse@ottobock.com • www.ottobock.ch