


# 肘関節装具

## エピフォルサ プラス (50A3)

### 特徴

- ・ 上腕骨外側上顆炎または内側上顆炎の痛み緩和
- ・ 解剖学的形状のパッドで前腕部分を圧迫
- ・ 上腕骨外側・内側上顆の腱付着部にかかる牽引力を軽減
- ・ 簡単装着なバンド構造

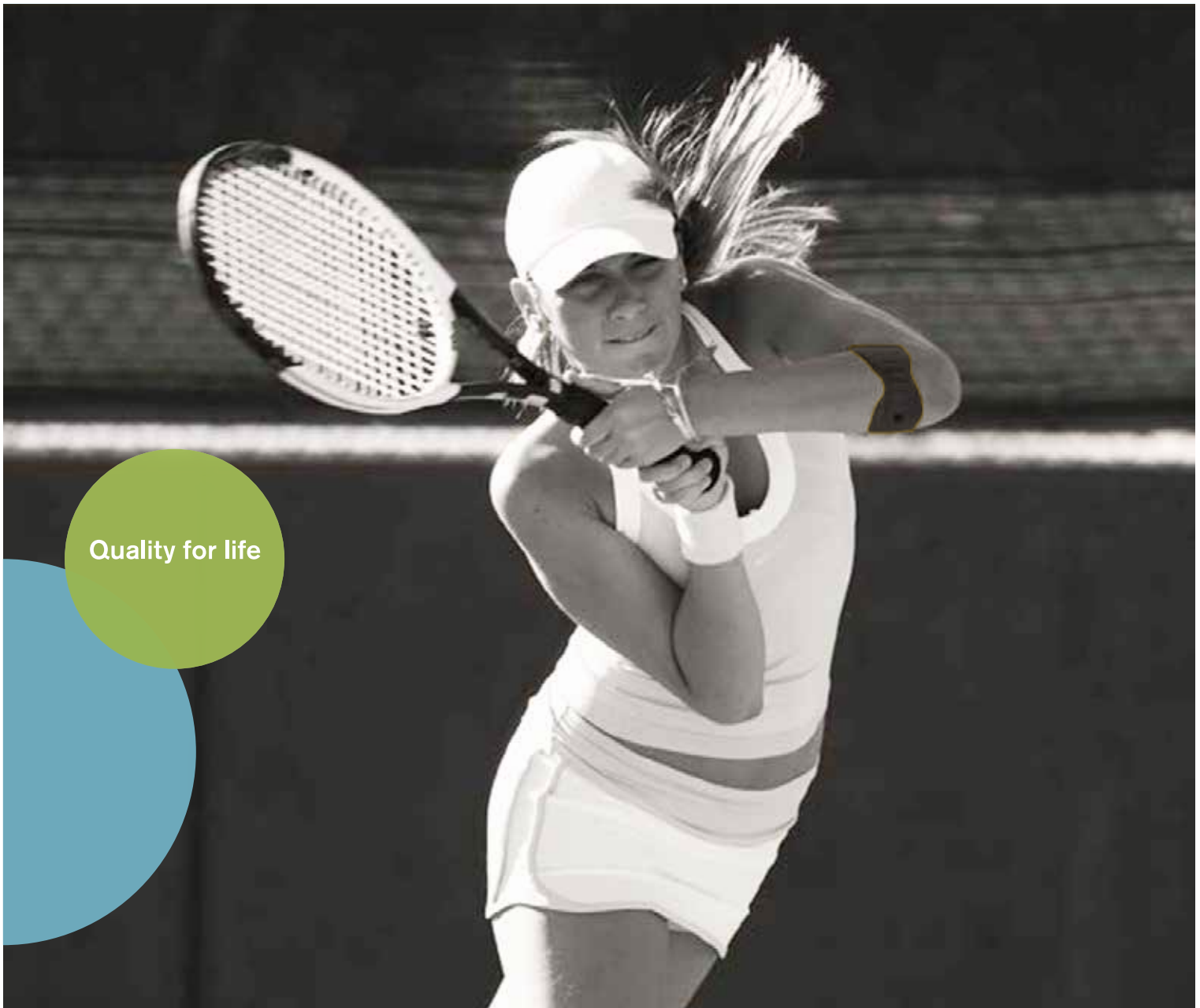

Quality for life

# 特徴・装着手順およびサイズ

## 特徴



- ▶ ユニークな形状により、必要な部位をしっかり押さえることができます。

- ▶ 上腕骨外側上顆または内側上顆の腱附着部へ適度に圧迫しながら本体バンドで締め付けることができます。

- ▶ 本体には、左右それぞれのパッドの位置決めをするためのラインがプリントされていますので、最適な位置に調整することができます。

- ▶ 本体にはプラスチックの芯材が内蔵されており、立体的にしっかりとフィットする構造となっています。またループにした状態から腕を通し、簡単に装着することができます。



## 装着手順



- ① パッドの位置を左右決めます。  
Rが見える方が右、Lが見える方が左



【左腕の場合】 【右腕の場合】



- ② 本体をループ状にします。



- ③ 本体を腕に通します。



- ④ ベルトを留めます。




- ⑤ 肘頭より約4～5cmの位置で装着します。

## 製品サイズ

発注品番	左右	サイズ	適応周径
50A3	兼用	フリー	23.0～31.0cm

### 《サイズの測り方》

イラストのように肘関節から約5cmの前腕の肘の周径を測ります。

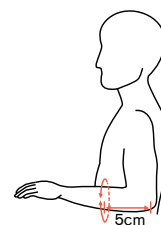

### お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は2020年02月現在のものです。