

## Hjelpemiddel for utvelgelse av C-Brace®

Hjelpemiddelet gjør det enklere å finne ut om en pasient kan bruke C-Brace®. Men dette dokumentet er bare et hjelpemiddel. For den endelige avgjørelsen, må pasienten utstyres med en testortose (DTO).

---

### Kognitive krav

Pasienten må kunne sikre at ortosen håndteres, vedlikeholdes og brukes på riktig måte (for eksempel må pasienten kunne høre lydsignalene).

---

### Funksjonelle utfordringer

Nevromuskulær ustabilitet i kneleddet i sagittalplanet

Diagnose (fra lege):

.....

---

### Eksklusjonskriterium

Hvis noe av følgende gjelder for pasienten din, kan ikke vedkommende utstyres med C-Brace® på dette tidspunktet:

.....

- Svingfase kan ikke startes fra stående posisjon**

.....
  - Veier mer enn 125 kg**

.....
  - Alvorlig spastisitet**

.....
  - Beinet er forkortet med mer enn 15 cm**

.....
  - Fleksjonskontraktur i kne og hofte som overstiger 10°**

.....
  - Utilstrekkelig nevromuskulær torsostabilitet for prøvefasen**

.....
  - Sykdom som utelukker bruk av ortose (for eksempel ødem eller omfattende hudirritasjon)**

.....
  - Ortopedisk protese**

.....
-