

## 胸椎装具

### ドルソ アレクサ (28R140N)

#### 1. ユニークな 3 点支持

3 点支持の原理に基づき、脊椎を伸展位に保持し、理想的な安定位を保つことができる体幹装具。

#### 2. 素材とデザイン性

入浴時や水治療法にも適する防水性素材を用い、操作性や使い易さを考慮したデザイン。

#### 3. フリーサイズ

ウエスト周径 60 ~ 150cm、高さ方向も 37 ~ 60cm の範囲で調整が可能。



Quality for life

#### 適応

- ▶ 神経症状のない安定型の外傷性椎体骨折\*
- ▶ 脊椎圧迫骨折\*
- ▶ 骨粗しょう症\* \* Th10-L2

# 胸椎装具

## ドルソ アレクサ (28R140N)



### ◆ 特長

機能性とデザイン性を兼ね備えた3点支持構造


ドルソ アレクサは、3点支持\*の原理に基づき、体幹を伸展位に保持する装具です。機能性とデザイン性を兼ね備え、装着者の操作性や使用状況を考慮した設計となっています。

### ◆ お客様の声

- ・ 防水素材はシャワー浴や水治療法の際に扱いやすい
- ・ 服の上からでも装着できるので、脱着が簡単
- ・ ラチェット式の着脱は介助者でも容易に操作可能



ラチェットロック

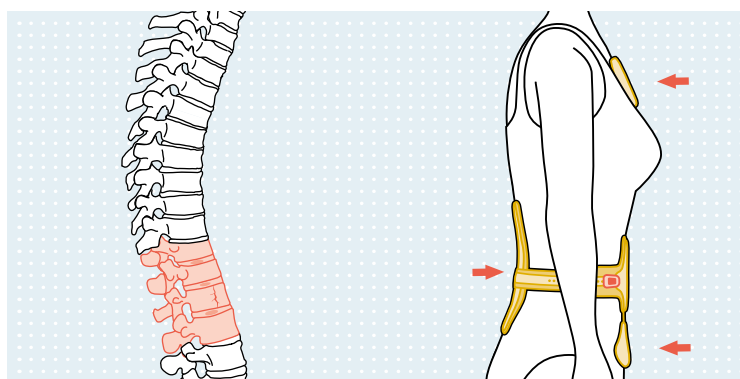

\*3点支持：胸骨・恥骨・背部の3点の패드による固定で脊椎を伸展位に保持し、理想的な安定性を保ちます。各パッドは、身体にフィットしやすいプラスチック素材を採用し、また、胸骨パッドは、パイプの曲げ加工によってパッドの角度を調整できます。


### ◆ 簡単装着

3  
ステップ




背部パッドは3段階の高さで選択

1 ウェストベルトの片側をラチェットロックに差込み、背部パッドが正しい位置になるよう長さを設定。

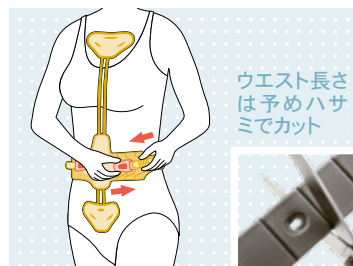

ウエスト長さは予めハサミでカット

2 装具を正しい位置に合わせた上で、反対側のウェストベルトを差込んでいき、ウエスト周径を調整。

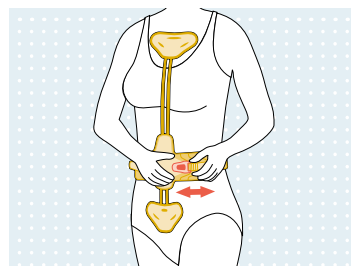

3 ウェスト周径の微調整はレバーで行えます。ゆるめたり、取外す場合はラチェットロック中央の赤いボタンを押します。


### ◆ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。

- \* ウェスト周径範囲をご確認ください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

### ◆ 製品サイズ

サイズの測り方

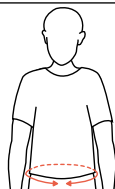

発注品番	サイズ	適用範囲 ウエスト周径 (cm)
28R140N	フリー	60~150

- 製品高さ調整範囲 37~60cm

《サイズの測り方》イラストのようにウエスト周径を測ります。



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。

ドルソ アレクサ



フェイスブック QRコード



お問い合わせ先

- ・ 本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・ 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・ カatalogの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・ 本カタログの内容は2018年10月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112