


# 股関節外転装具

ヒップ アブダクション オルソシス (28L20)

## 特徴

- ・ 大腿カフの内側にボールジョイントを採用し、股関節を固定せず外転位に保持
- ・ 大腿カフの周径と連結バーの長さが調節可能

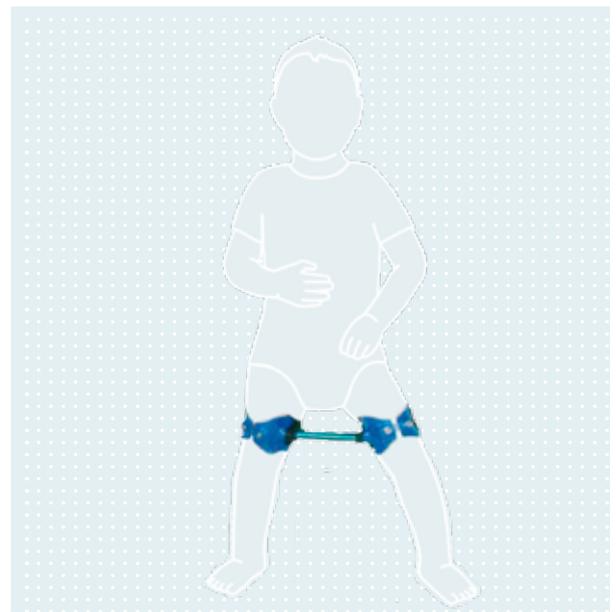


# 特徴

## - ボールジョイント採用

大腿カフと連結バーをボールジョイント2個所で連結しました。股関節を固定することなく外転位に保持することができます。お子様のアクティビティを阻害することなく装着して頂けます。

## - 個々に合わせた調節

大腿カフは、周径を大腿カフ前面と大腿カフベルトの2個所で調節できますので、お子様のお太さに合わせることができます。連結バーの長さは調節でき、お子様それぞれに合わせることができます。

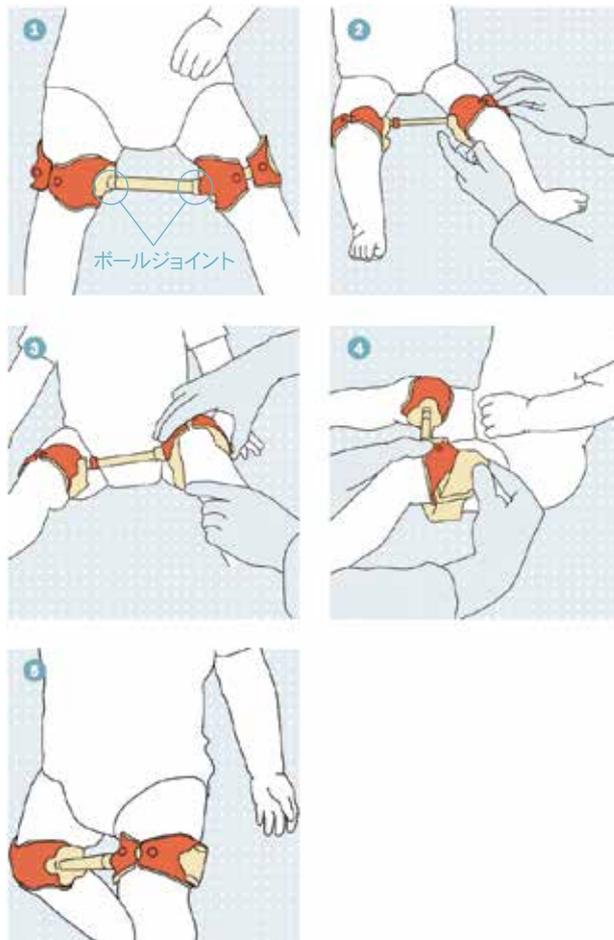

# 装着方法

大腿カフと連結バーの調節用六角レンチが付属しています。

大腿カフの周径は計測値を基に調節または、実際に当てて調節しておきます。(図②)

大腿カフベルトの面ファスナーを外しておき、使用者の前面より装着します。装着位置を確認したら、面ファスナーを締めます。(図③、④)

連結バーのネジは付属の六角レンチを用いて事前に緩めておき、装着後に適切な股関節の角度を見てネジを締めます。

# 製品サイズ



発注品番	サイズ	適用範囲 対象月齢
28L20	フリー	約6～18ヶ月

## お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2016 年 4 月現在のものです。