

spex constructa

Guida rapida

Perché ogni corpo è diverso.



Scansiona il codice per guardare la nostra guida YouTube



Regolazione e adattamento dei cuscini Constructa

Obliquità pelvica

3 cm


Aggiungere i pad di posizionamento del bacino all'altezza richiesta nella parte posteriore del cuscino; se necessario usare i pad di posizionamento per le cosce per raccordarsi con la parte anteriore.



Zona pre-Ischiatica rialzata

3 cm

Se è necessaria una zona pre-ischiatica più alta, aggiungere i pad di posizionamento delle cosce su entrambi i lati del cuscino.

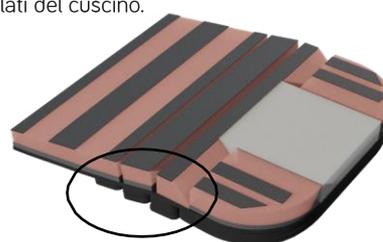

Regolazione e adattamento dei cuscini Constructa Flex

Lunghezza gamba

-2,5 cm

Dismetria arti inferiori


Il Constructa Flex è regolabile in funzione delle dismetrie degli arti inferiori. E' possibile utilizzare la giunzione a "puzzle" per regolare le differenze di lunghezza degli arti inferiori.



Obliquità pelvica

5 cm

Per regolare l'obliquità pelvica, è sufficiente aggiungere o rimuovere i pad ischiatici.

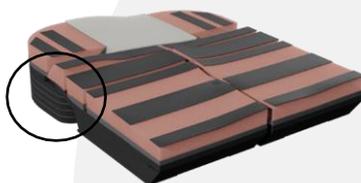

Intra o extra rotazione

7,5°

Utilizzare i cunei per regolare la rotazione delle cosce.



Abduzione anca

30°

Colpo di vento

15°

Per regolare l'abduzione degli arti inferiori, rimuovere prima le guide per i trocanteri. Questo permetterà di regolare facilmente il giunto a "puzzle". Riposizionare le guide dei trocanteri dopo aver effettuato la regolazione.



Flessione d'anca

15°

L'angolo di flessione dell'anca può essere regolato indipendentemente per ogni arto inferiore. Per ottenere un angolo di bacino più aperto, ruotare il cuneo inferiore di 180°. Ricordarsi di fissare il bacino mediante cintura pelvica.



Moduli di posizionamento e regolazione dei contenimenti

Sovrapposizione

Lo strato di schiuma superiore permette l'immersione e la distribuzione delle pressioni, e si adatta alla forma scelta. Il cuscino deve essere valutato e utilizzato con lo strato di schiuma superiore.




Regolazione delle guide per i trocanteri e larghezza dei contenimenti laterali

-2"

Regolare la larghezza della zona ischiatica per distribuire al meglio la pressione sui trocanteri.

Mantenere i contenimenti laterali allineati con le guide per i trocanteri.

Controllare che i bordi delle guide per i trocanteri non si sovrappongano con i contenimenti laterali.

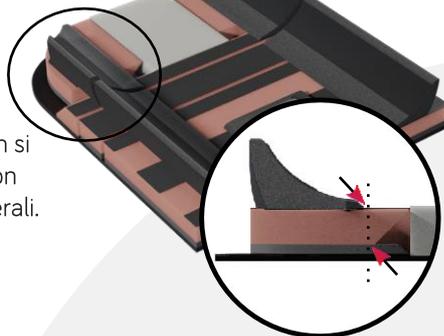

Solo modello a High Contour (HC) Larghezza pelvica e coscia

+1"


Il modello HC ha 2,5 cm di incremento della larghezza dei contenimenti laterali. Posizionare la base dei contenimenti sull'estremità del modulo sottostante per ottenere una larghezza maggiore.



Zona pre-ischiatica

Regolare il posizionamento dei moduli pre-ischiatici per contenere il bacino nella fossa ischiatica.


Se si utilizza un cuscino in abduzione, mantenere i moduli pre-ischiatici allineati con la fossa ischiatica.

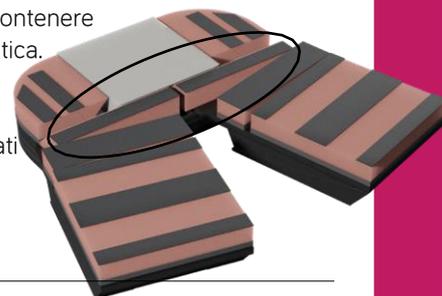

Guide laterali abduzione anca

10°
(5° per gamba)

Regolare i contenimenti laterali e mediali per gestire le abduzioni e adduzioni. Quando si regolano i contenimenti, assicurarsi che appoggino completamente sui moduli inferiori del cuscino.

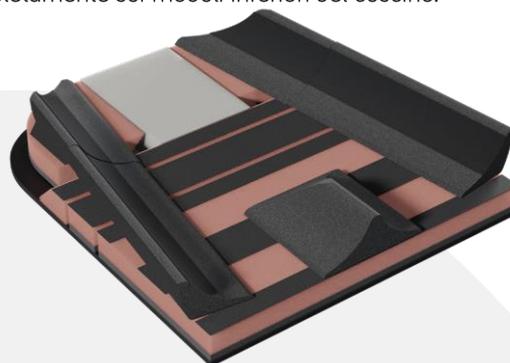

Lunghezza gambe

-2"

Per accorciare il cuscino traslare anteriormente tutti i moduli oppure rimuovere il modulo da 5 cm. Lasciare la porzione di base in eccesso nella parte posteriore del cuscino. In questo modo la porzione in eccesso rimarrà nascosta sotto lo schienale.

