

1C59 Taleo Adapt. Hydraulické chodidlo připravené žít.

Taleo Adapt jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede. Vychází z platformy *Taleo Low Profile*, nadstavbová hydraulická hlezenní jednotka ale umožňuje dorzální a plantární flexi, a tedy přizpůsobení se chůzi do kopce a z kopce. Uživatelé tak pocítí větší flexibilitu a komfort v pahýlovém lůžku.

Vyvinuté pro život

- Hydraulický hlezenní kloub umožňuje až 2° dorzální a 10° plantární flexi, tedy pohyb v rozsahu 12°.
- Ventily dorzální a plantární flexe můžete jednoduše nastavit a flekční odpor tak optimalizovat podle individuálních potřeb uživatele.
- Dorzální flexe během švihové fáze zaručuje lepší světlou výšku chodidla.
- Tři různé indikační rysky ukazují aktuální pozici hydraulického kloubu (PF, neutrální poloha, DF). Ortotikovi-protetikovi slouží jako orientační pomůcka a umožňují správnou funkční stavbu chodidla.
- Nastavitelná úroveň tlumení rázů a dynamiky chůze díky třem různým patním klínům.
- Odolné proti sladké, slané i chlorované vodě
- Otvory vespod kosmetického krytu chodidla zabraňují hromadění vody v protéze.



Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	130 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	22–30 cm
Hmotnost bez kosmetického krytu*	622 g
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	899 g
Stavební výška*	134 mm

* Pro velikost 26 cm



Hydraulický hlezenní kloub
Přizpůsobení se nerovnostem a svahům
Lepší komfort pahýlového lůžka

1C59.

Objednávkový formulář.

Zákazník

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Ortotik-protetik	

Adresa dodání (je-li odlišná od adresy zákazníka)

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Telefon	

Výběr tuhosti v závislosti na

1. tělesné hmotnosti a aktivitě a také na

Tělesná hmotnost (kg)	Normální aktivita	Vysoká aktivita
Do 51	1	2
52–58	2	3
59–67	3	4
68–77	4	5
78–88	5	6
89–100	6	7
101–115	7	8
116–130	8	8

2. velikosti chodidla

Velikost (cm)	Tuhost							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22						-	-	-
23							-	-
24							-	-
25								-
26								
27	-	-						
28	-	-						
29	-	-	-					
30	-	-	-					

Příklad pro objednání: 1C59=R-26-4-P/4N







Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	Barva	Tvar
1C59	=	-	-	- P /	N

Strana	Velikost (cm)	Barva
R Pravá	22, 23, ..., 30	4 Běžová
L Levá		15 Světle hnědá



Rozsah dodávky zahrnuje chodidlo 1C59, kosmetický kryt chodidla 2C8 včetně krytky, sadu patních klínů 2F50 (obsahující tři různé stupně tvrdosti) a černou punčošku Spectra.

Doporučené kombinace*

TT	TF
 21Y2=M10 QuickValve + 6Y95 Caleo 3D + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus 21Y2=M10 QuickValve + 6Y112 Skeo Sealing TT	 7T451=1 SiOCX TF Pro + 21Y12 Ventil se závitem 21Y14 PushValve + 6Y110 Skeo Sealing TF / 6Y111 Skeo Sealing 3D TF
	 3C88-3=* / 3C98-3=* C-Leg 3B1-3=* Genium 3B5-3=* Genium X3 3B5-4=* Genium X4
 4R11=* Quickchange adaptér	 4R11=* Quickchange adaptér 4R57=WR Voděodolný otočný adaptér
	 3F1=* + 99B120=* Funkční kosmetika

* Veškeré komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kompatibilita s chodidlem 1C59 *Taleo Adapt* zajišťuje optimální výkon pomůcky. Ortotici-protetici musí komponenty vybírat na základě individuálních kritérií uživatele.