

WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus



Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Nein


frontal/sagittal

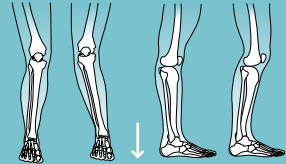

Fußdeformität?



Nein

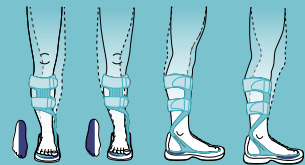

WalkOn Empfehlung



Flex
28U22




Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus

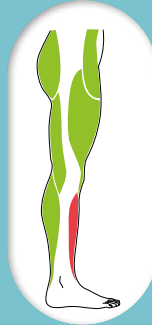

Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Ja


frontal/sagittal

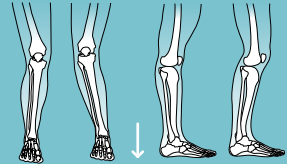

Fußdeformität?



Nein

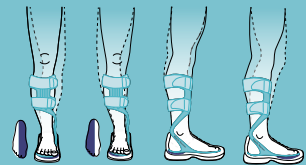

WalkOn Empfehlung



**Classic/
Trimable**
28U11/23




Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus

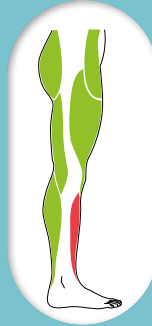

Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Ja


frontal/sagittal

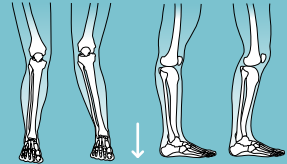

Fußdeformität?



Ja

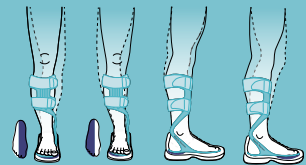

WalkOn Empfehlung



Lateral
28U33




Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus

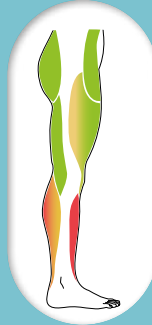

Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Ja
→


frontal/sagittal

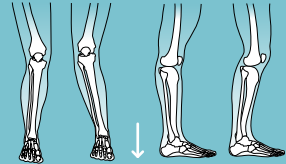

Fußdeformität?



Ja

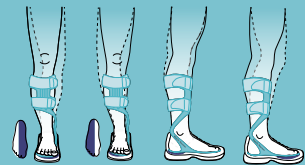

WalkOn Empfehlung



**Reaction
Lateral
28U34**




Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus

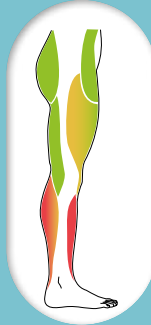

Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Ja
→


frontal/sagittal

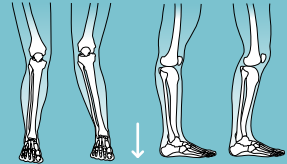

Fußdeformität?



Nein

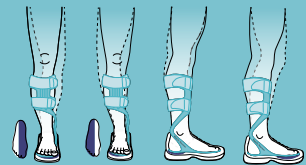

WalkOn Empfehlung



Reaction
28U24




Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



WalkOn. Selection Guide.

Auswahl Muskelstatus

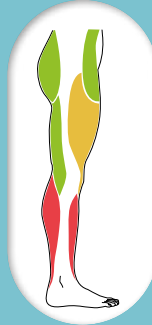

Muskelstatus nach Janda


- 0 Keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion
- 1 Sichtbare und/oder fühlbare Kontraktion ohne Bewegungsausmaß
- 2 Bewegung unter Abnahme der Schwerkraft ist möglich
- 3 Bewegung in vollem Umfang gegen die Schwerkraft ist möglich
- 4 Bewegung in vollem Umfang gegen einen leichten Widerstand ist möglich
- 5 Bewegung in vollem Umfang gegen einen deutlichen Widerstand ist möglich

Achsabweichung: frontal



Ja
→


frontal/sagittal

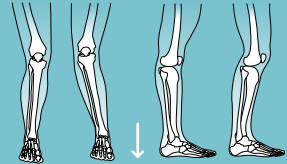

Fußdeformität?



Nein

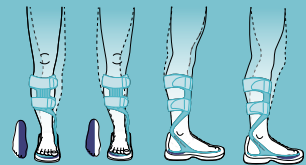

WalkOn Empfehlung




**Reaction
Plus**
28U25



Für weitere Informationen
besuchen Sie unser
Downloadcenter



Eigenschaften der WalkOn-Orthesen in der Dynamik.

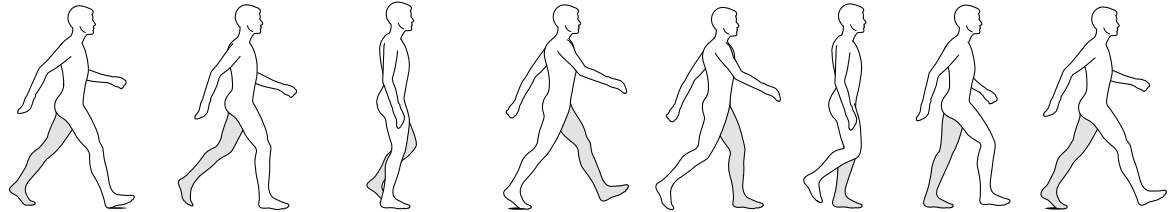

WalkOn Typ Gangbeeinflussung*	Fersenauftritt	Bodenreaktion	Mittlere Standphase	Terminale Standphase	Vor- und initiale Schwungphase	Schwungphase
WalkOn Flex 28U22	Weich, lässt Torsionsbewegung zu	Leichter Einfluss auf die Knieflexion		Leichter Einfluss auf die Vorschwungphase		Kompensiert den Fallfuß und hält den Fuß in der Funktionsstellung
WalkOn/-Trimable/-Lateral 28U11/23/33	Kontrollierter Fersenauftritt, keine Torsion	Leichte Unterstützung der Knieflexion. Aufnahme von Bewegungsenergie in die Karbonstruktur, leichte Kontrolle der mittleren Standphase		Energierückgabe in der Vorschwungphase unterstützt die Zehenablösung in der initialen Schwungphase kein Knieextensionsmoment, leichte Unterstützung der Vorschwungphase		Kompensiert den Fallfuß und hält den Fuß in der Funktionsstellung
WalkOn Reaction Lateral 28U34	Kontrollierter Fersenauftritt, keine Torsion	Moderate Unterstützung der Knieflexion. Aufnahme von Bewegungsenergie in die Karbonstruktur, moderate Kontrolle der mittleren Standphase		Energierückgabe in der Vorschwungphase unterstützt die Zehenablösung in der initialen Schwungphase leichtes Knieextensionsmoment, moderate Unterstützung der Vorschwungphase		Kompensiert den Fallfuß und hält den Fuß in der Funktionsstellung
WalkOn Reaction 28U24	Kontrollierter Fersenauftritt, keine Torsion	Moderate Unterstützung der Knieflexion. Aufnahme von Bewegungsenergie in die Karbonstruktur, moderate Kontrolle der mittleren Standphase		Energierückgabe in der Vorschwungphase unterstützt die Zehenablösung in der initialen Schwungphase moderates Knieextensionsmoment, hohe Unterstützung der Vorschwungphase		Kompensiert den Fallfuß und hält den Fuß in der Funktionsstellung
WalkOn Reaction Plus 28U25	Kontrollierter Fersenauftritt, keine Torsion	Moderate Unterstützung der Knieflexion. Aufnahme von Bewegungsenergie in die Karbonstruktur, hohe Kontrolle der mittleren Standphase		Energierückgabe in der Vorschwungphase unterstützt die Zehenablösung in der initialen Schwungphase hohes Knieextensionsmoment, hohe Unterstützung der Vorschwungphase		Kompensiert den Fallfuß und hält den Fuß in der Funktionsstellung

*abhängig von den körperlichen Fähigkeiten des Patienten

646D1820-DE_DE © Ottobock 2022