

前面支持 短下肢装具 ゴーオン (28U70)

- ・軽度の下垂足の方に
- ・前面支持式でかさ張らない
- ・装着したまま靴に入れやすい
- ・フリーサイズ・左右兼用
- ・足部遠位ストラップで室内使用も可能



Quality for life

ゴーオン! Go On!

ゴーオンは下垂足の方が、つまづくことなく前に歩み続けられるように開発されました。



- ① **前面支持**
踵、後面が開き、靴の装着*がしやすい。
- ② **バネ鋼**
ワイヤー状のバネ鋼を内蔵。しなやかな動きを生み出す。
- ③ **ソフトカバー**
支柱部以外は柔らかい布地使用。フィット感が良い。手洗い洗濯可能。
- ④ **足部遠位ストラップ**
足部を保持します。靴使用時は遠位ストラップを外します。

* 適切なフィッティングのため、ひも靴の使用を推奨します。




適応症例

- ・ 軽度下垂足
 - 腓骨神経麻痺や脳卒中後
 - パーキンソン病 など

特徴

- ・ 前面支持で靴に入れやすい (ひも靴推奨)
- ・ 室内での使用も可能
- ・ 軽量
- ・ フリーサイズ、左右兼用
- ・ カバーは取り外して洗濯可能

装着方法 (靴に入れて使用) ...遠位ストラップは外します。

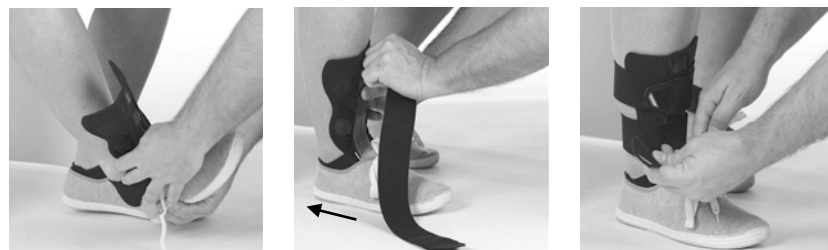

- ① 靴に装具を挿入してから足を靴に入れます。
- ② 足部を後方にずらし、背屈位を作り装具にそわせます。
- ③ 下腿部の2本のストラップを留めます。

発注品番

発注品番	サイズ
28U70	フリー
- 左右兼用	

装着方法の動画はこちら・・・>



装着方法 (室内使用)



- ① 装具を足部に合わせます。
- ② 遠位ストラップを留めます。
- ③ 下腿を後方にずらし、装具にそわせます。
- ④ 下腿部のストラップを留めます。

お問合せ先

- ・ 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・ カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本カタログの内容は 2018 年 11 月現在のものです。