

前面支持 短下肢装具 ゴーオン (28U70)

- ・ 軽度の下垂足の方に
- ・ 前面支持式でかさ張らない
- ・ 装着したまま靴に入れやすい
- ・ フリーサイズ・左右兼用
- ・ 足部遠位ストラップで室内使用も可能



ゴーオン! Go On!

ゴーオンは下垂足の方が、つまづくことなく前に歩み続けられるように開発されました。



- 1 前面支持**
踵、後面が開き、靴の装着*がしやすい。
- 2 バネ鋼**
ワイヤー状のバネ鋼を内蔵。しなやかな動きを生み出す。

- 3 ソフトカバー**
支柱部以外は柔らかい布地使用。フィット感が良い。手洗い洗濯可能。
- 4 足部遠位ストラップ**
足部を保持します。靴使用時は遠位ストラップを外します。

* 適切なフィッティングのため、ひも靴の使用を推奨します。



適応症例

- ・軽度下垂足
 - 腓骨神経麻痺や脳卒中後
 - パーキンソン病 など


特徴

- ・前面支持で靴に入れやすい (ひも靴推奨)
- ・室内での使用も可能
- ・軽量
- ・フリーサイズ、左右兼用
- ・カバーは取り外して洗濯可能

装着方法 (靴に入れて使用) ...遠位ストラップは外します。



① 靴に装具を挿入してから足を靴に入れます。

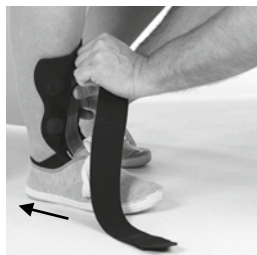

② 足部を後方にずらし、背屈位を作り装具にそわせます。



③ 下腿部の2本のストラップを留めます。

発注品番

発注品番	サイズ
28U70	フリー
- 左右兼用	

装着方法の動画はこちら...>



装着方法 (室内使用)



① 装具を足部に合わせます。



② 遠位ストラップを留めます。



③ 下腿を後方にずらし、装具にそわせます。



④ 下腿部のストラップを留めます。

お問合せ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2018 年 11 月現在のものです。