

ottobock.

前面支持 短下肢装具
ゴーオン (28U70)



1. 軽度の下垂足の方に
2. 前面支持式でかさ張らない
3. フリーサイズ・左右兼用

特長


ゴーオンは下垂足の方が、つまづくことなく前に歩み続けられるように開発されました。

- ・前面支持で靴に入れやすい（ひも靴推奨）
- ・室内での使用も可能
- ・軽量
- ・フリーサイズ、左右兼用
- ・カバーは取り外して洗濯可能

適応

- ・軽度下垂足
 - 腓骨神経麻痺や脳卒中後
 - パーキンソン病 など

* 適応症例は、海外で認可されたものです。

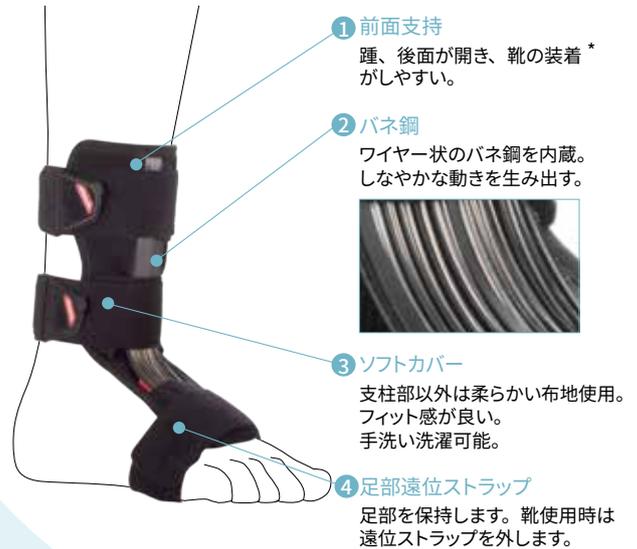

* 適切なフィッティングのため、ひも靴の使用を推奨します。

簡単装着

屋外使用

靴に入れて使用

遠位ストラップは外します。



- ① 靴に装具を挿入してから足を靴に入れます。



- ② 足部を後方にずらし、背屈位を作り装具にそわせます。



- ③ 下腿部の2本のストラップを留めます。

室内使用



- ① 装具を足部に合わせます。



- ② 遠位ストラップを留めます。



- ③ 下腿を後方にずらして、装具にそわせます。



- ④ 下腿部のストラップを留めます。

試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。

* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

ホームページ



製品名 製品番号

ゴーオン 28U70



製品サイズ

発注品番	サイズ
28U70	フリー

- 左右兼用

装着方法
Youtube 動画



オットーボック製品や活動などご紹介

フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・本誌掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。