

50C20 ネッキー カラー

50C30 ネッキー カラー フォルテ

取扱手引書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取り扱いいただくために、使用前に本取扱手引書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。

装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的

『50C20 ネッキー カラー』、『50C30 ネッキー カラー フォルテ』頸椎カラーは、適応・用途に合わせて頸部保護のために単独で装着する装具です。

適応・用途

頸椎症候群、異常動揺性、関節リウマチ、捻挫、筋緊張、頸椎症などによる疼痛や不安定性に対する頸部の保護・支持など。頸部周径サイズで37cm～50cmの方が対象になります。

素材

本体：ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン

『50C30 ネッキー カラー フォルテ』のみ支持体：低密度ポリエチレン

特徴および注意事項

- ◆ 本製品は、顎・咽頭部を受けるためのくぼみを設け、解剖学的形状を反映させた頸椎装具（頸椎カラー）です。本製品の基本素材には発泡体（フォーム）を用い、支持性と快適性（通気性）に優れています。
- ◆ 高さは8cm、10cmの2種類があります。
- ◆ 『50C30 ネッキー カラー フォルテ』はプラスチックシートで補強されており、『50C20 ネッキー カラー』よりも高い支持機能を有しています。
- ◆ オフホワイト色の製品カバーには高品質のマイクロファイバー素材を使用しています。
- ◆ サポーターおよび、装具を含む全製品の装着サイズが小さすぎる場合、過度な圧迫による血行障害が起こる恐れがあります。製品は、身体に合った適切なサイズを選択してください。

装着方法


- ◆ 初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもとで行ってください。
- ◆ 装着後、前後・上下など正しく装着できているかを確認してください。装着状態の適合調整は医師または義肢装具士が行ってください。

使用上の注意

- ◆ 適応方法に関してのお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 1日の使用時間および長期に渡る使用期間については、医師の指示に従ってください。
- ◆ 8時間を越える長時間の使用、就寝時、入浴時の装着は行わないでください。
- ◆ 装着により異常な症状が見られる場合には、使用を中止し、直ちに医師に相談してください。
- ◆ 本製品は、処方を受けた皮膚状態が良好な一個人の方のみが使用してください。同一品を他の方が使用されると、本来の性能が出ず、また製品の衛生状態を損なう恐れがあります。
- ◆ 以下の疾患および症状が見られる場合は、本製品を装着する前に必ず医師に相談してください。
 - ① サポーターを装着される部位の皮膚疾患、異常および損傷、または炎症等が見られる場合。
 - ② 熱感、発赤、瘢痕、腫脹等が見られる場合。
 - ③ 下肢静脈瘤に対して著しく作用してしまう恐れがある場合。
 - ④ サポーター装着部位から離れた場所に、不明瞭な浮腫などを含むリンパ管の流れに対する異常が見られる場合。
 - ⑤ 下肢の循環器系および知覚異常などが見られる場合。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を越える場所に放置したりしないでください。
- ◆ 本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

お手入れ方法

- ◆ 洗濯の際には、30℃以下の水と中性洗剤で丁寧に手洗いしてください。乾燥は日陰のつり干しとし、直射日光にはさらさないでください。また乾燥機を使用しての乾燥やドライクリーニング等は行わないでください。アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤等の使用はしないでください。製品を傷める原因となります。

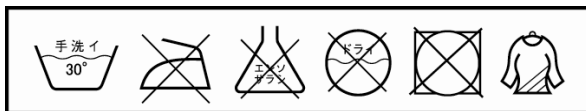

お問い合わせ窓口：

輸入元： オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F
TEL: 03-6739-4090(代表)

O-IFU-50C20-50C30-202304-SPR