

iconiq.

Precizie, simplificată.

Manșonul de bont iconiq este un manșon personalizat din material siliconic confortabil (cushion), proiectat și fabricat individual pentru fiecare utilizator, pe baza scanării bontului rezidual. Acesta combină fluxurile de lucru digitale avansate cu un material inovator din silicon, pentru ca personalizarea să fie rapidă, eficientă și accesibilă în practica clinică de zi cu zi.

Realizate printr-un proces unic de imprimare, manșoanele de bont iconiq sunt modelate cu precizie pentru a se adapta anatomiei individuale a fiecărui utilizator. Rezultatul este o interfață sigură și confortabilă, care susține o suspensie fiabilă și performanțe constante în utilizarea zilnică.

Beneficii pentru utilizatori

- Potrivire individualizată pentru confort
- Compresie uniformă pentru stabilitate îmbunătățită
- Suprafață interioară texturată pentru fixare sigură
- Aplicare și îndepărtare fără efort
- Ușor de curățat
- Protecție împotriva apei dulci, sărate și clorinate

Beneficii pentru specialiștii O&P

- Potrivit pentru persoane cu amputații TT, TF, KD și Syme
- Potrivit pentru toate nivelurile de mobilitate, atât pentru copii, cât și pentru adulți
- Grosime uniformă sau progresivă a peretelui (3–7 mm)
- Grosime variabilă a stratului siliconic din zona distală (cushion) (5–13 mm)
- Trei niveluri de duritate Shore, adaptate nevoilor individuale ale utilizatorului
- Proces curat, fără mulaj din ghips
- Ușor de reproduș pentru reprotézări eficiente

ottobock.



Proces digital eficient.

1

Scanați bontul

Capturați bontul cu ajutorul scannerului dumneavoastră sau al altor scanere utilizate în mod obișnuit în practica O&P. Asigurați-vă că scanarea este completă și poate fi exportată ca fișier .stl, .ply sau .obj.

2

Configurați și comandați

Autentificați-vă în platforma custom fabrication cu Ottobock ID. Încărcați fișierul scanat, introduceți datele pacientului și configurați manșonul de bont.


3

Producție și livrare


Manșonul de bont este produs în 4-8 zile lucrătoare. Termenele de livrare variază în funcție de destinație.

Opțiuni individuale pentru tipul suprafeței exterioare.

iconiq poate fi comandat cu suprafață exterioară netedă, acoperită cu silicon, sau cu suprafață textilă, în funcție de cerințele clinice și preferințele utilizatorului. Versiunea textilă permite aplicarea și îndepărtarea ușoară, oferind în același timp stabilitate și confort suplimentare, și este disponibilă cu material textil integral sau parțial. Versiunea acoperită cu silicon este ușoară, simplu de curățat, se usucă rapid și permite vizualizarea bontului rezidual.

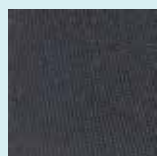

Material textil negru

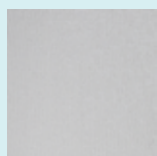

Material textil gri



Material textil bej



Silicon acoperit



Suprafață interioară texturată pentru fixare sigură

Date tehnice

Cod articol	Nivel de amputație	Mecanism de fixare	Suprafață exterioară	Culoare
6Y800=C-W-W-99	TT, Syme	Cushion	silicon	transparent
6Y801=C-T-W-7	TT, Syme	Cushion	material textil	negru
6Y801=C-T-W-0	TT, Syme	Cushion	material textil	bej
6Y801=C-T-W-1	TT, Syme	Cushion	material textil	gri
6Y830=C-W-W-99	TF, KD	Cushion	silicon	transparent
6Y831=C-T-W-7	TF, KD	Cushion	material textil	negru
6Y831=C-T-W-0	TF, KD	Cushion	material textil	bej
6Y831=C-T-W-1	TF, KD	Cushion	material textil	gri

Structura codului de articol

Art.	Mecanism de fixare	Exterior	Suprafață exterioară	Culoare
Art.	Mecanism de fixare	Exterior	Suprafață exterioară	Culoare
6Y800	TT, fără material textil	C manșon tip cushion	W fără aditivi	99 transparent
6Y801	TT, material textil	T material textil integral		7 negru
6Y830	TF, fără material textil	F material textil parțial		1 gri
6Y831	TF, material textil			0 bej

Combinatii de suspensie recomandate

TT	TF
114S1 MyFit TT	21Y2 QuickValve
21Y2 QuickValve	21Y21 ClickValve
453A30/40 genunchieră de etanșare ProFlex	21Y14 PushValve



Create your **custom fabrication** account now.
lifelounge.io/custom-fabrication