

# 504 エラスティック アンクルサポート

## 取扱手引書

### 義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取扱いいただくために、使用前に本取扱手引書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。

装着者の方に、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

### 使用目的:

ソフトで快適な素材により足関節を保護、固定します。

### 適応・用途:

軽度の足関節捻挫、不安定性など

### 素材:

レーヨン、ナイロン、ポリウレタン

### 使用上の注意

- ◆ 適応方法等のお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、直射日光が当たるなど高温の場所に放置しないでください。
- ◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士によって行なってください。
- ◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
- ◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4時間を超える連続使用は避けてください。  
その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、長時間の連続使用は避けてください。
- ◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記をご参照ください。
- ◆ 本製品を廃棄する際には、各自治体の廃棄区分に従ってください。


## 装着方法

初めて装着する際は、必ず医師、または義肢装具士の指導のもと行なってください。

- 1) ベルトの両端のループのうち片側を正面から足に通してください。
- 2) ベルトを損傷していない健常側からアキレス腱の後方へ回します。
- 3) 続いて、足の甲へ回し、足底へベルトを回します。
- 4) さらにベルトをもう一度周回させて、最後にベルトのループの他方を正面から足に通します。
- 5) 全体を強く締めすぎないように注意し、正しく装着されていることを確認してください。

## お手入れの方法

- ◆ 洗濯の際には 40℃ 以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
- ◆ 陰干しする際、製品のシワを軽く伸ばしてください。
- ◆ 塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用は行わないでください。

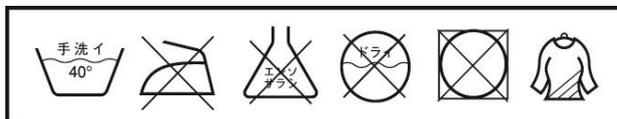

## お問合せ窓口:

輸入元: オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル  
4F TEL: 03-6739-4090(代表)

O-IFU-504-202304-0BJ