

4R57 Forgatóadapter

Forgatóadapterrel a jobb életminőségért

A combprotézisek a moduláris kialakítás ellenére többé-kevésbé merevek. Funkcionális adapterek használatával a protézisrendszer jobban képes pótolni az elveszett funkcionalitást és mobilitást. A természetes mozgásminta megközelítésével az adapter nagyobb biztonságot nyújt, megkönnyíti a mindennapi életet és megelőző szerepet is betölt.



Forgatóadapter

Mire szolgál a forgatóadapter?

A forgatóadapter combamputációt vagy csípőexartikulációt követően lehetővé teszi a művégtag magasba emelését, a keresztbe tett lábbal való ülést, illetve a lábak keresztvezését.

Nagyobb biztonság

- Forgatóadapterrel vezetés közben a protézis elforgatható, így a pedálok gond nélkül működtethetők az ép lábbal, így csökkenthető annak a veszélye, hogy a protézisláb beszorul a pedálok alá. Emellett kényelmesebb ülőhelyzetet biztosít a protézis viselőjének.
- Az adapter egy pozícióban rögzíthető, így nem fordulhat elő, hogy a páciens hátrafelé vagy oldalra fordított lábbal és térdel induljon el.

A mindennapi élet megkönnyítése

- A forgatóadapter biztosítja a kombinációs mozgások végrehajtását, ezáltal például kényelmessé válik a cipő felhúzása.
- A forgatóadapterrel keresztbe tehető a lábak, ami komfortosabb ülőhelyzetet biztosít.

Megelőzés

- A nadrág, a cipő és a zokni felvétele kényelmesebb testtartásban történhet. Emellett a protézis elfordításával csökkenthető a comb terhelése. Ez segít megelőzni az ágyéktáji izomgörcsök kialakulását, illetve erősödését. Az adapterben a forgatómechanizmus egyszerűen kezelhető, valamint a kis forgatási ellenállásnak köszönhetően könnyen használható.

Műszaki adatok

Cikkszám	4R57	4R57=ST
Anyag	Rozsdamentes acél	
Disztális csatlakozás	Piramis adapter befogadó	
Proximális csatlakozás	Piramis adapter	Menetes
Rendszer magasság	22 mm	42 mm
Súly	170 g	185 g
Rotáció	max. 360° (kozmetikai hab nélkül)	
Terhelhetőség	150 kg	

A 4R57=ST Rotációs adapter rendelése esetén a helyes lamináláshoz 4X46=ST lamináló segédlet használata ajánlott, amely külön rendelhető.

A 4R57 Rotációs adapter nem használható 2R49, 2R50 és 4R95 adapterekkel.



4R57, 4R57=ST
≤ 150 kg

