

## Hjälpmedel vid patienturval för C-Brace®

Detta dokument hjälper till att avgöra om en patient är lämplig för en C-Brace®. Dokumentet bör dock endast betraktas som ett hjälpmedel. För det slutgiltiga beslutet om försörjning, vänligen prova patientens lämplighet för C-Brace med en diagnostisk testortos (DTO).

### Kognitiva krav

Patienten måste kunna säkerställa korrekt hantering, skötsel och användning av ortosen (t.ex. kunna höra ljudsignaler).

### Funktionsnedsättning

Neuromuskulär instabilitet i knäleden i sagittalplanet

Diagnos (av klinikern):

.....

Påverkad sida:

.....

### Kriterier för uteslutning

Om något av följande stämmer in på din patient, kan han eller hon inte förses med en C-Brace® i nuläget:

.....

**Initiering av svingfasen från stående position är inte möjlig**

.....

**Vikt över 125 kg**

.....

**Svår spasticitet**

.....

**Benet kortat mer än 15 cm**

.....

**Knä- och höftflexionskontraktur mer än 10°**

.....

**Otillräcklig neuromuskulär bålstabilitet för utprovning**

.....

**Sjukdomar som utesluter användning av ortoser (t.ex. ödem, omfattande hudirritation)**

.....

**Ortoprotes**

.....

O&P Professional		Customer	
Name	<input type="text"/>	Company	<input type="text"/>
Telephone	<input type="text"/>	Branch	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>